


Periotomi Käyttöohje

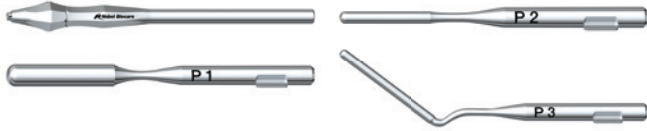

Tärkeää: Lue tämä.

Vastuuvapauslauseke:

Tämä tuote on osa kokonaisuuskonseptia, ja sitä saa käyttää ainoastaan siihen liittyvän alkuperäisen tuotteen kanssa Nobel Biocaren ohjeiden ja suositusten mukaisesti. Kolmansien osapuolten tuotteiden käyttäminen Nobel Biocaren tuotteiden kanssa suositusten vastaisesti aiheuttaa Nobel Biocaren ilmaistujen tai epäsuorien takuiden tai muiden veloitteiden raukeamisen. Nobel Biocare -tuotteiden käyttäjän pitää ratkaista, soveltuuko tuote kyseiselle potilaalle ja kyseiseen tilanteeseen. Nobel Biocare ei vastaa ilmaistusta tai epäsuorista vaateista eikä se ole vastuussa suorista, epäsuorista, rangaistusluonteisista tai muista vahingonkorvauksista, jotka liittyvät ammatillisen arviointikyvyn tai toiminnan virheisiin Nobel Biocaren tuotteiden käytön aikana. Käyttäjän tulee myös tutustua säännöllisesti tämän Nobel Biocaren tuotteen uusiin kehitysvaiheisiin ja sovelluksiin. Epävarmoissa tilanteissa käyttäjän on otettava yhteyttä Nobel Biocareen. Käyttäjä vastaa tuotteen käyttämisestä. Nobel Biocare ei ole vastuussa mistään käytöstä aiheutuvien vahinkojen vahingonkorvauksista. Viranomaiset eivät välttämättä ole antaneet kaikille tässä käyttöohjeessa kuvatuille tuotteille myyntilupaa kaikilla alueilla.

Kuvaus:

Periotomi on uudelleenkäytettävä terän muotoinen instrumentti, jota käytetään apuna hampaan irrottamisessa niin, että ympäröivä alueaaliruu vahingoittuu mahdollisimman vähän. Periotomia on saatavana kolme eri teräkokooppaossa hampaan muodon mukaan (P1–P3). Terät liitetään kahvaan.

Käyttötarkoitus:

Periotomi on ihanteellinen instrumentti kudoksia säästävään hampaan poistoon ennen välitöntä implantin asennusta.

Periotomia voi käyttää periodontaalisten säikeiden hallittuun erottamiseen irrotettavan hampaan juuresta. Instrumentti on myös tarkoitettu marginaalisen ikenen avaamiseen hampaan poiston jälkeen, kun implanttikohtaa valmistellaan.

Käyttökohteet:

Tämä instrumentti on tarkoitettu käytettäväksi korjauskelvottomiksi vaurioituneiden hampaiden poistamiseen, kun ikenen nontraumaattinen erottaminen on tarpeen.

Käyttörajoitukset:

Yleisesti ottaen vasta-aiheet koskevat implanttikirurgiaan liittyviä toimenpiteitä:

- potilaille, jotka eivät terveydellisistä syistä sovellu suukirurgiseen toimenpiteeseen.
- ruostumattomalle teräkselle allergisille tai yliherkille potilaille.

Varoitus:

Periotomia ei saa käyttää ankyloituneisiin hampaisiin tai juurten kärkeen nostamiseen.

Huomioita:

Hoidon onnistuminen riippuu ratkaisevasti instrumenttien hoidosta ja ylläpidosta. Steriloidut instrumentit suojaavat potilasta ja hoitohenkilökuntaa infektioilta ja ovat erittäin tärkeitä koko hoidon onnistumisen kannalta.

Kaikki leikkauksessa käytettävät instrumentit ja työkalut on pidettävä hyvässä kunnossa ja on pidettävä huolta siitä, että instrumentit eivät vahingoita implantteja tai muita komponentteja.

Laitteiden pienen koon vuoksi on huolehdittava siitä, ettei potilas niele tai aspiroi niitä.

Suosittellemme erityiskoulutusta sekä uusille että kokeneemmille hammasimplanttihoidon ammattilaisille ennen uuden hoitomenetelmän käyttöönottoa. Nobel Biocare tarjoaa laajan valikoiman eritasoisia kursseja. Lisätietoja on osoitteessa www.nobelbiocare.com.

Mahdollisia komplikaatioita voidaan välttää työskentelemällä ensimmäisellä kerralla sellaisen kollegan kanssa, jolla on kokemusta uudesta laitteesta tai hoitomenetelmästä. Nobel Biocarella on tätä varten maailmanlaajuinen ohjaajien verkosto.

Instrumentin virheellinen käyttö voi aiheuttaa terän murtumisen.

Käsittely:

1. Aseta terä kahvaan kiertämällä kahvaa vastapäivään ja pitämällä kahvan kärkeä paikoillaan. Liu'uta terä kahvan kärkeen. Terän varressa on ohjain, joka lukittuu kahvassa olevaan loveen kiertymisen estämistä varten. Kiristä kääntämällä kahvaa myötäpäivään.
2. Työnnä periotomin terä tasaisesti syvälle poistettavan hampaan ientaskuun. Liikuta terää ylös ja alas hampaan juuren ympärillä, jotta periodontaaliset säikeet irtoavat. Tämän jälkeen hampaan voi poistaa seuraavia kirurgisia vakioitimenpiteitä noudattamalla.
3. Vapauta ien irrottamisen jälkeen työntämällä periotomia subperiostealisesti ja nostamalla kudosta luusta. Marginaalisen ikenen voi tämän jälkeen avata, kun implanttikohtaa preparoidaan.

Lisätietoja implantointikohdan valmisteleminen on vastaavan implanttijärjestelmän toimenpide-oppaassa, jonka saa osoitteesta www.nobelbiocare.com tai pyytämällä uusimman painetun version Nobel Biocaren edustajalta.

Materiaalit:

Terä ja kahva: lääketieteellistä ruostumatonta terästä.

Puhdistus- ja sterilointiohjeet:

Laitteet toimitetaan sterilioimattomina, niitä voidaan käyttää uudelleen, ja ne on puhdistettava ja steriloitava ennen käyttöä. Pura kahvan kärki ja kahva ennen puhdistamista.

Yhdysvallat: sulje yksi tuote pussiin ja höyrysteriloi 132°C:n (270°F:n) lämpötilassa kolmen minuutin ajan.

Yhdysvaltojen ulkopuolella: sulje yksi tuote pussiin ja höyrysteriloi 132–135°C:n (270–275°F) lämpötilassa kolmen minuutin ajan.

Vaihtoehto Iso-Britannia: sulje yksi tuote pussiin ja höyrysteriloi 134–135°C:n (273–275°F) lämpötilassa kolmen minuutin ajan.

Täydelliset parametrit sekä tiedot steriloinnista on esitetty Sterilization guidelines (Sterilointiohjeet) -osion kohdassa Cleaning & Sterilization Guidelines of Nobel Biocare Products including MRI Information (Nobel Biocare -tuotteiden puhdistus- ja sterilointiohjeet sekä MRI-tiedot) osoitteessa www.nobelbiocare.com/sterilization. Voit myös pyytää uusimman painetun version Nobel Biocaren edustajalta.

Varoitus: Epästeriilien komponenttien uudelleenkäyttö saattaa aiheuttaa kudoksiin infektion tai tartuntatautiin tarttumisen.

MR-turvallisuustiedot:

Tuotteen turvallisuutta tai yhteensopivuutta MRI-ympäristön kanssa ei ole testattu. Tuotteen kuumenemistä tai siirtymistä MRI-ympäristössä ei ole tutkittu.

Säilytys ja käsittely:

Tuotetta on säilytettävä kuivassa paikassa alkuperäispakkauksessaan huoneenlämmössä ja suojassa suoralta auringonvalolta. Epäasianmukainen säilytys voi vaikuttaa laitteen ominaisuuksiin ja aiheuttaa vaurioitumisen.

Hävittäminen:

Laitteen hävittämisessä on noudatettava paikallisia määräyksiä ja ympäristövaatimuksia sekä otettava huomioon erilaiset kontaminaatiotasot.



Valmistaja: Nobel Biocare AB, Box 5190, 402 26

Västra Hamngatan 1, 411 17 Göteborg, Ruotsi.

Puhelin: +46 31 81 88 00. Faksi: +46 31 16 31 52. www.nobelbiocare.com



Epästeriili



Varoitus



Lue käyttöohje



Viimeinen
käyttöpäivä



Eräkoodi

FI Kaikki oikeudet pidätetään.

Nobel Biocare, Nobel Biocare -logo ja muut tässä asiakirjassa käytetyt tavaramerkit ovat, ellei toisin mainita tai ellei asiayhteydestä toisin ilmene, Nobel Biocaren tavaramerkkejä. Tämän kansion tuotekuvat eivät välttämättä ole mittakaavassa.