

Yhteensopivuustiedot

Sisältö

| | |
|---|----|
| Tuotteen yhteensopivuuden käyttöohje | 3 |
| IFU1001. NobelActive® TiUnite®- ja NobelActive® TiUltra™ -implantit | 3 |
| IFU1002. NobelParallel™ CC- ja NobelParallel™ CC TiUltra™ -implantit | 3 |
| IFU1007. Brånemark System® MkIII TiUnite®, NobelSpeedy®, Twist Drill -porat, Twist Step Drill -porat, upotusporat, Screw Tap -kierreleikkurit | 4 |
| IFU1008. NobelReplace® Select™ TC | 6 |
| IFU1010. NobelReplace® kartiokiinnitys, NobelReplace® kartiokiinnitys PMC, NobelReplace® kartiokiinnitys TiUltra™ | 7 |
| IFU1012. Replace Select™ Tapered TiUnite®, Replace Select™ Tapered PMC | 7 |
| IFU1016. Peittoruuvit | 8 |
| IFU1018. Esteettinen jatke kartioliitännällä/Brånemark System®/NobelReplace®, Esteettinen jatke Nobel Biocare N1™ TCC | 8 |
| IFU1023. Yleiskäyttöiset alustat ja jatkeet | 9 |
| IFU1040. Jatkeen vapautustapit CC | 9 |
| IFU1043. Jatkeruuvien irrotustyökalut | 9 |
| IFU1048. Kooniset porat, Dense Bone Drill -porat, Screw Tap -kierreleikkurit | 10 |
| IFU1050. NobelZygoma™ 45° | 10 |
| IFU1051. NobelZygoma™ 0° -implantit | 10 |
| IFU1057. Kliiniset ruuvit, jatkeruuvit, proteettiset ruuvit | 10 |
| IFU1067. PureSet™-tarjotin | 11 |
| IFU1074. On1™-konsepti | 11 |
| IFU1075. Multi-unit--jatkeet ja paranemissuojat | 13 |
| IFU1085. Ruuvinväntimet | 13 |
| IFU1086. Jäljennössylinterit | 13 |
| IFU1087. Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC -järjestelmä | 14 |
| IFU1088. Nobel Biocare N1™ Base -konsepti | 14 |

| | |
|---|----|
| IFU1089. Luun reunan viimeistelijät ja luun reunan viimeistelyohjaimet | 15 |
| IFU1090. Uudelleenkäytettävät Nobel Biocare -instrumentit ja -komponentit. | 15 |
| IFU1091. Asemapaikantimet | 16 |
| IFU1092. Poranterän syvyysvastesarjat ohjattuihin ja vapaalla kädellä tehtäviin leikkauksiin. | 16 |
| IFU1093. Tilapäisjatkeet ja -sylinterit. | 18 |
| IFU1094. Paranemisjatkeet, paranemisruuvit. | 18 |
| IFU1095. Zygo-ma-implantti RP | 19 |
| IFU1096. Jatkeiden irrotustyökalut. | 20 |
| IFU1097. Implantin irrotustyökalut | 20 |
| IFU1098. Manuaaliset Surgical- ja Prosthetic -momenttivääntimet. | 21 |
| IFU1099. Trefoil™-järjestelmä. | 21 |
| IFU1100. Korvaavat Nobel Biocare- osat. | 22 |
| IFU1101. Röntgenmallit. | 23 |
| IFU1102. Titanium-jatkeaihio Nobel Biocare N1™ TCC. | 23 |
| IFU2001. NobelGuide® -kirurgiset ohjaukiskokot ja ohjatut ankkurointipinnit. | 23 |
| IFU2009. Ohjatut pilottiporasynterit, ohjauksylinterit ja ohjatut ankkurointipinnin synterit | 23 |
| IFU2011. Nobel Biocaren ohjatut leikkaustyökalut. | 23 |
| IFU3001. NobelProcera® Implant Bar Overdenture -implanttikiskon peittoproteesi | 26 |
| IFU3002. NobelProcera® Titanium ja Zirconia -implanttisillat | 26 |
| IFU3008. NobelProcera® kulmattu Zirconia-ruuvikanavajatkke Nobel Biocaren sisäiseen kartiokiinnitykseen (CC) | 26 |
| IFU3009. NobelProcera® täyden ääriiivan Zirconia -implanttikruunu (Full Contour Zirconia, FCZ) - Nobel Biocaren sisäiseen kartiokiinnitykseen | 27 |
| IFU3010. NobelProcera® Titanium ja NobelProcera® Zirconia -jatkeet | 27 |
| IFU3012. NobelProcera® Zirconia Crown | 27 |
| IFU3014. NobelProcera® Zirconia Bridge | 27 |
| IFU3018. NobelProcera® Zirconia Implant Bridge -implanttisilta. | 28 |
| IFU3020. NobelProcera® Zirconia N1 Base -alusta. | 28 |

Tuotteen yhteensopivuuden käyttöohje

Nobel Biocarella on erilaisia implantaatti- tai jatkejärjestelmiä erilaisilla liitännöillä. Jokaisessa implantaatti- tai jatkejärjestelmässä on vastaavat liitännät, osat ja instrumentit. Katso vastaavien osien ja instrumenttien oikeasta käytöstä vastaavan implantaatti- tai jatkejärjestelmän käyttöohjeet.

IFU1001. NobelActive® TiUnite®- ja NobelActive® TiUltra™ -implantit

NobelActive® TiUnite®/TiUltra™ -implanteissa on sisäinen kartiokiinnitys (CC), ja niitä on saatavana platformikoissa 3.0, kapea platformi (Narrow Platform, NP), vakioplatformi (Regular Platform, RP) ja leveä platformi (Wide Platform, WP). Implantit ovat yhteensopivia Nobel Biocaren proteettisten komponenttien kanssa, joissa on sisäinen kartiokiinnitys.

| | Platformi | Platformin halkaisija | Implantin halkaisija | Jatkeiden liitoskohta | Pituudet | Peittoruuvi |
|---|-----------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--|---|
| ● | 3.0 | Ø 3,0 mm | Ø 3,0 mm | Ø 2,5 mm | 10 mm, 11,5 mm, 13 mm, 15 mm | ei sisälly pakkaukseen |
| ● | NP | Ø 3,5 mm | Ø 3,5 mm | Ø 3,0 mm | 8,5 mm, 10 mm, 11,5 mm, 13 mm, 15 mm, 18 mm | ei sisälly pakkaukseen |
| ● | RP | Ø 3,9 mm | Ø 4,3 mm | Ø 3,4 mm | 8,5 mm, 10 mm, 11,5 mm, 13 mm, 15 mm, 18 mm | ei sisälly pakkaukseen |
| ● | RP | Ø 3,9 mm | Ø 5,0 mm | Ø 3,4 mm | 8,5 mm, 10 mm, 11,5 mm, 13 mm, 15 mm, 18 mm | ei sisälly pakkaukseen |
| ● | WP | Ø 5,1 mm | Ø 5,5 mm | Ø 4,4 mm | 7,0 mm, 8,5 mm, 10 mm, 11,5 mm, 13 mm, 15 mm | Sisältyy vain Nobel Active WP TiUnite® -pakkauksiin |

NobelActive® TiUnite®- ja NobelActive® TiUltra™ -implanttien asettamiseen on käytettävä kartiokiinnityksellä varustettuja implanttiväntimiä 3.0/NP/RP/WP. Tietoja implanttiväntimistä on Nobel Biocaren käyttöohjeessa IFU1090.

IFU1002. NobelParallel™ CC- ja NobelParallel™ CC TiUltra™ -implantit

NobelParallel™ CC- ja NobelParallel™ TiUltra™ -implanteissa on sisäinen kartiokiinnitys (CC), ja niitä on saatavana platformikokoina Narrow Platform (NP), Regular Platform (RP) ja Wide Platform (WP). Implantit ovat yhteensopivia Nobel Biocaren proteettisten komponenttien kanssa, joissa on sisäinen kartiokiinnitys.

| Platformi | Implantin halkaisija | Jatkeiden liitoskohta | Pituudet | Peittoruuvi | Värikoodaus |
|-----------|----------------------|-----------------------|---|--|--|
| NP | Ø 3,75 mm | Ø 3,0 mm | 7 mm, 8,5 mm, 10 mm, 11,5 mm, 13 mm, 15 mm, 18 mm | NobelParallel™ CC: sisältyy pakkaukseen NobelParallel™ TiUltra™: ei sisälly pakkaukseen | NobelParallel™ CC: magenta NobelParallel™ TiUltra™: ei platformikohtaista värikoodausta |
| RP | Ø 4,3 mm | Ø 3,4 mm | 7 mm, 8,5 mm, 10 mm, 11,5 mm, 13 mm, 15 mm, 18 mm | NobelParallel™ CC: sisältyy pakkaukseen NobelParallel™ TiUltra™: ei sisälly pakkaukseen | NobelParallel™ CC: keltainen NobelParallel™ TiUltra™: ei platformikohtaista värikoodausta |
| RP | Ø 5,0 mm | Ø 3,4 mm | 7 mm, 8,5 mm, 10 mm, 11,5 mm, 13 mm, 15 mm, 18 mm | NobelParallel™ CC: sisältyy pakkaukseen NobelParallel™ TiUltra™: ei sisälly pakkaukseen | NobelParallel™ CC: keltainen NobelParallel™ TiUltra™: ei platformikohtaista värikoodausta |
| WP | Ø 5,5 mm | Ø 4,4 mm | 7,0 mm, 8,5 mm, 10 mm, 11,5 mm, 13 mm, 15 mm | NobelParallel™ CC: sisältyy pakkaukseen NobelParallel™ TiUltra™: ei sisälly pakkaukseen | NobelParallel™ CC: sininen NobelParallel™ TiUltra™: ei platformikohtaista värikoodausta |

NobelParallel™ CC- ja NobelParallel™ CC TiUltra™ -implanttien asettamiseen on käytettävä kartioliitännällä NP/RP/WP varustettua implanttiväntimistöä. Tietoja implanttiväntimistöistä on Nobel Biocaren käyttöohjeessa IFU1090.

IFU1007. Brånemark System® MkIII TiUnite®, NobelSpeedy®, Twist Drill -porat, Twist Step Drill -porat, upotusporat, Screw Tap -kierreleikkurit

| Tuotenimi | Peittoruuvi | Implanttiväännin | Ruuvit | Jatkeet | | | Jäljennössylinteri |
|---------------------------------|----------------------------------|--|--|-------------------|---|---|---|
| | | | | Paraneminen | Väliaikainen | Pysyvä | |
| Brånemark System® Mk III TiU NP | Peittoruuvi Brånemark System® NP | Implanttiväännin NP Brånemark System Implanttiväännin Jakoavaimen sovitin NP | Jatkeruuvi Multi-Unit Kulmallinen Proteettinen ruuvi Multi-unit | Paranemisjatke NP | Välitön tilapäisjatke NP Muovisylinteri Välitön NP Tilapäisjatke NP QuickTemp™-jatke Kartiomainen NP Muovisylinteri QuickTemp™-jatke Kartiomainen NP Tilapäisjatke Kytkevä NP On1 Tilapäisjatke Ei-kytkävä NP Tilapäisjatke Muovinen Kytkevä NP Tilapäisjatke Muovinen Ei-kytkävä NP | Procera-esteettinen jatke NP Esteettinen jatke NP 15° Esteettinen jatke NP Snappy™-jatke NP Yleiskäyttöinen alusta NP GoldAdapt™ Kytkevä NP GoldAdapt™ Ei-kytkävä NP Multi-Unit-jatke NP 17° Multi-unit-jatke NobRpl NP | Jäljennössylinteri Suljettu tarjotin NP Jäljennössylinteri Avoin tarjotin NP Jäljennössylinteri Avoin tarjotin Multi-unit NP Jäljennössylinteri Suljettu tarjotin Multi-unit NP Jäljennössylinterikisko Suljettu tarjotin Multi-unit NP Tilapässylinteri Multi-unit Titanium NP Tilapässylinteri Multi-unit Muovi NP |
| Brånemark System® Mk III TiU RP | Peittoruuvi Brånemark System® RP | Implanttiväännin RP Brånemark System® Implanttiväännin Jakoavaimen sovitin RP | | Paranemisjatke RP | Välitön tilapäisjatke RP Muovisylinteri Välitön tilapäisjatke RP QuickTemp™-jatke Kartiomainen RP Muovisylinteri QuickTemp™-jatke Kartiomainen RP Tilapäisjatke Kytkevä RP Tilapäisjatke Ei-kytkävä RP Tilapäisjatke Muovinen Kytkevä RP Tilapäisjatke Muovinen Ei-kytkävä RP | Procera-esteettinen jatke RP Esteettinen jatke RP 15° Esteettinen jatke RP Snappy™-jatke RP Yleiskäyttöinen alusta RP Yleiskäyttöinen alusta Burn-out-sylinteri RP GoldAdapt™ Kytkevä RP GoldAdapt™ Ei-kytkävä RP Multi-Unit-jatke RP 17° Multi-unit-jatke RP 30° Multi-unit-jatke RP 30° Multi-Unit-jatke Ei-kytkävä RP Paikannusjatke RP Pallojatke Titanium RP | Jäljennössylinteri Suljettu tarjotin RP Jäljennössylinteri Avoin tarjotin RP Jäljennössylinterikisko Brånemark System® RP Jäljennössylinteri Avoin tarjotin Multi-unit RP Jäljennössylinteri Suljettu tarjotin Multi-unit RP Jäljennössylinterikisko Suljettu tarjotin Multi-unit RP Tilapäisjatke Multi-unit Titanium RP Tilapässylinteri Multi-unit Muovi RP |
| Brånemark System® Mk III TiU WP | Peittoruuvi Brånemark System® WP | Implanttiväännin WP Brånemark System Implanttiväännin Jakoavaimen sovitin WP | Proteettinen ruuvi Multi-unit | Paranemisjatke WP | Välitön tilapäisjatke WP Muovisylinteri Välitön tilapäisjatke WP QuickTemp™-jatke Kartiomainen WP Muovisylinteri QuickTemp™-jatke Kartiomainen WP Tilapäisjatke Kytkevä WP On1 Tilapäisjatke Ei-kytkävä WP Tilapäisjatke Muovinen Kytkevä WP Tilapäisjatke Muovinen Ei-kytkävä WP | Procera®-esteettinen jatke WP Esteettinen jatke WP 15° Esteettinen jatke WP Snappy™-jatke WP Yleiskäyttöinen alusta WP Yleiskäyttöinen alusta Burn-out-sylinteri WP GoldAdapt™ Kytkevä WP GoldAdapt™ Ei-kytkävä WP Multi-unit-jatke WP Paikannusjatke WP | Jäljennössylinteri Suljettu tarjotin WP Jäljennössylinteri Avoin tarjotin WP Jäljennössylinteri Avoin tarjotin Multi-unit WP Jäljennössylinteri Suljettu tarjotin Multi-unit WP Jäljennössylinterikisko Suljettu tarjotin Multi-unit WP Tilapäisjatke Multi-unit Titanium WP Tilapässylinteri Multi-unit Muovi WP |

| Tuotenimi | Peittoruuvi | Implanttiväännin | Ruuvit | Jatkeet | | | Jäljennössylinteri |
|------------------------|----------------------------------|--|---|-------------------|---|--|---|
| | | | | Paraneminen | Väliaikainen | Pysyvä | |
| NobelSpeedy® Shorty NP | Peittoruuvi Brånemark System® NP | Implanttiväännin NP Brånemark System® Implanttiväännin Jakoavaimen sovitin NP | Jatkeruuvi Multi-Unit Kullmallinen Proteettinen ruuvi Multi-unit | Paranemisjatke NP | Välitön tilapäisjatke NP | Procera-esteettinen jatke NP | Jäljennössylinteri Suljettu tarjotin NP |
| NobelSpeedy® Groovy NP | | | | | Muovisylinteri Välitön NP Tilapäisjatke NP QuickTemp™-jatke Kartiomainen NP Muovisylinteri QuickTemp™-jatke Kartiomainen NP Tilapäisjatke Kytkevä NP On1 Tilapäisjatke Ei-kytkävä NP Tilapäisjatke Muovinen Kytkevä NP Tilapäisjatke Muovinen Ei-kytkävä NP | Esteettinen jatke NP 15° Esteettinen jatke NP Snappy™-jatke NP Yleiskäyttöinen alusta NP Yleiskäyttöinen alusta Burn-out-sylinteri NP GoldAdapt™ Kytkevä NP GoldAdapt™ Ei-kytkävä NP Multi-Unit-jatke NP 17° Multi-unit-jatke NP Paikannusjatke NP Kultasylinterikisko Multi-unit (proteettinen ruuvi mukana) NP | Jäljennössylinteri Avoin tarjotin NP Jäljennössylinteri Avoin tarjotin Multi-unit NP Jäljennössylinteri Suljettu tarjotin Multi-unit NP Jäljennössylinterikisko Suljettu tarjotin Multi-unit NP Tilapässylinteri Multi-unit Titanium NP Tilapässylinteri Multi-unit Muovi NP |
| NobelSpeedy® Shorty RP | Peittoruuvi Brånemark System® RP | Implanttiväännin RP Brånemark System Implanttiväännin Jakoavaimen sovitin RP | | Paranemisjatke RP | Välitön tilapäisjatke RP | Procera-esteettinen jatke RP | Jäljennössylinteri Suljettu tarjotin RP |
| NobelSpeedy® Groovy RP | | | | | Muovisylinteri Välitön tilapäisjatke RP QuickTemp™-jatke Kartiomainen RP Muovisylinteri QuickTemp™-jatke Kartiomainen RP Tilapäisjatke Kytkevä RP Tilapäisjatke Ei-kytkävä RP Tilapäisjatke Muovinen Kytkevä RP Tilapäisjatke Muovinen Ei-kytkävä RP | Esteettinen jatke RP 15° Esteettinen jatke RP Snappy™-jatke RP Yleiskäyttöinen alusta RP Yleiskäyttöinen alusta Burn-out-sylinteri RP GoldAdapt™ Kytkevä RP GoldAdapt™ Ei-kytkävä RP Multi-Unit-jatke RP 17° Multi-unit-jatke RP 30° Multi-unit-jatke RP 30° Multi-Unit-jatke Ei-kytkävä RP Paikannusjatke RP Pallojatke Titanium RP Kultajatkemisko Implanttitaso (kliininen ruuvi mukana) RP Kultasylinterikisko Multi-unit (proteettinen ruuvi mukana) RP | Jäljennössylinteri Avoin tarjotin RP Jäljennössylinterikisko Brånemark System® RP Jäljennössylinteri Avoin tarjotin Multi-unit RP Jäljennössylinteri Suljettu tarjotin Multi-unit RP Jäljennössylinterikisko Suljettu tarjotin Multi-unit RP Tilapäisjatke Multi-unit Titanium RP Tilapässylinteri Multi-unit Muovi RP |
| NobelSpeedy® Shorty WP | Peittoruuvi Brånemark System® WP | Implanttiväännin WP Brånemark System Implanttiväännin Jakoavaimen sovitin WP | Proteettinen ruuvi Multi-unit | Paranemisjatke WP | Välitön tilapäisjatke WP | Procera®-esteettinen jatke WP | Jäljennössylinteri Suljettu tarjotin WP |
| NobelSpeedy® Groovy WP | | | | | Muovisylinteri Välitön tilapäisjatke WP QuickTemp™-jatke Kartiomainen WP Muovisylinteri QuickTemp™-jatke Kartiomainen WP Tilapäisjatke Kytkevä WP On1 Tilapäisjatke Ei-kytkävä WP Tilapäisjatke Muovinen Kytkevä WP Tilapäisjatke Muovinen Ei-kytkävä WP | Esteettinen jatke WP 15° Esteettinen jatke WP Snappy™-jatke WP Yleiskäyttöinen alusta WP Yleiskäyttöinen alusta Burn-out-sylinteri WP GoldAdapt™ Kytkevä WP GoldAdapt™ Ei-kytkävä WP Multi-unit-jatke WP Paikannusjatke WP | Jäljennössylinteri Avoin tarjotin WP Jäljennössylinteri Avoin tarjotin Multi-unit WP Jäljennössylinteri Suljettu tarjotin Multi-unit WP Jäljennössylinterikisko Suljettu tarjotin Multi-unit WP Jäljennössylinterikisko Suljettu tarjotin Multi-unit WP Tilapäisjatke Multi-unit Titanium WP Tilapässylinteri Multi-unit Muovi WP |

Twist Drill -kierreporat, Twist Step Drill-kierreaskelporat, Brånemark System® -upotusporat ja Screw Tap -kierreleikkurit ovat yhteensopivia käsikappaleliitännän kanssa standardin ISO 1797-1 mukaisesti. Poranterien syvyysvasteita on saatavilla.

IFU1008. NobelReplace® Select™ TC

| Tuotenimi | Peittoruuvi | Implantti-väännin | Kliiniset ruuvit | Jatkeet | | | Jäljennössylinteri | Muu |
|-----------------------|--|----------------------------|--|--------------------------|---|--|--|--|
| | | | | Paraneminen | Väliaikainen | Pysyvä | | |
| Replace Select™ TC NP | Paranemisruuvi RplSel TC NP Peittoruuvi NobRpl NP | Implanttiväännin NobRpl NP | Ruuvi Multi-Unit Kulmallinen Jatke NobRpl NP Ruuvi keraaminen jatke NobRpl NP Jatkeruuvi NobelReplace NP | Paranemisjatke NobRpl NP | Tilapäisjatke Kytkevä NobRpl NP Tilapäisjatke Ei-kytkävä NobRpl NP Tilapäisjatke Muovi Kytkevä NobRpl NP Temp Jatke Muovi Ei-kytkävä NobRpl NP Välitön Tilapäisjatke NobRpl NP | Snappy™-jatke NobRpl NP Esteettinen jatke NobRpl NP 15° Esteettinen jatke NobRpl NP Yleiskäyttöinen alusta Kolmikorvake NP GoldAdapt™ Kytkevä NobRpl NP GoldAdapt™ Ei-kytkävä NobRpl NP Multi-unit-jatke NobRpl NP 17° Multi-unit-jatke NobRpl NP Pallojatke Titanium NobRpl NP NobelProcera® Ab Ti NobelReplace® NP w-u NobelProcera® Ab Ti NobelReplace® NP Procera®-jatke Zr NobRpl NP | Jäljennössylinteri Avoin tarjotin NobRpl NP Ø 4,5 mm Jäljennössylinteri Suljettu tarjotin NobRpl NP Jäljennössyl. Sulj. tarjotin Matala profiili NRpl NP Jäljennössyl. Avoin tarjotin NobRpl NP | PIB IBO Implantinvetäjä kuusio- & kolmikorvake NP/RP 22 mm Luun reunan viimeistelijä ja ohjain NobRpl NP Ø 4,6 Implantin pelastuskaulus Kolmikorvake Ø 3,5 |
| Replace Select™ TC RP | Paranemisruuvi RplSel TC RP Peittoruuvi NobRpl RP | Implanttiväännin NobRpl RP | Ruuvi Multi-Unit Kulmallinen jatke NobRpl RP Ruuvi keraaminen jatke NobRpl RP/WP/6.0 Jatkeruuvi NobRpl RP/WP/6.0 | Paranemisjatke NobRpl RP | Tilapäisjatke Kytkevä NobRpl RP Tilapäisjatke Ei-kytkävä NobRpl RP Tilapäisjatke Muovi Kytkevä NobRpl RP Tilapäisjatke Muovi Ei-kytkävä NobRpl RP Välitön Tilapäisjatke NobRpl RP | Snappy™-jatke NobRpl RP Esteettinen jatke NobRpl RP 15° Esteettinen jatke NobRpl RP Yleiskäyttöinen alusta Kolmikorvake RP GoldAdapt™ Kytkevä NobRpl RP GoldAdapt™ Ei-kytkävä NobRpl RP Multi-unit-jatke NobRpl RP 30° Multi-unit-jatke NobRpl RP 30° Multi-u-jatke Ei-kytkävä NobRpl RP 17° Multi-unit-jatke NobRpl RP Pallojatke Titanium NobRpl NP NobelProcera® Ab Ti NobelReplace® RP w-u NobelProcera® Ab Ti NobelReplace® RP Procera® Abutm Zr NobRpl RP | Jäljennössylinteri Suljettu tarjotin NobRpl RP Jäljennössylinteri Suljettu tarjotin Matala profiili NRpl RP Jäljennössylinteri Avoin tarjotin NobRpl RP | PIB IBO Implantinvetäjä kuusio- & Kolmikorvake NP/RP 31 mm Luun reunan viimeistelijä ja ohjain NobRpl RP Ø 5,3 Implantin pelastuskaulus Kolmikorvake Ø 4,3 |

IFU1010. NobelReplace® kartiokiinnitys, NobelReplace® kartiokiinnitys PMC, NobelReplace® kartiokiinnitys TiUltra™

| Tuotenimi | Peittoruuvi | Implant-tiväännin | Kliiniset ruuvit | Jatkeet | | | Jäljennössi-linteri | Muu |
|--|-------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|---|
| | | | | Paraneminen | Väliaikainen | Pysyvä | | |
| NobelReplace®-kartiomainen kiinnitys NP | Peittoruuvi CC NP | Implant-tiväännin CC NP | Kliininen ruuvi CC NP | Paranemisjatke CC NP | Kapea tilapäisjatke CC NP | Yleiskäyttöinen alusta CC NP | Avoin tarjotin CC NP | Ohjattu implantinasetin NobRpl CC NP |
| NobelReplace®-kartiomainen kiinnitys PMC NP | | | Omnigrip™-kliininen ruuvi CC NP | Paranemisjatkeseilta NP | Snap-tilapäisjatke CC NP | Esteettinen jatke CC NP | Suljettu tarjotin CC NP | Luun reunan viimeistelyohjain CC NP |
| NobelReplace®-kartiomainen kiinnitys TiUltra™ NP | | | On1™-kliininen ruuvi NP | Kapea paranemisjatke CC NP | Tilapäisjatke Ei-kytkävä CC NP | Procera-esteettinen jatke CC NP | Silta Avoin tarjotin CC NP | Ohjauspinni CC NP |
| | | | Ruuvi MU | | | Multi-Unit-jatke Plus CC NP (0°/17°/30°) | | NobelProcera®: |
| | | | Kulmajatke CC NP | | | On1™-alusta NP | | NobelProcera®-jatke Zirconia CC NP |
| | | | | | | | | NobelProcera®-jatke Ti CC NP |
| | | | | | | | | NobelProcera® FCZ -implanttikruunu ASC CC NP |
| | | | | | | | | Implantisillaan restoraatiot (Ti, Zr) |
| | | | | | | | | Kiinteät ja kiinteät siirrettävät tangot (Ti) |
| | | | | | | | | Metallisovitin CC NP |
| NobelReplace®-kartiomainen kiinnitys CC RP | Peittoruuvi CC RP | Implant-tiväännin CC RP | Kliininen ruuvi CC RP/WP | Paranemisjatke CC RP | Kapea tilapäisjatke CC RP | Yleiskäyttöinen alusta CC NP | Avoin tarjotin CC RP | Ohjattu implantinasetin NobRpl CC RP |
| NobelReplace®-kartiomainen kiinnitys PMC RP | | | Omnigrip™-kliininen ruuvi CC RP/WP | Paranemisjatkeseilta RP | Snap-tilapäisjatke CC RP | Esteettinen jatke CC RP | Suljettu tarjotin CC RP | Luun reunan viimeistelijän ohjain CC RP |
| NobelReplace®-kartiomainen kiinnitys TiUltra™ RP | | | On1™-kliininen ruuvi RP | Kapea paranemisjatke CC RP | Tilapäisjatke Ei-kytkävä CC RP | Procera-esteettinen jatke CC RP | Silta Avoin tarjotin CC RP | Ohjauspinni CC RP |
| | | | Ruuvi MU-klmajatke CC RP | | | Multi-Unit-jatke Plus CC NP (0°/17°/30°) | | NobelProcera®: |
| | | | | | | On1™ Base RP | | NobelProcera®-jatke Zirconia CC RP |
| | | | | | | | | NobelProcera®-jatke Ti CC RP |
| | | | | | | | | NobelProcera® FCZ Implanttikruunu ASC CC RP |
| | | | | | | | | Implantisillaan restoraatiot (Ti, Zr) |
| | | | | | | | | Kiinteät ja kiinteät siirrettävät kiskot (Ti) |
| | | | | | | | | Metallisovitin CC RP |

IFU1012. Replace Select™ Tapered TiUnite®, Replace Select™ Tapered PMC

| Tuotenimi | Peittoruuvi | Implant-tiväännin | Kliiniset ruuvit | Jatkeet | | | Jäljennössi-linteri | Muu |
|----------------------------|---|-----------------------------|--|---------------------------|--|--|--|--|
| | | | | Paranemi-nen | Väliaikainen | Pysyvä | | |
| Replace Select™ Tapered WP | Peittoruuvi NobRpl RP Paranemis-ruuvi RplSel TC NP | Implant-tiväännin NobRpl NP | Jatkeruuvi NobelReplace® NP Ruuvi Multi-Unit Kulmallinen Jatke NobRpl NP Ruuvi keraaminen jatke NobRpl NP | Parane-misjatke NobRpl NP | Tilapäisjatke Kytkevä NobRpl NP Tilapäisjatke Ei-kytkävä NobRpl NP Välitön Tilapäisjatke NobRpl NP Muovi/Tilapäisjatke Esteettinen jatke Muovi/Temp -sylinteri 15° Esteettinen Ab NP | Snappy-jatke NobRpl NP Esteettinen jatke NobRpl NP 15° Esteettinen jatke NobRpl NP Yleiskäyttöinen alusta Kolmikorvake NP Yleiskäyttöinen alusta Burn-out-sylinteri NP/RP GoldAdapt™ Kytkevä NobRpl NP GoldAdapt™ Ei-kytkävä NobRpl NP Multi-unit-jatke NobRpl NP 17° Multi-unit-jatke NobRpl NP Paikallistamisjatke 3.5 RPL Val.impl. Pallojatke Titanium NobRpl NP NobelProcera® Ab Ti NobelReplace® NP Procera®-jatke Zr NobRpl NP | Jäljennössi-linteri Avoin tarjotin NobRpl NP | PIB IBO Luun reunan viimeistelijä ja ohjain NobRpl NP Luun reunan viimeistelyohjain NobelReplace® NP Impl.vetäjä Kuusio ja Kolmikorvake NP/RP Implantin pelastuskaulus Kolmikorvake Ø 3,5 |
| Replace Select™ Tapered RP | Peittoruuvi NobRpl RP Paranemis-ruuvi RplSel TC RP | Implant-tiväännin NobRpl RP | Jatkeruuvi NobRpl RP/WP/6.0 Ruuvi Multi-Unit Kulmallinen Jatke NobRpl RP Ruuvi keraaminen jatke NobRpl RP/WP/6.0 | Parane-misjatke NobRpl RP | Tilapäisjatke Kytkevä NobRpl RP Tilapäisjatke Ei-kytkävä NobRpl RP Välitön Tilapäisjatke NobRpl RP | Snappy-jatke NobRpl RP Esteettinen jatke NobRpl RP 15° Esteettinen jatke NobRpl RP Yleiskäyttöinen alusta Kolmikorvake RP Yleiskäyttöinen alusta Burn-out-sylinteri NP/RP GoldAdapt™ Kytkevä NobRpl RP GoldAdapt™ Ei-kytkävä NobRpl RP Multi-unit-jatke NobRpl RP 17° Multi-unit-jatke NobRpl RP 30° Multi-unit-jatke NobRpl RP Paikallistamisjatke 4,3 RPL Val.impl. Pallojatke Titanium NobRpl RP 3 mm NobelProcera® Ab Ti NobelReplace® RP Procera®-Jatke Zr NobRpl RP | Implantinvetäjä Instr kuusio- & Kolmikorvake NP/RP | PIB IBO Luun reunan viimeistelyohjain NobelReplace® RP Luun reunan viimeistelijä ja ohjain NobRpl RP Implantinvetäjä Instr kuusio- & Kolmikorvake NP/RP Implantin pelastuskaulus Kolmikorvake Ø 4,3 |

| Tuotenimi | Peittoruuvi | Implantti-väännin | Kliiniset ruuvit | Jatkeet | | | Jäljennössiylinteri | Muu |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|--|---------------------------|---|---|---|--|
| | | | | Parane-mi-nen | Väliaikainen | Pysyvä | | |
| Replace Select™ Tapered WP | Peittoruuvi NobRpl WP | Implant-tiväännin NobRpl WP | Ruuvi keraaminen jatke NobRpl RP/ WP/6.0 | Parane-misjatke NobRpl WP | Tilapäisjatke Kytkevä NobRpl WP Tilapäisjatke Ei-kytkävä NobRpl WP Temp Jatke Muovi Ei-kytkävä NobRpl WP Välitön Tilapäisjatke NobRpl WP Muovi/Temp Cop Esteettinen Ab NobRpl WP PI/Temp -sylinteri 15° Esteettinen Ab NobRpl WP | Snappy-jatke NobRpl WP Esteettinen jatke NobRpl WP 15° Esteettinen jatke NobRpl WP Yleiskäyttöinen alusta Burn-out-sylinteri WP Yleiskäyttöinen alusta Kolmikorvake WP GoldAdapt™ Ei-kytkävä NobRpl WP GoldAdapt™ Kytkevä NobRpl WP Multi-unit-jatke NobRpl WP Paikallistamisjatke RPL Val.impl. NobelProcera® Ab Ti NobelReplace® WP Procera®-Jatke Zr NobRpl WP | Jäljennössiylinteri Avoin tarjotin NobRpl WP | PIB IBO Luun reunan viimeistelijä NobelReplace® WP Luun reunan viimeistelijä ja ohjain NobRpl WP Ø 6,5 Implantinvetäjä CC RP & Kolmikorvake WP Implantinvetäjä CC RP & Kolmikorvake WP & TCC RP |
| Replace Select™ Tapered 6.0 | Peittoruuvi NobRpl 6.0 mm | Implant-tiväännin NobRpl 6.0 | Ruuvi keraaminen jatke NobRpl RP/ WP/6.0 | Parane-misjatke NobRpl RP | Tilapäisjatke Muovi Kytkevä NobRpl RP Tilapäis Jatke Muovi Ei-kytkävä NobRpl RP Tilapäisjatke Kytkevä NobRpl 6.0 Tilapäisjatke Ei-kytkävä NobRpl 6.0 Välitön Tilapäisjatke NobRpl RP | Snappy™-jatke NobRpl RP Esteettinen jatke NobRpl 6.0 15° Esteettinen jatke NobRpl 6.0 GoldAdapt™ Ei-kytkävä NobRpl 6.0 GoldAdapt™ Kytkevä NobRpl 6.0 NobelProcera-ab Ti NobelReplace 6.0 Procera®-jatke Zr NobRpl 6.0 | Jäljennössiylinteri Avoin tarjotin NobRpl 6.0 | PIB IBO Luun reunan viimeistelijän ohjain NobRpl 6.0 Luun reunan viimeistelijä ja ohjain NobRpl 6.0 Ø 7 Implantinvetäjä Kolmikorvake 6.0 22 mm |

IFU1016. Peittoruuvit

| Peittoruuvi | Kiinnitystyyppi | Implantin platformi | Implanttijärjestelmä | Ruuvinväännin |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|---|--|
| Peittoruuvi Brånemark System® NP | Ulkoinen kuusiokiinnitys | NP | Brånemark System® NobelSpeedy® Groovy | Peittoruuvinväännin Brånemark System Hexagon (IFU1085) |
| Peittoruuvi Brånemark System® RP | | RP | Brånemark System® NobelSpeedy® Groovy NobelZygoma™ 0° | |
| Peittoruuvi Brånemark System® WP | | WP | Brånemark System® NobelSpeedy® Groovy | |
| Peittoruuvi Kartiokiinnitys 3.0 | Kartiokiinnitys | 3.0 | NobelActive® | Unigrip™ (IFU1085) |
| Peittoruuvi Kartiokiinnitys NP | | NP | NobelActive® NobelParallel™ CC NobelReplace® CC | |
| Peittoruuvi Kartiokiinnitys RP | | RP | NobelActive® NobelParallel™ CC NobelReplace® CC Trefoil™-järjestelmät | |
| Peittoruuvi Kartiokiinnitys WP | | WP | NobelActive® NobelParallel™ CC NobelReplace® CC | |
| Peittoruuvi Nobel Biocare N1™ TCC NP | Triovaali kartiokiinnitys | NP | Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC | Omnigrip™ Mini (IFU1085) |
| Peittoruuvi Nobel Biocare N1™ TCC RP | | RP | Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC | |
| Peittoruuvi NobelReplace® NP | Sisäinen 3-korvake | NP | NobelReplace® Tapered Groovy, ReplaceSelect™ | Unigrip™ (IFU1085) |
| Peittoruuvi NobelReplace® RP | | RP | | |
| Peittoruuvi NobelReplace® WP | | WP | | |
| Peittoruuvi NobelReplace® 6.0 mm | | 6.0 | | |

IFU1018. Esteettinen jatke kartioliitännällä/Brånemark System®/ NobelReplace®, Esteettinen jatke Nobel Biocare N1™ TCC

| Esteettinen jatke | Kiinnitystyyppi | Kliininen ruuvi | Värikoodi | Ruuvinväännin | Muovinen/väliaikainen sylinteri |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------|--|
| Esteettinen jatke Kartiokiinnitys 3.0 | Kartiokiinnitys | Kliininen ruuvi Kartiokiinnitys 3.0 | Ei mitään | Unigrip™ | - |
| Esteettinen jatke Kartiokiinnitys NP | Kartiokiinnitys | Kliininen ruuvi Kartiokiinnitys NP | ● | Unigrip™ | - |
| Esteettinen jatke Kartiokiinnitys RP | Kartiokiinnitys | Kliininen ruuvi Kartiokiinnitys RP/WP | ● | Unigrip™ | - |
| Esteettinen jatke Kartiokiinnitys WP | Kartiokiinnitys | Kliininen ruuvi Kartiokiinnitys RP/WP | ● | Unigrip™ | - |
| Esteettinen jatke Bmk System NP | Ulkoinen kuusioliitännä | Jatkeruuvi Brånemark System® NP | Ei mitään | Unigrip™ | Muovi/Tilapäissyylinteri Esteettinen jatke |
| Esteettinen jatke Bmk System RP | Ulkoinen kuusioliitännä | Jatkeruuvi Brånemark System® RP | Ei mitään | Unigrip™ | Muovi/Tilapäissyylinteri Esteettinen jatke |
| Esteettinen jatke Bmk System WP | Ulkoinen kuusioliitännä | Jatkeruuvi Brånemark System® WP | Ei mitään | Unigrip™ | Muovi/Tilapäisjatke Esteettinen jatke |
| Esteettinen jatke NobelReplace® NP | Kolmikorvakeinen | Jatkeruuvi NobelReplace® NP | ● | Unigrip™ | Muovi/Tilapäissyylinteri Esteettinen jatke |
| Esteettinen jatke NobelReplace® RP | Kolmikorvakeinen | Jatkeruuvi NobelReplace® RP/WP/6.0 | ● | Unigrip™ | Muovi/Tilapäissyylinteri Esteettinen jatke |
| Esteettinen jatke NobelReplace® WP | Kolmikorvakeinen | Jatkeruuvi NobelReplace® RP/WP/6.0 | ● | Unigrip™ | Muovi/Tilapäissyylinteri Esteettinen jatke |

| Esteettinen jatke | Kiinnitystyyppi | Kliininen ruuvi | Värikoodi | Ruuvinväänin | Muovinen/väliaikainen sylinteri |
|--|---------------------------|---|-----------|----------------|---|
| Esteettinen jatke NobelReplace® 6.0 | Kolmikorvakkeinen | Jatkeruuvi NobelReplace® RP/WP/6.0 | ● | Unigrip™ | Muovi/Tilapäässylinteri Esteettinen jatke |
| Esteettinen jatke Nobel Biocare N1™ TCC NP | Triovaali kartiokiinnitys | Kliininen ruuvi Nobel Biocare N1 TCC NP | ● (ruuvi) | Omnigrip™ Mini | - |
| Esteettinen jatke Nobel Biocare N1™ TCC RP | Triovaali kartiokiinnitys | Kliininen ruuvi Nobel Biocare N1 TCC RP | ● (ruuvi) | Omnigrip™ Mini | - |

IFU1023. Yleiskäyttöiset alustat ja jatkeet

| Yleiskäyttöinen alusta/jatke - kiinnitystyyppi | Sopivat platformit | Sopivat marginaalikorkeudet | Kiristysmomentti | Ruuvinväänin |
|--|--------------------|-----------------------------|------------------|----------------|
| Kartiokiinnitys (CC) | NP RP WP | 1,5 mm 3,0 mm | 35 Ncm | Unigrip™ |
| Triovaali kartiokiinnitys (TCC) | NP RP | 1,5 mm 3,0 mm | 20 Ncm | Omnigrip™ mini |
| Kolmikorvake | NP RP WP | 1,5 mm 3,0 mm | 35 Ncm | Unigrip™ |
| Ulkoinen kuusiokiinnitys | NP RP WP | 1,5 mm 3,0 mm | 35 Ncm | Unigrip™ |

IFU1040. Jatkeen vapautustapit CC

| Jatke | Jatkeen vapautustappi CC 3.0 | Jatkeen vapautustappi CC NP | Jatkeen vapautustappi CC RP/WP |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Tilapääsjatke Kytkevä Kartiokiinnitys | ✓ | - | - |
| Esteettinen jatke Kartiokiinnitys | ✓ | - | - |
| GoldAdapt™ Kytkevä Kartiokiinnitys | ✓ | - | - |
| NobelProcera®-jatke Zirconia Kartiokiinnitys | - | ✓ | ✓ |

IFU1043. Jatkeruuvien irrotustyökalut

| Instrumentti | Kiinnitystyyppi | Platformi | Laiteinstrumenttien kahva/Proteettinen momenttiavaimen sovitin | Käsikappale (standardin DIN EN ISO 1797 mukainen) |
|--------------------------------|--|-----------|--|---|
| Jatkeruuvien irrotin 3.0 | Kartiokiinnitys, ulkoinen kuusiokiinnitys ja sisäinen kolmikorvake | 3.0 | - | X |
| Jatkeruuvien irrotin NP | | NP | - | X |
| Jatkeruuvien irrotin RP/WP/6.0 | Triovaali kartiokiinnitys (vain platformit NP ja RP) | RP | - | X |
| | | WP | - | X |
| | | 6.0 | - | X |

| Instrumentti | Kiinnitystyyppi | Platformi | Laiteinstrumenttien kahva/Proteettinen momenttiavaimen sovitin | Käsikappale (standardin DIN EN ISO 1797 mukainen) |
|---|--|-----------|--|---|
| Jatkeruuvi Retrieval Reverse Drill -pora 3.0/NP | Kartiokiinnitys, ulkoinen kuusiokiinnitys ja sisäinen kolmikorvake | 3.0 | - | X |
| | | NP | - | X |
| | | RP | - | X |
| | | WP | - | X |
| Jatkeruuvi Retrieval Reverse Drill -pora RP/WP/6.0 | | 6.0 | - | X |
| | | 3.0 | - | X |
| | | NP | - | X |
| | | RP | - | X |
| Jatkeruuvi Retrieval Reverse Drill -pora CC 3.0/NP ja TCC NP/RP | Kartiokiinnitys, ulkoinen kuusiokiinnitys ja sisäinen kolmikorvake | 3.0 | - | X |
| | | NP | - | X |
| | | RP | - | X |
| | | WP | - | X |
| | Triovaali kartiokiinnitys | 6.0 | - | X |
| | | NP | - | X |
| | | RP | - | X |
| | | 3.0 | - | - |
| Rescue Drill Guide -ohjaimet: Peittaruuvi Kartiokiinnitys 3.0 | Kartiokiinnitys | 3.0 | - | - |
| | | NP | - | - |
| | | RP | - | - |
| | | WP | - | - |
| Rescue Drill Guide -ohjaimet: Kartiokiinnitys NP Rescue Drill Guide -ohjaimet: Kartiokiinnitys RP | | NP | - | - |
| | | RP | - | - |
| | | WP | - | - |
| | | 3.0 | - | - |
| Rescue Drill Guide -ohjain Kartiokiinnitys WP | Ulkoinen kuusioliitäntä | NP | - | - |
| | | RP | - | - |
| | | WP | - | - |
| | | 3.0 | - | - |
| Rescue Drill Guide -ohjain Ulkoinen kuusioliitäntä NP | | NP | - | - |
| | | RP | - | - |
| | | WP | - | - |
| | | 3.0 | - | - |
| Rescue Drill Guide -ohjain Ulkoinen kuusio WP | Sisäinen 3-korvake | NP | - | - |
| | | RP | - | - |
| | | WP | - | - |
| | | 6.0 | - | - |
| Rescue Drill Guide -ohjain Kolmikorvakkeinen NP | | NP | - | - |
| | | RP | - | - |
| | | WP | - | - |
| | | 6.0 | - | - |
| Rescue Drill Guide -ohjain Kolmikorvakkeinen RP | | NP | - | - |
| | | RP | - | - |
| | | WP | - | - |
| | | 6.0 | - | - |
| Rescue Drill Guide -ohjain Kolmikorvakkeinen WP | | NP | - | - |
| | | RP | - | - |
| | | WP | - | - |
| | | 6.0 | - | - |
| Rescue Drill Guide -ohjain Kolmikorvake 6.0 | Triovaali kartiokiinnitys | NP | - | - |
| | | RP | - | - |
| | | 3.0 | X | X |
| | | NP | X | X |
| Jatkeruuvien irrotustyökalu 3.0/NP | Kartiokiinnitys, ulkoinen kuusiokiinnitys ja sisäinen kolmikorvake | RP | X | X |
| | | WP | X | X |
| | | 6.0 | X | X |
| | | 3.0 | X | X |
| Jatkeruuvien irrotustyökalu RP/WP/6.0 | | NP | X | X |
| | | WP | X | X |
| | | 6.0 | X | X |
| | | 3.0 | X | X |

| Instrumentti | Kiinnitystyyppi | Platformi | Laiteinstrummenttien kahva/ Proteettinen momenttiavaimen sovitin | Käsikappale (standardin DIN EN ISO 1797 mukainen) |
|---|--|-----------|---|---|
| Jatkeruuvien irrotustyökalu CC 3.0/NP ja TCC NP/RP | Kartiokiinnitys, ulkoinen kuusiokiinnitys ja sisäinen kolmikorvake | 3.0 | X | X |
| | | NP | X | X |
| | | RP | X | X |
| | | WP | X | X |
| | 6.0 | X | X | |
| | Triovaali kartiokiinnitys | NP | X | X |
| RP | | X | X | |
| Kierrelleikkurin korjain M1.4 | Kartiokiinnitys | 3.0 | - | X |
| Kierrelleikkurin korjain M1.6 | Kartiokiinnitys Ulkoinen kuusioliitöntä | NP | - | X |
| Screw Tap -kierrelleikkurin korjain M1.8 | Sisäinen 3-korvake | NP | - | X |
| Kierrelleikkurin korjain M2.0 | Kartiokiinnitys | RP | - | X |
| | | WP | - | X |
| | Sisäinen 3-korvake | RP | - | X |
| | | WP | - | X |
| | | 6.0 | - | X |
| | Ulkoinen kuusiokiinnitys | RP | - | X |
| Kierrelleikkurin korjain M2.5 | Ulkoinen kuusioliitöntä | WP | - | X |
| Screw Tap Repair Tool Nobel Biocare N1™ TCC NP | Triovaali kartiokiinnitys | NP | - | X |
| | | RP | - | X |
| Nobel Biocare N1™ -alustaruuvien irrotustyökalu NP/RP | | NP/RP | X | - |

IFU1048. Kooniset porat, Dense Bone Drill -porat, Screw Tap -kierrelleikkurit

Kooniset porat, Dense Bone Drill -porat ja Screw Tap -kierrelleikkurit, sekä kertakäyttöiset että uudelleen käytettävät, sopivat käytettäväksi seuraavan kanssa:

käsikappale, standardin ISO 1797 tyyppin 1 mukaisesti.

Porajatkkeet

Porasarjan 7–15 yhteensopivuus esitetään seuraavassa taulukossa.

| Porasarja 7–15 mm | Sarjaan kuuluvat osat | Yhteensopivuus |
|-------------------|--|---|
| | Guide Drill -ohjainpora | Handpiece-käsikappale, ISO 1797 tyyppi 1 |
| | Twist Drill -kääntöpora kärjellä 2 x 7–15 mm | Drill Stop -poranterän syvyysvaste 2 mm Handpiece-käsikappale, ISO 1797 tyyppi 1 |
| | Twist Step Drill -kääntöosakelpora 2,4/2,8 7–15 mm | Drill Stop -poranterän syvyysvaste 2,8 mm Handpiece-käsikappale, ISO 1797 tyyppi 1 |

IFU1050. NobelZygoma™ 45°

- Tämän implantin kanssa on käytettävä proteettista Brånemark System® Zygoma TiUnite® -valikoimaa lyhyemmän jatkeruuvien vuoksi.
- Lisätietoja Multi-unit-jatkeista ja yhteensopivista proteettisista komponenteista on Nobel Biocaren käyttöohjeessa IFU1075.

IFU1051. NobelZygoma™ 0° -implantit

- Tämän implantin kanssa on käytettävä proteettista Brånemark System® -jatkevalikoimaa. Lisäksi saatavana on erityisiä 45°/60° Multi-unit-jatkeita.
- Zygoma Handle -kahva kiinnittyy Implanttiväänin Jakoavaimen sovitin RP -liittimiin ja sen avulla Zygoma-implantti otetaan pakkauksesta ja asetetaan porauskuoppaan.
- Lisätietoja Multi-unit-jatkeista ja yhteensopivista proteettisista komponenteista on Nobel Biocaren käyttöohjeessa IFU1075.

IFU1057. Kliiniset ruuvit, jatkeruuvit, proteettiset ruuvit

| Kliininen / jatke- / proteettinen ruuvi | Jatke/runko | Ruuvinväänin |
|---|--|----------------|
| Kliininen ruuvi CC | Yleiskäyttöinen alusta CC Esteettinen jatke CC Tilapäisjatke CC NobelProcera® Jatke Ti CC NobelProcera® Jatke Zr CC NobelProcera® Implanttisilta Ti CC NobelProcera® Implanttisilta Zr CC NobelProcera® Implanttikiskon peittoproteesi CC Snappy™-jatke CC GoldAdapt™ CC Procera Esteettinen jatke CC Kapeaprofiilinen jatke CC | Unigrip™ |
| Omnigrip™ Kliininen ruuvi CC | NobelProcera® Kulmattu ruuvikanava -jatke Zr CC Zr CC NobelProcera® HT ML FCZ -implanttiruunu CC NobelProcera® HT ML FCZ Implanttisilta CC NobelProcera® Zirconia Implanttisilta CC | Omnigrip™ |
| Kliininen ruuvi Nobel Biocare N1™ TCC | Yleiskäyttöinen jatke TCC 17°/30° Multi-unit-jatke Xeal™ TCC Tilapäisjatke TCC Paranemisjatke TCC Esteettinen jatke Nobel Biocare N1™ TCC Titanium-jatkeahio Nobel Biocare N1™ TCC | Omnigrip™ Mini |
| Jatkeruuvi NobelReplace® | Yleiskäyttöinen alusta Kolmikorvake Esteettinen jatke NobelReplace® Tilapäisjatke NobelReplace® NobelProcera® -jatke Ti NobelReplace® NobelProcera® Implanttisilta Ti NobelReplace® NobelProcera® Implanttikiskon peittoproteesi NobelReplace® Snappy™-jatke NobelReplace® GoldAdapt™ NobelReplace® Kultajatkkekisko NobelReplace® Kapeaprofiilinen jatke NobelReplace® | Unigrip™ |

| Kliininen / jatke- / proteettinen ruuvi | Jatke/runko | Ruuvinväännin |
|--|--|---------------|
| Ruuvi keraaminen jatke NobelReplace® | NobelProcera®-jatke Zr NobelReplace® NobelProcera® HT ML FCZ -implanttisilta NobelReplace® NobelProcera® Zirconia-implanttisilta NobelReplace® Procera®-esteettinen jatke NobelReplace® | Unigrip™ |
| Jatkeruuvi Brånemark System® | Yleiskäyttöinen alusta Ulkoinen kuusio Esteettinen jatke Brånemark System® Tilapäisjatke Brånemark System® NobelProcera® Jatke Ti Brånemark System® NobelProcera® Implanttisilta Ti Brånemark System® NobelProcera® Implanttikisko Peittooproteesi Brånemark System® Snappy™-jatke Brånemark System® GoldAdapt™ Brånemark System® Kultajatke Brånemark System® CeraOne-jatke Brånemark System® | Unigrip™ |
| Ruuvi keraaminen jatke Brånemark System® | NobelProcera®-jatke Zr Brånemark System® NobelProcera® HT ML FCZ Implanttisilta Brånemark System® NobelProcera® Zirconia Implanttisilta Brånemark System® Procera® Esthetic Abutment Brånemark System® | Unigrip™ |
| Ruuvi Multi-unit Kulmallinen jatke CC | 17°/30° Multi-unit-jatke CC | Unigrip™ |
| Kliininen ruuvi Multi-unit-jatke Nobel Biocare N1™ TCC | Suora Multi-unit-jatke Xeal™ TCC | Multi-unit |
| Multi-unit-ruuvi Kulmallinen jatke NobelReplace® | 17°/30° Multi-unit-jatke NobelReplace® | Unigrip™ |

| Kliininen / jatke- / proteettinen ruuvi | Jatke/runko | Ruuvinväännin |
|--|---|----------------|
| Multi-unit-ruuvi Kulmallinen Jatke Brånemark System® | 17°/30° Multi-unit-jatke Brånemark System® | Unigrip™ |
| Proteettinen ruuvi Multi-unit-jatke | Tilapäissyylinteri Multi-unit-jatke NobelProcera® Implanttisilta Ti Multi-unit NobelProcera® Implanttisilta Zr Multi-unit NobelProcera® Implanttikiskoiteproteesi Multi-unit NobelProcera® HT ML FCZ Implanttisilta Multi-unit Kultasyylinteri Multi-unit | Unigrip™ |
| Proteettinen ruuvi Multi-unit-jatke Omnigrip™ Mini | NobelProcera® Zirconium-implanttisilta Multi-unit | Omnigrip™ Mini |
| NobelZygoma O° Kulmallinen Multi-unit-jatkeruuvi | 45°/60° Multi-unit-jatke Ulkoinen kuusio | Unigrip™ |
| Brånemark System® Zygoma Jatkeruuvi | NobelProcera® Implanttisilta Zygoma | Unigrip™ |
| Brånemark System® Zygoma Kulmallinen Multi-unit Jatkeruuvi | 17° Multi-unit-jatke Brånemark System® Zygoma | Unigrip™ |
| Omnigrip™-kliininen ruuvi Titanium (CC ja kolmikorvake) | Nobel Procera® Titanium-jatke ASC (CC ja kolmikorvake) | Omnigrip™ |

IFU1067. PureSet™-tarjotin

PureSet™ Tray -tarjottimesta on saatavilla useita, erilaisiin Nobel Biocaren kirurgisiin ja proteettisiin toimenpiteisiin sopivia versioita. Erilaisten tarjottimien kanssa yhteensopivat työkalut ja komponentit on määriteltävä vastaavissa seinätauluissa. Paikalliselta Nobel Biocare -myyntipisteeltä saa lisätietoja seinätauluista.

IFU1074. On1™-konsepti

| Tuotenimi | Implantti | Jatke | Ruuvi | Väännin |
|---|--|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| On1™ Base CC NP 1,75 mm | Implantit, joissa on sisäinen kartiokiinnitys: | On1™-tilapäisjatke Kytkevä | On1™-kliininen ruuvi 1,75 mm NP | On1™-ruuvinväännin |
| On1™-alusta CC NP 2,5 mm | - NobelActive® | On1™-tilapäisjatke Ei-kytkävä | On1™-kliininen ruuvi 2,5 mm NP | |
| On1™-alusta CC RP 1,75 mm | - NobelActive® TiUltra™ | On1™-yleiskäyttöinen jatke | On1™-kliininen ruuvi 1,75 mm RP | |
| On1™-alusta CC RP 2,5 mm | - NobelReplace® CC | On1™-yleiskäyttöinen jatke Ei-kytkävä | On1™-kliininen ruuvi 2,5 mm RP | |
| On1™-alusta CC WP 1,75 mm | - NobelReplace® CC TiUltra™ | On1™-esteettinen jatke | On1™-kliininen ruuvi 1,75 mm WP | |
| On1™-alusta CC WP 2,5 mm | - NobelParallel™ CC | | On1™-kliininen ruuvi 1,75 mm WP | |
| On1™-alusta CC WP 2,5 mm | - NobelParallel™ CC TiUltra™ | | On1™-kliininen ruuvi 2,5 mm WP | |
| On1™-yleiskäyttöinen jatke 0,3 mm NP | - | On1™ Base -alusta | On1™-proteettinen ruuvi | |
| On1™-yleiskäyttöinen jatke 1,25 mm NP | | On1™ Base Xeal -alusta | On1™-proteettinen laboratorioruuvi | |
| On1™-yleiskäyttöinen jatke 0,3 mm RP | | | | |
| On1™-yleiskäyttöinen jatke 1,25 mm RP | | | | |
| On1™-yleiskäyttöinen jatke 0,3 mm WP | | | | |
| On1™-yleiskäyttöinen jatke 1,25 mm WP | | | | |
| On1™-esteettinen jatke Titanium 0,3 mm NP | - | On1™ Base -alusta | On1™-proteettinen ruuvi | Unigrip™-ruuvinväännin |
| On1™-esteettinen jatke Titanium 0,3 mm RP | | On1™ Base Xeal -alusta | On1™-proteettinen laboratorioruuvi | |
| On1™-esteettinen jatke Titanium 0,3 mm WP | | | | |
| On1™ Base Xeal™ CC NP 1,75 mm | Implantit, joissa on sisäinen kartiokiinnitys: | On1™-tilapäisjatke Kytkevä | On1™-kliininen ruuvi 1,75 mm NP | On1™-ruuvinväännin |
| On1™ Base Xeal™ CC NP 2,5 mm | - NobelActive® | On1™-tilapäisjatke Ei-kytkävä | On1™-kliininen ruuvi 2,5 mm NP | |
| On1™ Base Xeal™ CC RP 1,75 mm | - NobelActive® TiUltra™ | On1™-yleiskäyttöinen jatke | On1™-kliininen ruuvi 1,75 mm RP | |
| On1™ Base Xeal™ CC RP 2,5 mm | - NobelReplace® CC | On1™-yleiskäyttöinen jatke Ei-kytkävä | On1™-kliininen ruuvi 2,5 mm RP | |
| On1™ Base Xeal™ CC WP 1,75 mm | - NobelReplace® CC TiUltra™ | On1™-esteettinen jatke | On1™-kliininen ruuvi 1,75 mm WP | |
| On1™ Base Xeal™ CC WP 2,5 mm | - NobelParallel™ CC | | On1™-kliininen ruuvi 1,75 mm WP | |
| On1™ Base Xeal™ CC WP 2,5 mm | - NobelParallel™ CC TiUltra™ | | On1™-kliininen ruuvi 2,5 mm WP | |
| On1™ Base Xeal™ CC WP 2,5 mm | | | | |

| Tuotenimi | Implantti | Jatke | Ruuvi | Väännin |
|--|--|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| On1™-yleiskäyttöinen jatke NP 0,3 mm | - | On1™ Base -alusta | On1™-proteettinen ruuvi | Unigrip™-ruuvinväännin |
| On1™-yleiskäyttöinen jatke Ei-kytkävä NP 1,25 mm | | On1™ Base Xeal -alusta | On1™-proteettinen laboratorioruuvi | |
| On1™-yleiskäyttöinen jatke Ei-kytkävä RP 0,3 mm | | | | |
| On1™-yleiskäyttöinen jatke Ei-kytkävä RP 1,25 mm | | | | |
| On1 Yleiskäyttöinen jatke Ei-kytkävä WP 0,3 mm | | | | |
| On1 Yleiskäyttöinen jatke Ei-kytkävä WP 1,25 mm | | | | |
| On1 -paranemissuoja NP 1,5 mm | - | On1™ Base -alusta | On1™-proteettinen ruuvi | Unigrip™-ruuvinväännin |
| On1™-paranemissuoja NP 2,5 mm | | On1™ Base Xeal -alusta | | |
| On1™-paranemissuoja RP 1,5 mm | | | | |
| On1™-paranemissuoja RP 2,5 mm | | | | |
| On1™-paranemissuoja WP 1,5 mm | | | | |
| On1™-paranemissuoja WP 2,5 mm | | | | |
| On1™ IOS -paranemissuoja 6 mm NP | - | On1™ Base -alusta | On1™-proteettinen ruuvi | Unigrip™-ruuvinväännin |
| On1™ IOS -paranemissuoja 4,5 mm NP | | On1™ Base Xeal -alusta | | |
| On1™ IOS -paranemissuoja 6 mm RP | | | | |
| On1™ IOS -paranemissuoja 4,5 mm RP | | | | |
| On1™ IOS -paranemissuoja 5 mm WP | | | | |
| On1™ IOS -paranemissuoja 4 mm WP | | | | |
| On1™ Tilapäisjatke Kytkevä NP | - | On1™ Base -alusta | On1™-proteettinen ruuvi | Unigrip™-ruuvinväännin |
| On1™-tilapäisjatke Ei-kytkävä NP | | On1™ Base Xeal -alusta | On1™-proteettinen laboratorioruuvi | |
| On1™-tilapäisjatke Kytkevä RP | | | | |
| On1™-tilapäisjatke Ei-kytkävä RP | | | | |
| On1™-tilapäisjatke Kytkevä WP | | | | |
| On1™-tilapäisjatke Ei-kytkävä WP | | | | |
| On1™-jäljennössylinteri Suljettu tarjotin NP | - | On1™ Base -alusta | - | Unigrip™-ruuvinväännin |
| On1™-jäljennössylinteri Suljettu tarjotin RP | | On1™ Base Xeal -alusta | | |
| On1™-jäljennössylinteri Suljettu tarjotin WP | | | | |
| On1™-jäljennössylinteri Avoin tarjotin NP | | | | |
| On1™-jäljennössylinteri Avoin tarjotin RP | | | | |
| On1™-jäljennössylinteri Avoin tarjotin WP | | | | |
| On1™-jäljennössylinteri Avoin tarjotin Ei-kytk. NP | - | On1™ Base -alusta | - | Unigrip™-ruuvinväännin |
| On1™-jäljennössylinteri Avoin tarjotin Ei-kytk. RP | | On1™ Base Xeal -alusta | | |
| On1™-jäljennössylinteri Avoin tarjotin Ei-kytk. WP | | | | |
| On1™-kliininen ruuvi 1,75 mm NP | Implantit, joissa on sisäinen kartiokiinnitys: | On1™-tilapäisjatke Kytkevä | On1™-proteettinen ruuvi | On1™-ruuvinväännin |
| On1™-kliininen ruuvi 2,5 mm NP | - NobelActive® | On1™-tilapäisjatke Ei-kytkävä | On1™-proteettinen laboratorioruuvi | |
| On1™-kliininen ruuvi 1,75 mm RP | - NobelActive® TiUltra™ | On1™-yleiskäyttöinen jatke | On1™-jäljennösruuvi | |
| On1™-kliininen ruuvi 2,5 mm RP | - NobelReplace® CC | On1™-yleiskäyttöinen jatke Ei-kytkävä | | |
| On1™-kliininen ruuvi 1,75 mm WP | - NobelParallel™ CC | On1™-esteettinen jatke | | |
| On1™-kliininen ruuvi 2,5 mm WP | - NobelParallel™ CC TiUltra™ | | | |
| On1™-proteettinen ruuvi | - | | On1™-kliininen ruuvi | Unigrip™-ruuvinväännin |
| On1™ koneellinen ruuvinväännin 21 mm | - | On1™ Base -alusta | On1™-kliininen ruuvi | - |
| | | On1™ Base Xeal -alusta | | |
| On1™ käsikäyttöinen ruuvinväännin 25 mm | - | On1™ Base -alusta | On1™-kliininen ruuvi | - |
| | | On1™ Base Xeal -alusta | | |

IFU1075. Multi-unit--jatkeet ja paranemissuojat

| Multi-unit-jatkeet / platformit | Implanttijärjestelmä | Paranemissuoja | Ruuvinväännin |
|--|---|--|--|
| Sisäinen kartiokiinnitys (CC) | | | |
| Multi-unit-jatke Plus CC NP/RP/WP | NobelActive® NobelParallel™ CC | Paranemissuoja Multi-unit Titanium | Paranemissuoja: Unigrip™ |
| Multi-unit-jatke Xeal™ CC NP/RP/WP | NobelReplace™ CC | | Suorat Multi-unit-jatkeet: MUA-väännin Kulmalliset Multi-unit-jatkeet: Unigrip™ |
| 17° Multi-unit-jatke Plus CC NP/RP/WP | | | |
| 17° Multi-unit-jatke Xeal™ CC NP/RP/WP | | | |
| 30° Multi-unit-jatke Plus CC NP/RP | | | |
| 30° Multi-unit-jatke Xeal™ CC NP/RP | | | |
| Triovaali kartiokiinnitys (TCC) | | | |
| Multi-unit-jatke Xeal™ Nobel Biocare N1™ TCC NP/RP | Nobel Biocare N1™ | Paranemissuoja Multi-unit Titanium | Paranemissuoja: Unigrip™ |
| 17° Multi-unit-jatke Xeal™ Nobel Biocare N1™ TCC NP/RP | | | Suorat Multi-unit-jatkeet: MUA-väännin Kulmalliset Multi-unit-jatkeet: Omnigrip™ Mini |
| 30° Multi-unit-jatke Xeal™ Nobel Biocare N1™ TCC RP | | | |
| Sisäinen kolmikorvakkeinen kiinnitys | | | |
| Multi-unit-jatke NobRpl NP/RP/WP | Replace Select™ NobelSpeedy® Replace™ | Paranemissuoja Multi-unit Titanium | Paranemissuoja: Unigrip™ |
| 17° Multi-unit-jatke NobelReplace® NP/RP | NobelSpeedy® Replace | | Kulmalliset Multi-unit-jatkeet: Unigrip™ |
| 30° Multi-unit-jatke NobelReplace® RP | | | |
| Ulkoinen kuusiokiinnitys | | | |
| Multi-unit-jatkes Brånemark System® NP/RP | Brånemark System® NobelSpeedy® Groovy | Paranemissuoja Multi-unit Titanium | Paranemissuoja: Unigrip™ |
| 17° Multi-unit-jatkes Brånemark System® NP/RP | | | Suorat Multi-unit-jatkeet: MUA-väännin Kulmalliset Multi-unit-jatkeet: Unigrip™ |
| 30° Multi-unit-jatkeet Brånemark System® RP | | | |
| Multi-unit-jatkeet Brånemark System® WP | Brånemark System® NobelSpeedy® Groovy | Paranemissuoja Multi-unit Brånemark System® WP | Paranemissuoja: Unigrip™ Suorat Multi-unit-jatkeet: MUA-väännin |
| Multi-unit-jatkes Brånemark System® Zygoma | Brånemark System® Zygoma | Paranemissuoja Multi-unit Titanium | Paranemissuoja: Unigrip™ Suorat Multi-unit-jatkeet: MUA-väännin Kulmalliset Multi-unit-jatkeet: Unigrip™ |
| 17° Multi-unit-jatkeet Brånemark System® Zygoma | | | |
| 45° Multi-unit-jatkeet External Hex RP | NobelZygoma™ 0° | | Paranemissuoja: Unigrip™ Kulmalliset Multi-unit-jatkeet: Unigrip™ |
| 60° Multi-unit-jatkeet External Hex RP | | | |

IFU1085. Ruuvinvääntimet

| Ruuvinväännin | Ruuvin liitospinta | Käsikappaleen kiinnitys | Instrumentit |
|----------------------------------|--------------------|---|---|
| Omnigrip™ Screwdriver Manual | Omnigrip™ | - | - |
| Omnigrip Screwdriver Machine | Omnigrip™ | Instrumentit, joissa on ISO 1797 -kiinnitys | - kahva laiteinstrumenteille - momenttivääntimen sovitimet |
| Omnigrip Mini Screwdriver Manual | Omnigrip™ Mini | - | - jäljennössylinteri TCC |

| Ruuvinväännin | Ruuvin liitospinta | Käsikappaleen kiinnitys | Instrumentit |
|-------------------------------------|--------------------------|---|--|
| Omnigrip Mini Screwdriver Machine | Omnigrip™ Mini | Instrumentit, joissa on ISO 1797 -kiinnitys | - kahva laiteinstrumenteille - momenttivääntimen sovitimet - jäljennössylinteri TCC |
| Unigrip™ Screwdriver Manual | Unigrip™ | - | - jatkeen irrotustyökalu Titanium CC - poranterän syvyysvasteet - jäljennössylinterit (CC, kolmikorvake, ulkoinen kuusio, Multi-unit, Brånemark System®, Zygoma) - paranemisjatkeet (CC, NobelReplace®, Brånemark System®, Zygoma) - paranemissuoja Multi-unit - kapeat paranemisjatkeet CC - kapea tilapäisjatke CC - Luun reunan Bone Mill Guide Conical Connection -viimeistelijä - Luun reunan Bone Mill Guide External Hex -viimeistelijä - Luun reunan Bone Mill Guide NobelReplace® -viimeistelijä |
| Unigrip™ Screwdriver Machine | Unigrip™ | Instrumentit, joissa on ISO 1797 -kiinnitys | - kahva laiteinstrumenteille - momenttivääntimen sovitimet - jatkeen irrotustyökalu Titanium CC - poranterän syvyysrajoittimet - ohjatut Implanttivääntimet - jäljennössylinterit (CC, kolmikorvake, ulkoinen kuusio, Multi-unit, Brånemark System®, Zygoma) - paranemisjatkeet (CC, NobelReplace®, Brånemark System®, Zygoma) - paranemissuoja Multi-unit - kapea paranemisjatke CC - kapea tilapäisjatke CC |
| Screwdriver Manual Multi-unit | Sisäinen kuusiokiinnitys | - | - jatkeen irrotin Nobel Biocare N1™ TCC |
| Screwdriver Machine Multi-unit | Sisäinen kuusiokiinnitys | Instrumentit, joissa on ISO 1797 -kiinnitys | - kahva laiteinstrumenteille - momenttivääntimen sovitimet - jatkeen irrotin Nobel Biocare N1™ TCC |
| Screwdriver Manual M-u Bmk Syst WP | Sisäinen kuusiokiinnitys | - | - |
| Screwdriver Machine M-u Bmk Syst WP | Sisäinen kuusiokiinnitys | Instrumentit, joissa on ISO 1797 -kiinnitys | - kahva laiteinstrumenteille - momenttivääntimen sovitimet |
| Cover Screw Driver Bmk Syst Hexagon | Ulkoisen kuusiokiinnitys | - | - |

IFU1086. Jäljennössylinterit

| Jäljennössylinteri | Tekniikka | Saatavilla olevat platformit | Värikoodi | Ruuvinväännin |
|----------------------|-------------------|------------------------------|-----------|---------------|
| Kartiokiinnitys (CC) | Avoin tarjotin | 3.0 | ei mitään | Unigrip™ |
| | | NP | ● | |
| | | RP | ● | |
| | | WP | ● | |
| | Suljettu tarjotin | 3.0 | ei mitään | |
| | | NP | ● | |
| | | RP | ● | |
| | | WP | ● | |

| Jäljennössylinteri | Tekniikka | Saatavilla olevat platformat | Värikoodi | Ruuvinväänin |
|---------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|----------------|
| Triovaali kartiokiinnitys (TCC) | Avoin tarjotin | NP | ● | Omnigrip™ Mini |
| | | RP | ● | |
| | Suljettu tarjotin | NP | ● | |
| | | RP | ● | |
| Kolmikorvake | Avoin tarjotin | NP | ● | Unigrip™ |
| | | RP | ● | |
| | | WP | ● | |
| | | 6.0 | ● | |
| Ulkoinen kuusiokiinnitys | Avoin tarjotin | NP | ei mitään | Unigrip™ |
| | | RP | | |
| | | WP | | |
| Multi-unit-jatke | Avoin tarjotin | NP/RP/WP | ei mitään | Unigrip™ |
| | Suljettu tarjotin | NP/RP/WP | | |
| Brånemark System® Zygoma | Avoin tarjotin | RP | ei mitään | Unigrip™ |

IFU1087. Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC -järjestelmä

Implanttien yhteensopivuustaulukko

| Implantti | Implanttiväänin | Peittoruuvi |
|---|---|--|
| Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC NP 3.5x9 mm | Implanttiväänin Driver Nobel Biocare N1™ TCC NP | Peittoruuvi Nobel Biocare N1™ TCC NP (IFU1016) |
| Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC NP 3.5x11 mm | | |
| Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC NP 3.5x13 mm | | |
| Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC NP 3.5x15 mm | | |
| Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC RP 4.0x7 mm | Implanttiväänin Nobel Biocare N1™ TCC RP | Peittoruuvi Nobel Biocare N1™ TCC RP (IFU1016) |
| Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC RP 4.0x9 mm | | |
| Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC RP 4.0x11 mm | | |
| Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC RP 4.0x13 mm | | |
| Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC RP 4.0x15 mm | | |
| Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC RP 4.8x7 mm | | |
| Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC RP 4.8x9 mm | | |
| Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC RP 4.8x11 mm | | |

Yhteensopivat jatkejärjestelmät ja jäljennössylinterit

| Implanttijärjestelmä | Jatkejärjestelmä ja jäljennössylinterit |
|-----------------------------------|--|
| Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC NP | Paranemisjatke Nobel Biocare N1™ TCC NP (IFU1094) Tilapäisjatke Nobel Biocare N1™ TCC NP (IFU1093) Yleiskäyttöinen jatke Nobel Biocare N1™ TCC NP (IFU1023) Asemapaikannin Nobel Biocare N1™ TCC NP (IFU1091) Jäljennössylinteri Avoin tarjotin Nobel Biocare N1™ TCC NP (IFU1086) Jäljennössylinteri Suljettu tarjotin Nobel Biocare N1™ TCC NP (IFU1086) Multi-unit-jatke Xeal™ Nobel Biocare N1™ TCC NP (IFU1075) 17° Multi-unit-jatke Xeal™ Nobel Biocare N1™ TCC NP (IFU1075) Nobel Biocare N1™ Base Xeal™ -alusta TCC Kolmikorv. NP (IFU1088) Esteettinen jatke Nobel Biocare N1™ NP (IFU1018) |
| Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC RP | Paranemisjatke Nobel Biocare N1™ TCC RP (IFU1094) Tilapäisjatke Nobel Biocare N1™ TCC RP (IFU1093) Yleiskäyttöinen jatke Nobel Biocare N1™ TCC RP (IFU1023) Asemapaikannin Nobel Biocare N1™ TCC RP (IFU1091) Jäljennössylinteri Avoin tarjotin Nobel Biocare N1™ TCC RP (IFU1086) Jäljennössylinteri Suljettu tarjotin Nobel Biocare N1™ TCC RP (IFU1086) Multi-unit-jatke Xeal™ Nobel Biocare N1™ TCC RP (IFU1075) 17° Multi-unit-jatke Xeal™ Nobel Biocare N1™ TCC RP (IFU1075) 30° Multi-unit-jatke Xeal™ Nobel Biocare N1™ TCC RP (IFU1075) Nobel Biocare N1™ Base Xeal™ -alusta TCC Kolmikorvake RP (IFU1088) Esteettinen jatke Nobel Biocare N1™ RP (IFU1018) |

IFU1088. Nobel Biocare N1™ Base -konsepti

| Alusta | Sopivat platformat | Sopivat korkeudet | Kirstyksen vääntömomentti | Ruuvinväänin | | |
|---|--------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------|
| Nobel Biocare N1™ Base | NP | 1,75 mm / 2,5 mm / 3,5 mm | 20 Ncm | N1 Base Screwdriver -ruuvinväänin | | |
| Xeal™ | RP | 1,75 mm / 2,5 mm / 3,5 mm | | | | |
| Alustatason jatkeet ja komponentit | Sopivat platformat | Kytkevä | Ei-kytkävä | Värikoodi | Saatavilla olevat korkeudet | Ruuvinväänin |
| Parane-misjatke Nobel Biocare N1™ Base | NP | X | - | ● | 2 mm | Omnigrip™ Mini |
| | RP | X | - | ● | 3 mm (anatominen muoto) 4 mm | |
| IOS-para-nemisjatke Nobel Biocare N1™ Base | NP | X | - | ● (ruuvi) | 4,5 mm | |
| | RP | X | - | ● (ruuvi) | | |
| Tilapäisjatke Nobel Biocare N1™ Base | NP | X | X | ● (ruuvi) | 10 mm | Omnigrip™ Mini |
| | RP | X | X | ● (ruuvi) | | |
| Yleiskäyt-töinen jatke Nobel Biocare N1™ Base | NP | X | X | ● (ruuvi) | 4 mm | Omnigrip™ Mini |
| | RP | X | X | ● (ruuvi) | | |
| Jäljennössylinteri Avoin tarjotin Nobel Biocare N1™ Base | NP | X | - | ● | - | Omnigrip™ Mini |
| | RP | X | - | ● | - | |
| Jäljennössylinteri Suljettu tarjotin Nobel Biocare N1™ Base | NP | X | - | ● | - | Omnigrip™ Mini |
| | RP | X | - | ● | - | |
| Asema-paikannin Nobel Biocare N1™ Base | NP | X | - | ● | - | Omnigrip™ Mini |
| | RP | X | - | ● | - | |

| | | | | | | |
|--|----|---|---|-----------|---------------------------------|----------------|
| Esteettinen jatke Nobel Biocare N1™ Base | NP | X | - | ● (ruuvi) | 0,5 mm (bukkaalinen marginaali) | Omnigrip™ Mini |
| | RP | X | - | ● (ruuvi) | 0,5 mm (bukkaalinen marginaali) | |

IFU1089. Luun reunan viimeistelijät ja luun reunan viimeistelyohjaimet

| Luun reunan viimeistelijä | Luun reunan viimeistelyohjain | Yhteensopiva implanttijärjestelmä | Ruuvinväänin |
|--|--|--|----------------|
| Luun reunan viimeistelijä ja ohjain Kartiokiinnitys 3.0 | Luun reunan viimeistelyohjain Kartiokiinnitys 3.0 | NobelActive® 3.0 | Unigrip™ |
| Luun reunan viimeistelijä ja ohjain Kartiokiinnitys NP Ø 4,4 | Luun reunan viimeistelyohjain Kartiokiinnitys NP Ø 5,2 | NobelActive® NP NobelReplace® CC NP NobelParallel™ CC NP | |
| Luun reunan viimeistelijä ja ohjain Kartiokiinnitys NP Ø 5,2 | | | |
| Luun reunan viimeistelijä ja ohjain Kartiokiinnitys RP Ø 5,2 | Luun reunan viimeistelyohjain Kartiokiinnitys RP Ø 5,2 | NobelActive® RP NobelReplace® CC RP NobelParallel™ CC RP | |
| Luun reunan viimeistelijä ja ohjain Kartiokiinnitys RP Ø 6,2 | | | |
| Luun reunan viimeistelijä ja ohjain Kartiokiinnitys WP Ø 6,7 | Luun reunan viimeistelyohjain Kartiokiinnitys WP Ø 6,7 | NobelActive® WP NobelParallel™ CC WP | |
| Luun reunan viimeistelijä ja ohjain Brånemark System® NP Ø 4,5 | Luun reunan viimeistelyohjain Brånemark System® NP | NobelSpeedy® Groovy NP Brånemark System NP | Unigrip™ |
| Luun reunan viimeistelijä ja ohjain Brånemark System® RP Ø 5,1 | Luun reunan viimeistelyohjain Brånemark System® RP | NobelSpeedy® Groovy RP Brånemark System® RP NobelZygoma™ | |
| Luun reunan viimeistelijä ja ohjain Brånemark System® WP Ø 6,5 | Luun reunan viimeistelyohjain Brånemark System® WP | NobelSpeedy® Groovy WP Brånemark System® WP | |
| Luun reunan viimeistelijä Nobel Biocare N1™ TCC Ø 4,0 | Luun reunan viimeistelyohjain Nobel Biocare N1™ TCC NP Ø 4,0 | Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC NP | Omnigrip™ Mini |
| Luun reunan viimeistelijä Nobel Biocare N1™ TCC Ø 5,2 | Luun reunan viimeistelyohjain Nobel Biocare N1™ TCC NP Ø 5,2 | | |
| Luun reunan viimeistelijä Nobel Biocare N1™ TCC Ø 5,2 | Luun reunan viimeistelyohjain Nobel Biocare N1™ TCC RP Ø 5,2 | Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC RP | |
| Luun reunan viimeistelijä ja ohjain NobelReplace™ NP Ø 4,6 | Luun reunan viimeistelyohjain NobelReplace™ NP Ø 4,6 | Replace Select TC NP Replace Select Tapered Replace Select Tapered PMC | Unigrip™ |
| Luun reunan viimeistelyohjain NOBELREPLACE® 6.0 Ø 7 | Luun reunan viimeistelyohjain NOBELREPLACE® 6.0 Ø 7 | Replace Select Tapered Replace Select Tapered PMC | |
| Luun reunan viimeistelijä ja ohjain NobelReplace™ RP Ø 5,3 | Luun reunan viimeistelyohjain NobelReplace™ RP Ø 5,3 | Replace Select TC RP Replace Select Tapered Replace Select Tapered PMC | |
| Luun reunan viimeistelijä ja ohjain NobelReplace™ WP Ø 6,5 | Luun reunan viimeistelyohjain NobelReplace™ WP Ø 6,5 | Replace Select Tapered Replace Select Tapered PMC | |

IFU1090. Uudelleenkäytettävät Nobel Biocare -instrumentit ja -komponentit

All-on-4®-ohjain

| Implanttituotesarja | Porat |
|--|---|
| NobelActive® | Unigrip™ Screwdrivers Twist Drill -porat Ø 2,0 mm Drill with Tip Tapered -pora 2,0 mm |
| NobelActive® TiUltra™ | |
| NobelParallel™ Conical Connection | |
| NobelParallel™ Conical Connection TiUltra™ | |
| NobelReplace® Conical Connection | |
| NobelReplace® Conical Connection Partially Machined Collar (PMC) | |
| NobelReplace® Tapered Groovy | |
| Replace Select™ Tapered TiUnite® | |
| Replace Select™ Tapered Partially Machined Collar (PMC) | |
| NobelSpeedy® Groovy | |
| Brånemark System® | |
| Nobel Zygoma O° ja 45° | |

Multi-unit-kohdistustyökalu

| Implanttituotesarja | Käyttöohje | Kiinnitystyyppi | Implanttiväänin |
|---|------------|--------------------------|-------------------------------------|
| NobelActive® TiUnite® NobelActive® TiUltra™ | IFU1001 | Sisäinen kartiokiinnitys | Implanttiväänitimet Kartiokiinnitys |
| NobelParallel™ Conical Connection | IFU1002 | | |
| NobelParallel™ Conical Connection TiUltra™ | | | |
| NobelReplace® Conical Connection | IFU1010 | | |
| NobelReplace® Conical Connection Partially Machined Collar (PMC) | | | |
| NobelReplace® Tapered Groovy Replace Select™ Tapered TiUnite® Replace Select™ Tapered Partially Machined Collar (PMC) | IFU1012 | Kolmikorvake-kiinnitys | Implanttiväänitimet NobelReplace® |

Yhdistetty avopäinen momenttiavain

| Implanttituotesarja | Yhteensopivat implantinviejät |
|-----------------------------------|--|
| Brånemark System® NobelSpeedy® | Guided Implant Mount Brånemark System® NP, RP 3.75, RP 4.0, WP |
| NobelParallel™ | Guided Implant Mount NobelParallel™ NP 3.75, RP 4.3, RP 5.0, WP 5.5 |
| Trefoil™ System | Trefoil™ Implant Mount |
| NobelActive® | Guided Implant Mount NobelActive® NP 3.5, RP 4.3, RP 5.0, WP 5.5 |
| NobelReplace® CC | Guided Implant Mount NobelReplace® CC NP 3.5, RP 4.3, RP 5.0 |
| NobelReplace® Tapered | Guided Implant Mount NobelReplace® Tapered NP 3.5, RP 4.0, WP 5.0, 6.0 |

Liitin käsikappaleeseen

| Liitin käsikappaleeseen | Yhteensopivat laitteet | Implanttituotesarja |
|--|---|--|
| Liitin käsikappaleeseen | Guided Implant Mount Brånemark System® NP, RP 3.75, RP 4.0, WP Zygoma Implant Mount | Brånemark System® NobelSpeedy® Zygoma RP |
| NobelReplace® -liitin käsikappaleeseen | Guided Implant Mount NobelActive® NP, RP 4.3, RP 5.0, WP 5.5 Guided Implant Mount NobelParallel™ NP 3.75, RP 4.3, RP 5.0, WP 5.5 Guided Implant Mount NobelReplace® NP 3.5, RP 4.3, WP 5.0, 6.0 Guided Implant Mount NobelReplace® CC NP 3.5, RP 4.3, RP 5.0 Implant Mount Ø 5 mm | NobelActive® NobelParallel™ NobelReplace® Tapered NobelReplace® CC Trefoil™ System |

Z:n muotoinen syvyyssondi 7–18 mm ja NobelSpeedy®-syvyyssondi 18–25 mm

Depth Probe -syvyyssondeja ei yhdistetä muihin laitteisiin.

Suunnan ilmaisimet Direction Indicator Ø 2/Ø 2.4-2.8 mm ja Direction Indicator Tapered NP/RP/WP/6.0

Suunnan ilmaisimia ei yhdistetä muihin laitteisiin.

Implantin pelastuskauluksen ja poraohjainten kahva

Implantin pelastuskauluksen ja pelastusporaohjainten kahva voidaan liittää implantin pelastuskauluksiin ja pelastusporaohjaimiin.

Kahva laiteinstrumenteille

Kahva laiteinstrumenteille voidaan liittää koneellisiin Screwdrivers Machine Unigrip™ -ruuvinvääntimiin, koneellisiin Omnigrip™ Screwdrivers Machine -ruuvinvääntimiin, koneellisiin Screwdrivers Machine Multi-unit-ruuvinvääntimiin, Omnigrip™ Mini Screwdriver -ruuvinvääntimiin, Abutment Screw Remover -irrottimiin, Abutment Screw Retrieval Instrument -instrumentteihin ja Screw Tap Repair Tool -kierreleikkurin korjaustyökaluihin.

Implanttivääntimet

Implanttivääntimet kiinnitetään ISO 1797 -yhteensopivaan hammaslääketieteelliseen käsikappaleeseen/kulmakappaleeseen sekä seuraavien hammasimplanttien sisäiseen tai ulkoiseen kuusiokiinnitykseen.

| Implanttivääntimet | Implanttituotesarja |
|---|---|
| Implanttivääntimet CC 3.0 (28/37 mm) | NobelActive® TiUnite® |
| Implanttivääntimet CC NP (28/37 mm) | NobelActive® TiUltra™ |
| Implanttivääntimet CC RP (28/37 mm) | NobelParallel™ Conical Connection |
| Implanttivääntimet CC WP (28/37 mm) | NobelParallel™ Conical Connection TiUltra™ |
| Implanttivääntimet CC Kapea jatke 3.0/NP/RP | |
| Implanttivääntimet NobelReplace® NP (pitkä/lyhyt) | NobelReplace® Conical Connection |
| Implanttivääntimet NobelReplace® RP (pitkä/lyhyt) | NobelReplace® Conical Connection PMC |
| Implanttivääntimet NobelReplace® WP (pitkä/lyhyt) | NobelReplace® Tapered Groovy |
| Implanttivääntimet NobelReplace® 6.0 (pitkä/lyhyt) | Replace Select™ Tapered TiUnite® Replace Select™ Tapered PMC |
| Implanttivääntimet Brånemark System® NP (26/34 mm) | Brånemark System® |
| Implanttivääntimet Brånemark System® RP (21/26/34 mm) | |
| Implanttivääntimet Brånemark System® WP (21/26 mm) | |

Implantinviejien jakoavaimen sovitin Brånemark System® NP/RP/WP

| Implantti | Käyttöohje | Momenttivääntimet |
|-------------------|------------|--|
| Brånemark System® | IFU1007 | Brånemark System® Manual Torque Wrench |
| NobelSpeedy® | IFU1007 | |

Kirurginen NobelReplace®-vääntin

| Implanttituotesarja | Käyttöohje | Implanttivääntin |
|---|------------|---|
| NobelActive® TiUnite® NobelActive® TiUltra™ | IFU1001 | Implanttivääntimet kartiokiinnityksellä |
| NobelParallel™ Conical Connection NobelParallel™ Conical Connection TiUltra™ | IFU1002 | |
| NobelReplace® Conical Connection NobelReplace® Conical Connection Partially Machined Collar (PMC) | IFU1010 | Implanttivääntimet NobelReplace® |
| NobelReplace® Tapered Groovy Replace Select™ Tapered TiUnite® Replace Select™ Tapered Partially Machined Collar (PMC) | IFU1012 | Implanttivääntimet NobelReplace® ja Replace Select™ Tapered |
| Nobel Biocare N1™ TCC TiUltra™ | IFU1087 | Implanttivääntin Nobel Biocare N1™ |

Huuhteluneula

Irrigation Needle -huuhteluneula liitetään ruiskuun, jossa on puhdistusliuosta, ja sitä käytetään kanyloitujuen porien ja leikkurien sisäisten kanavien/aukkojen huuhteluun käsittelyn/ uudelleen käsittelyn yhteydessä.

Pehmytkudospunssarit

Tissue punch-pehmytkudospunssarit kiinnitetään ISO 1797 -yhteensopivaan hammaslääketieteelliseen käsikappaleeseen/kulmakappaleeseen.

IFU1091. Asemapaikantimet

| | Implantin kiinnitys | Saatavilla oleva platformi | Jatkeet | Värikoodi | Vääntömomentti | Ruuvinvääntin |
|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------|----------------|----------------|
| Nobel Biocare N1™ TCC -asemaikantimet | Triovaali kartiokiinnitys (TCC) | NP RP | - | ● ● | Kiristys käsin | Omnigrip™ Mini |
| Nobel Biocare Multi-unit PoLo | - | NP/RP/WP (CC) | Multi-unit-jatkeet | - | Kiristys käsin | Omnigrip™ Mini |
| Nobel Biocare Multi-unit PoLo Bmk WP | - | Ulkoinen kuusio WP | Multi-unit-jatkeet Brånemark System® | ● | Kiristys käsin | Omnigrip™ Mini |

IFU1092. Poranterän syvyysvastesarjat ohjattuihin ja vapaalla kädellä tehtäviin leikkauksiin

| Tuotenumi | Yhteensopivat laitteet | | Ruuvinvääntimet |
|----------------|---|--|---|
| | Poranterän vaste / poranterän vastesarja | Poranterät | |
| Drill Stop Ø 2 | Guided Drill Stop Kit Box Drill Stop Kit Box | Twist Drill w Tip 2.0x18-25 mm Guided Twist Drill 2x(10+)7-13 mm Guided Twist Drill 2x(10+)7-18 mm Twist Drill w Tip 2x7-15 mm Twist Drill 3.2x7-10 mm Twist Drill 1.5x7-15 mm Twist Drill w Tip 2x10-18 mm Twist Drill w Tip 2x18-25 mm, LS Guided Drill Guide NP to Ø 2 mm Guided Drill Guide RP to Ø 2 mm Guided Drill Guide 6.0/WP to Ø 2 mm | Screwdriver Manual Unigrip™ Screwdriver Machine Unigrip™ |

| Tuotenimi | Yhteensopivat laitteet | | |
|---------------------|---|--|---|
| | Poranterän vaste / poranterän vastesarja | Poranterät | Ruuvinvään- timet |
| Drill Stop Ø 2.8 | Guided Drill Stop Kit Box Drill Stop Kit Box | Guided Twist Drill 2.8x(10+)7-13 mm Guided Twist Drill 2.8x(10+)7-18 mm Twist Step Drill 2.4/2.8 10-18 mm Twist Step Drill 2.4/2.8 7-15 mm Twist Step Drill 2.4/2.8 7-10 mm Guided Twist Step Drill Ø 2.4/2.8 (10+) 7-13 mm Guided Twist Step Drill Ø 2.4/2.8 (10+) 7-18 mm Twist Step Drill 2.4/2.8x18-25 mm, LS Twist Step Drill 2.4/2.8x18-25 mm Guided Drill Guide NP to Ø 2.8 mm Guided Drill Guide RP to Ø 2.8 mm Guided Drill Guide 6.0/WP to Ø 2.8 mm | Screwdriver Machine Unigrip™ Screwdriver Manual Unigrip™ |
| Drill Stop Ø 3 | Guided Drill Stop Kit Box Drill Stop Kit Box | Guided Twist Drill 3x(10+)7-13 mm Guided Twist Drill 3x(10+)7-18 mm Twist Drill 3x10-18 mm Twist Drill 3x7-15 mm Twist Drill 3x7-10 mm Guided Drill Guide NP to Ø 3 mm Guided Drill Guide RP to Ø 3 mm Guided Drill Guide 6.0/WP to Ø 3 mm | Screwdriver Machine Unigrip™ Screwdriver Manual Unigrip™ |
| Drill Stop Ø 3.2 | Guided Drill Stop Kit Box Drill Stop Kit Box | Twist Step Drill 2.8/3.2 7-10 mm Twist Drill 3.2x18-25 mm Twist Step Drill 2.8/3.2 10-18 mm Twist Step Drill 2.8/3.2 7-15 mm Guided Twist Drill 3.2x(10+)7-13 mm Twist Drill 3.2x7-10 mm Guided Twist Drill 3.2x(10+)7-18 mm Twist Drill 3.2x10-18 mm Guided Twist Step Drill Ø 2.8/3.2 (10+) 7-18 mm Guided Twist Step Drill Ø 2.8/3.2 (10+) 7-13 mm Twist Drill 3.2x7-15 mm Guided Drill Guide NP to Ø 3.2 mm Guided Drill Guide RP to Ø 3.2 mm | Screwdriver Machine Unigrip™ Screwdriver Manual Unigrip™ |
| Drill Stop Ø 3.4 | Guided Drill Stop Kit Box Drill Stop Kit Box | Guided Twist Drill 3.4x(10+)7-13 mm Guided Twist Drill 3.4x(10+)7-18 mm Twist Drill 3.4x10-18 mm Twist Drill 3.4x7-15 mm Twist Drill 3.4x7-10 mm Twist Drill 3.4x18-25 mm Guided Drill Guide RP to Ø 3.4 mm | Screwdriver Machine Unigrip™ Screwdriver Manual Unigrip™ |
| Drill Stop Ø 3.6 | Guided Drill Stop Kit Box Drill Stop Kit Box | Twist Step Drill 3.2/3.6 7-15 mm Twist Step Drill 3.2/3.6 7-10 mm Guided Twist Step Drill Ø 3.2/3.6 (10+) 7-18 mm Guided Twist Step Drill Ø 3.2/3.6 (10+) 7-13 mm Twist Step Drill 3.2/3.6 10-18 mm Guided Drill Guide RP to Ø 3.6 mm Guided Drill Guide WP/6.0 to Ø 3.6 mm | Screwdriver Machine Unigrip™ Screwdriver Manual Unigrip™ |
| Drill Stop Ø 3.8 | Guided Drill Stop Kit Box Drill Stop Kit Box | Guided Twist Drill 3.8x(10+)7-13 mm Guided Twist Drill 3.8x(10+)7-18 mm Guided Drill Guide 6.0/WP to Ø 3.8 mm | Screwdriver Machine Unigrip™ Screwdriver Manual Unigrip™ |
| Drill Stop Ø 4.2 | Guided Drill Stop Kit Box Drill Stop Kit Box | Guided Twist Step Drill 3.8/4.2 (10+) 7-18 Twist Step Drill 3.8/4.2 10-18 mm Twist Step Drill 3.8/4.2 7-15 mm Twist Step Drill 3.8/4.2 7-10 mm Guided Twist Drill 4.2x(10+)7-13 mm Guided Twist Drill 4.2x(10+)7-18 mm Guided Twist Step Drill 3.8/4.2 (10+) 7-13 Guided Drill Guide RP to Ø 4.2 mm Guided Drill Guide 6.0/WP to Ø 4.2 mm | Screwdriver Machine Unigrip™ Screwdriver Manual Unigrip™ |

| Tuotenimi | Yhteensopivat laitteet | | |
|---------------------------------|--|---|----------------------|
| | Poranterän vaste / poranterän vastesarja | Poranterät | Ruuvinvään- timet |
| Drill Stop Kit Box | Drill Stop Ø 2 Drill Stop Ø 2.8 Drill Stop Ø 3 Drill Stop Ø 3.2 Drill Stop Ø 3.4 Drill Stop Ø 3.6 Drill Stop Ø 3.8 Drill Stop Ø 4.2 | Twist Drill w Tip 2.0x18-25 mm Twist Drill w Tip 2x7-15 mm Twist Drill 3.2x7-10 mm Twist Drill 1.5x7-15 mm Twist Drill w Tip 2x10-18 mm Twist Drill w Tip 2x18-25 mm, LS Twist Step Drill 2.4/2.8 10-18 mm Twist Step Drill 2.4/2.8 7-15 mm Twist Step Drill 2.4/2.8 7-10 mm Twist Step Drill 2.4/2.8x18-25 mm, LS Twist Step Drill 2.4/2.8x18-25 mm Twist Step Drill 2.4/2.8x18-25 mm Twist Drill 3x10-18 mm Twist Drill 3x7-15 mm Twist Drill 3x7-10 mm Twist Step Drill 2.8/3.2 7-10 mm Twist Drill 3.2x18-25 mm Twist Step Drill 2.8/3.2 10-18 mm Twist Step Drill 2.8/3.2 7-15 mm Twist Drill 3.2x7-10 mm Twist Drill 3.2x10-18 mm Twist Drill 3.2x7-15 mm Twist Drill 3.4x10-18 mm Twist Drill 3.4x7-15 mm Twist Drill 3.4x7-10 mm Twist Drill 3.4x18-25 mm Twist Step Drill 3.2/3.6 7-15 mm Twist Step Drill 3.2/3.6 7-10 mm Twist Step Drill 3.2/3.6 10-18 mm Twist Step Drill 3.8/4.2 10-18 mm Twist Step Drill 3.8/4.2 7-15 mm Twist Step Drill 3.8/4.2 7-10 mm | - |
| Guided Drill Stop Kit Box | Drill Stop Ø 2 Drill Stop Ø 2.8 Drill Stop Ø 3 Drill Stop Ø 3.2 Drill Stop Ø 3.4 Drill Stop Ø 3.6 Drill Stop Ø 3.8 Drill Stop Ø 4.2 | Guided Twist Drill 2x(10+)7-13 mm Guided Twist Drill 2x(10+)7-18 mm Guided Twist Drill 2.8x(10+)7-13 mm Guided Twist Drill 2.8x(10+)7-18 mm Guided Twist Step Drill Ø 2.4/2.8 (10+) 7-13 mm Guided Twist Step Drill Ø 2.4/2.8 (10+) 7-18 mm Guided Drill Guide NP to Ø 2.8 mm Guided Drill Guide RP to Ø 2.8 mm Guided Drill Guide 6.0/WP to Ø 2.8 mm Guided Twist Drill 3x(10+)7-13 mm Guided Twist Drill 3x(10+)7-18 mm Guided Twist Drill 3.2x(10+)7-13 mm Guided Twist Drill 3.2x(10+)7-18 mm Guided Twist Step Drill Ø 2.8/3.2 (10+) 7-18 mm Guided Twist Step Drill Ø 2.8/3.2 (10+) 7-13 mm Guided Twist Drill 3.4x(10+)7-13 mm Guided Twist Drill 3.4x(10+)7-18 mm Guided Twist Step Drill Ø 3.2/3.6 (10+) 7-18 mm Guided Twist Step Drill Ø 3.2/3.6 (10+) 7-13 mm Guided Twist Drill 3.8x(10+)7-13 mm Guided Twist Drill 3.8x(10+)7-18 mm Guided Twist Step Drill 3.8/4.2 (10+) 7-18 Guided Twist Drill 4.2x(10+)7-13 mm Guided Twist Drill 4.2x(10+)7-18 mm Guided Twist Step Drill 3.8/4.2 (10+) 7-13 | - |

IFU1093. Tilapäisjatkeet ja -sylinterit

Tilapäiset, kytkevät Snap-jatkeet sekä tilapäiset kytkevät/ei-kytkevät jatkeet – yhteensopivat implantaattiplatformat ja ruuvinvääntimet

| Paranemisjatkeiden kiinnitys | Sopivat platformat | Kytkevä | Ei-kytkevä | Värikoodi | Sopivat marginaalikorkeudet | Kiristykseen vääntömomentti | Ruuvinväännin |
|---------------------------------|--------------------|---------|------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|
| Kartiokiinnitys (CC) | 3.0 | x | | ei mitään | 1,5 mm | 15 Ncm | Unigrip™ |
| | NP | x | x | ● | 1,5 mm | 35 Ncm | |
| | RP | x | x | ● | 3,0 mm | | |
| Triovaali kartiokiinnitys (TCC) | NP | x | | ● (ruuvi) | 1,5 mm | 20 Ncm | Omnigrip™ mini |
| | RP | x | | ● (ruuvi) | 3,0 mm | | |
| | WP | x | x | ● | | | |
| Kolmikorkvake | NP | x | x | ● | 1,5 mm | 35 Ncm | Unigrip™ |
| | RP | x | x | ● | | | |
| | WP | x | x | ● | | | |
| | 6.0 | x | x | ● | | | |
| Ulkoisen kuusiokiinnitys | NP | x | x | ei mitään | 1,5 mm | 35 Ncm | Unigrip™ |
| | RP | x | x | ei mitään | | | |
| | WP | x | x | ei mitään | | | |

Kapeat tilapäisjatkeet – yhteensopivat implantaattiplatformat ja ruuvinvääntimet sekä kiristysmomentit

| Kapeiden paranemisjatkeiden kiinnitys | Sopivat platformat | Värikoodi | Mahdoll. sijoituskohdan korkeudet | Kiristykseen vääntömomentti | Ruuvinväännin |
|---------------------------------------|--------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------|
| Kartiokiinnitys (CC) | 3.0 | ei mitään | 6,5 mm 7,5 mm | 15 Ncm | Unigrip™ |
| | NP | ○ | 6,5 mm 7,5 mm | | |
| | RP | ○ | 6,5 mm 7,5 mm | | |

Anatomical PEEK --tilapäisjatkeet – yhteensopivat implantaattiplatformat ja ruuvinvääntimet

| PEEK-jatkeiden käyttökohde: | Sopivat platformat | Värikoodi | Mahdoll. koot | Kiristykseen vääntömomentti | Ruuvinväännin |
|-----------------------------|--------------------|-----------|----------------------|-----------------------------|---------------|
| Kartiokiinnitys (CC) | WP | ei mitään | 6 x 7 mm 7 x 8 mm | 15 Ncm | Unigrip™ |

Multi-unit-tilapäisjatkeet ja tilapäiset Multi-Unit-Snap-sylinterit – yhteensopivat jatkeet ja ruuvinvääntimet

| Tilapäissylinteri | MUA-jatkeen kiinnitys/platformat | Värikoodi | Kiristykseen vääntömomentti | Ruuvinväännin |
|--|--|-----------|-----------------------------|---------------|
| Tilapäinen Multi-unit-Snap-sylinteri | CC/NP, RP, WP TCC/ NP, RP | ei mitään | 15 Ncm | Unigrip™ |
| Tilapäinen Multi-unit-sylinteri | Kolmikorkvakeinen / NP, RP, WP Ulkoinen kuusio / NP, RP | | | |
| Tilapäinen Multi-unit-sylinteri Bmk WP | Ulkoinen kuusio/WP | | | |

IFU1094. Paranemisjatkeet, paranemisruuvit

Paranemisjatkeet – yhteensopivat implantaattiplatformat ja ruuvinvääntimet

| Paranemisjatkeiden kiinnitys | Sopivat platformat | Värikoodi | Ruuvinväännin |
|---------------------------------|--------------------|-----------|----------------|
| Kartiokiinnitys (CC) | 3.0 | ei mitään | Unigrip™ |
| | NP | ● | |
| | RP | ● | |
| Triovaali kartiokiinnitys (TCC) | NP | ● (ruuvi) | Omnigrip™ Mini |
| | RP | ● (ruuvi) | |
| Kolmikorkvake | NP | ● | Unigrip™ |
| | RP | ● | |
| | WP | ● | |
| | 6.0 | ● | |
| Ulkoisen kuusiokiinnitys | NP | ei mitään | Unigrip™ |
| | RP | ei mitään | |
| | WP | ei mitään | |

Paranemisruuvit – yhteensopivat implantaattiplatformat ja ruuvinvääntimet

| | | | |
|---------------|----|---|----------|
| Kolmikorkvake | NP | ● | Unigrip™ |
| | RP | ● | |

Kapeat paranemisjatkeet – yhteensopivat implantaattiplatformat ja ruuvinvääntimet

| Kapeiden paranemisjatkeiden kiinnitys | Sopivat platformat | Värikoodi | Ruuvinväännin |
|---------------------------------------|--------------------|-----------|---------------|
| Kartiokiinnitys (CC) | 3.0 | ei mitään | Unigrip™ |
| | NP | ● | |
| | RP | ● | |

Anatomical PEEK -paranemisjatkeet – yhteensopivat implantaattiplatformat ja ruuvinvääntimet

| Anatomical PEEK -paranemisjatkeiden kiinnitys | Sopivat platformat | Värikoodi | Ruuvinväännin |
|---|--------------------|-----------|---------------|
| Kartiokiinnitys (CC) | WP | ei mitään | Unigrip™ |

IFU1095. Zygoma-implantti RP

Yhteensopivuus Zygoma-implanttien kanssa

| Tuotenumero | Tuotenimi | Peittoruuvi | Implantinviejä ja sen ruuvi | Jäljennössylinterit ja niiden ohjauspinni | Paranemis-jatke | Pysyvät suorat jatkeet ja niiden ruuvit | Pysyvät kulmamalliset jatkeet ja niiden ruuvi | Implanttisillat ja implanttikiskopoittopteesit ja niihin kuuluvat ruuvit | Zygoma-kahva, liitäntä käsikappaleeseen Muu |
|-------------|-----------------------------|---|--|---|--|--|--|--|--|
| 28862 | Zygoma Implant RP 30 mm | Zygoma Implant -peittoruuvi: 28989 Brånemark System Zygoma Implant -peittoruuvi: 32424 | Zygoma-implantinviejä Zygoma Fixture Mount -ruuvi M2specx6,6 mm (implantinviejä on esiasennettu implanttiin) | Brånemark System® Zygoma-jäljennössylinteri Avoin tarjotin Ø 4 mm Ohjauspinni Zygoma 20 mm RP | Brånemark System® Zygoma-paranemisjatke Ø 4x3 mm Brånemark System® Zygoma-paranemisjatke Ø 4x5 mm | Zygoma-jatke Multi-unit RP 3 mm Zygoma-jatke Multi-unit RP 5 mm Brånemark System® Zygoma Multi-unit -jatke 3 mm Brånemark System® Zygoma Multi-unit -jatke 5 mm | Zygoma 17° jatke Multi-unit RP 2 mm Zygoma 17° jatke Multi-unit RP 3 mm Brånemark System® Zygoma 17° Multi-unit-jatke 2 mm Brånemark System® Zygoma 17° Multi-unit-jatke 3 mm Brånemark System® Zygoma kulmallinen Multi-unit-jatkeruuvi | Nobel ProCera Implant Bar peittoproteesi Titanium Procera-implanttisilta Ti Implanttitaso NobelProCera® Zr Implanttisilta (implanttitaso) Brånemark System® Zygoma-jatkeruuvi | Zygoma-kahva Liitin käsikappaleeseen Unigrip-ruuvinvääntimet (implantin viejän ruuviin) |
| 28863 | Zygoma-implantti RP 35 mm | | | | | | | | |
| 28864 | Zygoma-implantti RP 40 mm | | | | | | | | |
| 28865 | Zygoma-implantti RP 42,5 mm | | | | | | | | |
| 28866 | Zygoma-implantti RP 45 mm | | | | | | | | |
| 28867 | Zygoma-implantti RP 47,5 mm | | | | | | | | |
| 28868 | Zygoma-implantti RP 50 mm | | | | | | | | |
| 28869 | Zygoma-implantti RP 52,5 mm | | | | | | | | |

Yhteensopivuus työkalulisävarusteiden tai muiden laitteiden kanssa

| Tuotenumero | Tuotenimi | Implantti | Laitetyyppi / 3. tason perhe | Käsikappale |
|-------------|---|---------------------------------|--|--|
| 28989 | Zygoma Implant Cover Screw | Zygoma RP -implanttiperhe | Zygoma Implant Cover Screw | Peittoruuvinväännin Brånemark System Kuusio |
| 32424 | Brånemark System Zygoma-implantin peittoruuvi | NobelZygoma 45° -implanttiperhe | | |
| 29162 | Brånemark System® Zygoma Surgical Kit -sarja | NobelZygoma 0° -implanttiperhe | Brånemark System® Zygoma Surgical Kit -sarja | Zygoma-kahva Zygoma-rajakatkaisin Zygoma-rajakatkaisin lyhyt Zygoma-syvyysindikaattori suora Zygoma-syvyysindikaattori kulmallinen |
| 32628 | Bmk Syst Zygoma Twist Drill 2.9 mm | | Brånemark System Zygoma -kierreport | Liittymä määritelty ISO 1797:n mukaisesti |
| 32629 | Bmk Syst Zygoma Twist Drill 2.9 mm short | | | |
| 32631 | Bmk Syst Zygoma Twist Drill 3.5 mm | | | |
| 32632 | Bmk Syst Zygoma Twist Drill 3.5 mm short | | | |
| 32630 | Bmk Syst Zygoma Pilot Drill 3.5 mm | | Ohjausporanterät | Liittymä määritelty ISO 1797:n mukaisesti |
| 32791 | Bmk Syst Zygoma Pilot Drill 3.5 mm short | | | |
| 37786 | Zygoma Handle | | Manuaalinen implanttiväännin: | - |
| 37787 | Zygoma-rajakatkaisin | | Rajakatkaisin | - |
| 37788 | Zygoma-rajakatkaisin lyhyt | | | |
| 37789 | Zygoma-syvyysindikaattori suora | | Syvyysindikaattori | - |
| 37790 | Zygoma-syvyysindikaattori kulmallinen | | | |
| DIA 578-0 | Brånemark System® Zygoma Round Bur -pora | | Round Bur -pora: | Liittymä määritelty ISO 1797:n mukaisesti |

Brånemark System® Zygoma Surgical Kit -sarjan komponentit

| Tuotenimi | Sarjaan sisältyvät instrumentit |
|--|--|
| Brånemark System® Zygoma Surgical Kit -sarja | Zygoma-kahva Zygoma-rajakatkaisin Zygoma-rajakatkaisin lyhyt Zygoma-syvyysindikaattori suora Zygoma-syvyysindikaattori kulmallinen |

IFU1096. Jatkeiden irrotustyökalut

Jatkeiden irrotustyökalujen Titanium CC ja Zirconia CC kanssa yhteensopivat jatkeet

| | Jatkeen kuvaus | Irrotustyökalu | Ruuvinväännin |
|-------|---|--|------------------------|
| NP | Tilapäisjatke Kytkevä CC NP | Jatkeen irrotustyökalu CC NP Titanium | Unigrip™-ruuvinväännin |
| | Esteettinen jatke CC NP | | |
| | Snappy™-jatke CC NP | | |
| | NobelProcera®-jatke Titanium NP | | |
| RP/WP | Tilapäisjatke Kytkevä CC RP/WP | Jatkeen irrotustyökalu CC RP/WP Titanium | Unigrip™-ruuvinväännin |
| | Esteettinen jatke CC RP/WP | | |
| | Snappy™-jatke CC RP/WP | | |
| | NobelProcera®-jatke Titanium RP/WP | | |
| NP | NobelProcera®-jatke Zirconia CC NP | Jatkeen irrotustyökalu CC NP Zirconia | Pihdit |
| | Sovitin Zirconia-jatkeeseen CC NP (NobelProcera® ASC Zirconia-jatke NP, NobelProcera® FCZ -implanttikruunu NP) | | |
| | | | |
| RP/WP | NobelProcera®-jatke Zirconia RP | Jatkeen irrotustyökalu CC RP/WP Zirconia | Pihdit |
| | Sovitin Zirconia-jatkeeseen CC RP ja WP (NobelProcera® ASC -jatke Zirconia RP/WP, NobelProcera® FCZ -implanttikruunu RP/WP) | | |

Jatkeen irrotustyökalun Nobel Biocare N1™ TCC kanssa yhteensopivat jatkeet

| | Jatkeen kuvaus | Irrotustyökalu | Ruuvinväännin/kahva |
|--|--|--|--|
| NP | Paranemisjatke Nobel Biocare N1™ TCC NP | Jatkeen irrotustyökalu Nobel Biocare N1™ TCC NP* | Laitesinstrumentin kahva/Manuaalinen momenttiavaimen sovitin Vanha versio on yhteensopiva Multi-unit-ruuvinvääntimen kanssa |
| | Tilapäisjatke Nobel Biocare N1™ TCC NP* | | |
| | Yleiskäyttöinen jatke Nobel Biocare N1™ TCC NP** | | |
| | Multi-unit-jatke Xeal™ Nobel Biocare N1™ TCC NP | | |
| | 17° Multi-unit-jatke Xeal™ Nobel Biocare N1™ TCC NP | | |
| | Nobel Biocare N1™ Base Xeal™ -alusta TCC Kolmikorvake NP | | |
| | Esteettinen jatke Nobel Biocare N1™ TCC NP | | |
| | Titanium-jatke-aihiot Nobel Biocare N1™ NP | | |
| RP | Paranemisjatke Nobel Biocare N1™ TCC RP | Jatkeen irrotustyökalu Nobel Biocare N1™ TCC RP* | Laitesinstrumentin kahva/Manuaalinen momenttiavaimen sovitin Vanha versio on yhteensopiva Multi-unit-ruuvinvääntimen kanssa |
| | Tilapäisjatke Nobel Biocare N1™ TCC RP* | | |
| | Yleiskäyttöinen jatke Nobel Biocare N1™ TCC RP** | | |
| | Multi-unit-jatke Xeal™ Nobel Biocare N1™ TCC RP | | |
| | 17° Multi-unit-jatke Xeal™ Nobel Biocare N1™ TCC RP | | |
| | 30° Multi-unit-jatke Xeal™ Nobel Biocare N1™ TCC RP | | |
| | Nobel Biocare N1™ Base Xeal™ TCC Kolmikorv. RP | | |
| | Esteettinen jatke Nobel Biocare N1™ TCC RP | | |
| Titanium-jatke-aihiot Nobel Biocare N1™ RP | | | |

* Jatkeen irrotustyökalun "Nobel Biocare N1™ TCC short" lyhyt versio ei ole yhteensopiva tilapäisjatkeen Nobel Biocare N1™ TCC 3.0 mm kanssa.

IFU1097. Implantin irrotustyökalut

Implantin irrotustyökalujen ja implantin pelastuskaulusten yhteensopivuus

| Instrumentti | Implantin kiinnitystyyppi | Implantin platformi | Yhteensopiva implantti |
|--|---------------------------|---------------------|--|
| Implantin irrotustyökalu CC 3.0 31 mm | Kartiokiinnitys | 3.0 | NobelActive® |
| Implantin irrotustyökalu CC NP ja Ulkoinen kuusio WP 22 mm | Kartiokiinnitys | NP | NobelActive® NobelReplace® NobelParallel™ |
| | Ulkoinen kuusio kiinnitys | WP | NobelSpeedy® Groovy Brånemark System® |
| Implantin irrotustyökalu CC RP ja kolmikorvake WP 22 mm | Kartiokiinnitys | RP | NobelActive® NobelReplace® NobelParallel™ |
| | Sisäinen 3-korvake | WP | Replace Select™ Straight NobelSpeedy® Replace NobelReplace® Straight Replace Select™ Tapered Replace Select™ Tapered PMC NobelReplace® Tapered |
| Implantin irrotustyökalu CC WP 22 mm | Kartiokiinnitys | WP | NobelActive® NobelParallel™ |
| Implantin irrotustyökalu ulkoinen kuusio ja kolmikorvake NP/RP 22 mm | Ulkoinen kuusio kiinnitys | NP | NobelSpeedy® Groovy Brånemark System® |
| | | RP | NobelSpeedy® Groovy Brånemark System® |
| | Sisäinen 3-korvake | NP | Replace Select™ TC Replace Select™ Straight NobelSpeedy® Replace NobelReplace® Straight Replace Select™ Tapered Replace Select™ Tapered PMC NobelReplace® Tapered Groovy NobelReplace® Tapered PS |
| | | RP | Replace Select™ TC Replace Select™ Straight NobelSpeedy® Replace NobelReplace® Straight Replace Select™ Tapered Replace Select™ Tapered PMC NobelReplace® Tapered Groovy NobelReplace® Tapered PS |

| Instrumentti | Implantin kiinnitystyyppi | Implantin platformi | Yhteensopiva implantti |
|--|---------------------------|---------------------|--|
| Implantin irrotustyökalu ulkoinen kuusio ja kolmikorvake NP/RP 31 mm | Ulkoinen kuusio kiinnitys | NP | NobelSpeedy® Groovy Brånemark System® |
| | | RP | NobelSpeedy® Groovy Brånemark System® |
| | Sisäinen 3-korvake | NP | Replace Select™ TC Replace Select™ Straight NobelSpeedy® Replace NobelReplace® Straight Replace Select™ Tapered Replace Select™ Tapered PMC NobelReplace® Tapered Groovy NobelReplace® Tapered PS |
| | | RP | Replace Select™ TC Replace Select™ Straight NobelSpeedy® Replace NobelReplace® Straight Replace Select™ Tapered Replace Select™ Tapered PMC NobelReplace® Tapered Groovy NobelReplace® Tapered PS |
| Implantin irrotustyökalu kolmikorvake 6.0 22 mm | Sisäinen 3-korvake | 6.0 | Replace Select™ Tapered Replace Select™ Tapered PMC NobelReplace® Tapered NobelSpeedy® Replace |
| Implantin pelastuskaulus Kolmikorvake Ø 3.5 | Sisäinen 3-korvake | NP | Replace Select™ TC Replace Select™ Straight NobelSpeedy® Replace NobelReplace® Straight Replace Select™ Tapered Replace Select™ Tapered PMC NobelReplace® Tapered Groovy NobelReplace® Tapered PS |
| Implantin irrotustyökalu CC 3.0 ja TCC NP | Triovaali kartiokiinnitys | NP | Nobel Biocare N1™ TCC TiUltra™ NP |
| | Kartiokiinnitys | 3.0 | NobelActive® |
| Implantin irrotustyökalu CC RP ja kolmikorvake WP & TCC RP | Triovaali kartiokiinnitys | RP | Nobel Biocare N1™ TCC TiUltra™ RP |
| | Kartiokiinnitys | RP | NobelActive® NobelReplace® CC NobelParallel™ CC |
| | Sisäinen 3-korvake | WP | Replace Select™ Straight NobelSpeedy® Replace NobelReplace® Straight Replace Select™ Tapered Replace Select™ Tapered PMC NobelReplace® Tapered |
| Implantin pelastuskaulus Kolmikorvake Ø 4,3 | Sisäinen 3-korvake | RP | Replace Select™ TC Replace Select™ Straight NobelSpeedy® Replace NobelReplace® Straight Replace Select™ Tapered Replace Select™ Tapered PMC NobelReplace® Tapered Groovy NobelReplace® Tapered PS |

Trepan-luuporien yhteensopivuus

| Instrumentti | Yhteensopivan implantin halkaisija |
|---------------------------|------------------------------------|
| Trepan-luupora 3,2/4,0 mm | 3,0 mm |
| Trepan-luupora 3,8/4,6 mm | 3,3 mm / 3,5 mm / 3,75 mm |
| Trepan-luupora 4,4/5,2 mm | 4,0 mm / 4,3 mm |
| Trepan-luupora 5,2/6,2 mm | 5,0 mm |
| Trepan-luupora 5,6/6,6 mm | 5,5 mm |
| Trepan-luupora 6,2/7,0 mm | 6,0 mm |

IFU1098. Manuaaliset Surgical- ja Prosthetic -momenttiväntimet

| Momenttiväännin | Vääntimen sovitin | Instrumentit |
|--|--|--|
| NobelActive® Manual Torque Wrench Surgical | NOBELREPLACE® Manual Torque Wrench Adapter Surgical | Implanttiväännin CC 3.0 28 mm (IFU1090) Implanttiväännin CC 3.0 kapealle jatkeelle Implanttiväännin CC NP (IFU1090) |
| NobelReplace® Manual Torque Wrench Adapter Surgical | NOBELREPLACE® Manual Torque Wrench Adapter Surgical | Implanttiväännin CC NP kapealle jatkeelle (IFU1090) Implanttiväännin CC RP (IFU1090) Implanttiväännin CC RP kapealle jatkeelle (IFU1090) Implanttiväännin CC WP (IFU1090) Implantin irrotustyökalut (IFU1097) Jatkeruuvien irrotustyökalut (IFU1043) |
| Brånemark System® Manual Torque Wrench Surgical | Brånemark System® Manual Torque Wrench Surgical | Implanttiväännin Brånemark Syst NP (IFU1090) Implanttiväännin Driver Brånemark Syst RP (IFU1090) Implanttiväännin Brånemark Syst WP (IFU1090) |
| Manual Torque Wrench Surgical Nobel Biocare N1™ | NobelReplace® Manual Torque Wrench Adapter Surgical | Implanttiväännin Nobel Biocare N1™ TCC NP (IFU1087) Implanttiväännin Nobel Biocare N1™ TCC RP (IFU1087) |
| Manual Torque Wrench Prosthetic | Manual Torque Wrench Adapter Prosthetic | Implantin irrotustyökalut (IFU1097) Jatkeruuvien irrotustyökalut (IFU1043) Koneellinen ruuvinväännin Machine Unigrip (IFU1085) Koneellinen ruuvinväännin Multi-Unit (IFU1085) Omnigrip™-koneellinen ruuvinväännin (IFU1085) On1™ Base -koneellinen ruuvinväännin (IFU1074) Koneellinen ruuvinväännin Multi-unit Brånemark System (IFU1085) Koneellisen ruuvinvääntimen pallojatke (IFU1085) |
| Manual Torque Wrench Prosthetic Nobel Biocare N1™ | Manual Torque Wrench Adapter Prosthetic | Koneellinen ruuvinväännin Omnigrip™ Mini (IFU1085) Koneellinen ruuvinväännin Multi-Unit (IFU1085) |

IFU1099. Trefoil™-järjestelmä

Trefoil™-järjestelmää saa käyttää vain yhteensopivien Nobel Biocare -instrumenttien ja/tai komponenttien ja/ tai proteettisten komponenttien kanssa. Jos käytetään instrumentteja ja/tai komponentteja ja/tai proteettisia komponentteja, joita ei ole tarkoitettu käytettäväksi yhdessä Trefoil™-tuotteen kanssa, tämä saattaa aiheuttaa tuotteen voittumisen, kudosvaurioita tai esteettisesti epätydyttäviä tuloksia.

IFU1100. Korvaavat Nobel Biocare- osat

Korvaavien Brånemark System® -osien luettelo

| Alkuperäinen jatke | Korvaava ruuvi | Kiristysmomentti | Korvaava ruuvinväännin |
|---|--|------------------|--|
| Vakiojatke RP tai EsthetiCone-jatke | Proteettinen ruuvi, sisäinen kuusio | 10 Ncm | Ruuvinväännin kuusio 27 mm Koneelliset ruuvinvääntimet kuusio pitkä |
| | Proteettisen ruuvin aukko | | Ruuvinväännin Medium 37 mm Ruuvinvääntimen aukko lyhyt 27 mm |
| | Proteettinen ruuvi, kartio | | Koneellisen ruuvinvääntimen aukko Lyhyt Koneellisen ruuvinvääntimen aukko Pitkä |
| Brånemark 3.0 NP -jatke 3.0 Brånemark-implantille | Muuntoruuvi Titanium Unigrip™ koko Ø 3.0 | 15 Ncm | Unigrip™-ruuvinväännin* |

* Laite on osa Nobel Biocaren päävalikoimaa.

Katso Nobel Biocaren käyttöohjeesta IFU1085 lisätietoja Unigrip™ Screwdriver -ruuvinvääntimestä. Tämä käyttöohje on ladattavissa osoitteesta ifu.nobelbiocare.com.

Korvaavien Brånemark System® Novum -osien luettelo

| Alkuperäinen implantti | Korvaava ruuvi | Kiristysmomentti | Ruuvinväännin | Korvaava jäljennössiylinteri | Korvaava työimplantti |
|--------------------------|--|------------------|-------------------------|---|----------------------------|
| Brånemark System® Novum: | Alempi kiskoruuvi Unigrip™ Novum Proteettiset ruuvit Unigrip™ Novum | 35 Ncm | Unigrip™-ruuvinväännin* | Jäljennössiylinteri Novum-kiinnittimeen | Novum-kiinnittimen replika |

* Laite on osa Nobel Biocaren päävalikoimaa.

Katso Nobel Biocaren käyttöohjeesta IFU1085 lisätietoja Unigrip™ Screwdriver -ruuvinvääntimestä. Tämä käyttöohje on ladattavissa osoitteesta ifu.nobelbiocare.com.

Korvaavien NobelPerfect® System -osien luettelo

| Alkuperäinen implantti | Korvaava pysyvä jatke | Korvaava pysyvä jatke | Pysyvän jatkeen kiristysmomentti | Ruuvinväännin | Korvaava jäljennössiylinteri | Korvaava työimplantti |
|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--|---------------------------------------|
| NobelPerfect® NP, RP, WP | Paranemisijatke NobelPerfect® | Jatke NobelPerfect® NP, RP, WP | 35 Ncm | Unigrip™-ruuvinväännin* | Implanttitaso Jäljennössiylinteri NobelPerfect® NP, RP, WP | Työimplantti NobelPerfect® NP, RP, WP |

* Laite on osa Nobel Biocaren päävalikoimaa.

Katso Nobel Biocaren käyttöohjeesta IFU1085 lisätietoja Unigrip™ Screwdriver -ruuvinvääntimestä. Tämä käyttöohje on ladattavissa osoitteesta ifu.nobelbiocare.com.

Korvaavien Steri-Oss™-osien luettelo ja Replace -ulkoiset kuusiokulmat

| Alkuperäinen implantti | Korvaava paranemisjatke | Korvaava pysyvä jatke | Ruuvi | Kiristysmomentti | Ruuvinväännin | Korvaava jäljennössiylinteri | Korvaava työimplantti |
|--|--------------------------|---|------------------------------|------------------|---|---|-----------------------|
| Steri-Oss™ ja Replace™-ulkoiset kuusiokulmat | Paranemisijatke | Suora jatke, kytkevä, kulta/muovi | Jatkeruuvi TorqTite | 35 Ncm | Ruuvinväännin kuusio 0,050" (pituus 0,75" ja 1,25") | Siirtokokoonpano kuusio, avoin tarjotin | Implanttianalogi |
| | Replace, ulkoinen kuusio | Suora jatke, kytkevä, kulta/muovi 3,5 RPL ja 4,3 RPL Suora jatke, ei-kytkävä, kulta/muovi 3,5 RPL ja 4,3 RPL | | | | | |
| Alkuperäinen jatke | Korvaava tiivisterengas | | Korvaava O-rengas | | Korvaava työimplantti | | |
| O-rengasjatke | Tiivisterengas | | O-rengas Kliininen valkoinen | | O-rengasjatke Analogi väliskeellä | | |

Korvaavien Steri-Oss™ Non-Hex -osien luettelo

| Alkuperäinen implantti | Korvaava pysyvä jatke | Kiristysmomentti | Korvaava ruuvinväännin | Korvaava jäljennössiylinteri | Korvaava työimplantti |
|------------------------|---|------------------|---|--|-----------------------|
| Steri-Oss™ Non-Hex | Koronaaliruuvisarja 3,25 ja 3,8 Non-Hex | 35 Ncm | Ruuvinväännin kuusio 0,050" (pituus 1,75" ja 1,25") | Lanka-ajoitettu siirtopinni 3,25 Non-Hex | Implanttianalogi |

Pallojatkeen korvaavien osien luettelo

| Alkuperäinen jatke | Korvaavat ruuvinvääntimet |
|--------------------|--|
| Pallojatke | Koneellisen ruuvinvääntimen pallojatke Käsiruuvinvääntimen pallojatke |

IFU1101. Röntgenmallit

Röntgenmalleja ei voi fyysisesti kiinnittää mihinkään laitteeseen.

IFU1102. Titanium-jatkeaihio Nobel Biocare N1™ TCC

| Titanium-jatkeaihio | Kliininen ruuvi | Laboratoriokomponentit | Ruuvinväänin | Kiristysmomentti |
|--|--|---|----------------|------------------|
| Titanium-jatkeaihio Nobel Biocare N1™ TCC NP Ø 10 mm | Kliininen ruuvi Screw Nobel Biocare N1™ TCC NP | Laboratorioruuvi Nobel Biocare N1™ TCC NP Työimplantti Nobel Biocare N1™ TCC NP IOS-työimplantti Nobel Biocare N1™ TCC NP | Omnigrip™ Mini | 20 Ncm |
| Titanium-jatkeaihio Nobel Biocare N1™ TCC RP Ø 10 mm | Kliininen ruuvi Screw Nobel Biocare N1™ TCC RP | Laboratorioruuvi Nobel Biocare N1™ TCC RP Työimplantti Nobel Biocare N1™ TCC RP IOS-työimplantti Nobel Biocare N1™ TCC RP | Omnigrip™ Mini | 20 Ncm |

IFU2001. NobelGuide® -kirurgiset ohjaukiskot ja ohjatut ankkurointipinnit

Tuotteiden, joita on tarkoitus käyttää yhdessä näiden laitteiden kanssa, yhteensopivuus voidaan tarkistaa tuotteisiin tai tuotemerkintöihin merkittyjen värikoodien, mittojen, pituuksien, kiinnitystyyppin ja/tai muiden suorien merkintöjen avulla.

IFU2009. Ohjatut pilottiporasyylinterit, ohjaussyylinterit ja ohjatut ankkurointipinnan sylinterit

Tuotteiden, joita on tarkoitus käyttää yhdessä ohjattujen pilottiporasyylinterien, ohjaussyylinterien ja ohjattujen ankkurointipinnan sylinterien kanssa, yhteensopivuus voidaan tarkistaa tuotteisiin tai tuotemerkintöihin merkittyjen värikoodien, mittojen, pituuksien, kiinnitystyyppin ja/tai muiden suorien merkintöjen avulla.

IFU2011. Nobel Biocaren ohjatut leikkaustyökalut

Ohjattujen leikkaustyökalujen yhteensopivuus

| Tuotenimi | Implantti | Sylinteri | Väänin | Muu |
|--|---|---------------------------------|---|---|
| Guided Drill Guide 6.0/WP Ø 6 to Ø 5 mm | - | Guided Sleeve -sylinteri 6.0/WP | - | Handle for Guided Drill Guide -kahva |
| Guided Drill Guide 6.0/WP - Ø 2.8 mm | | | | |
| Guided Drill Guide 6.0/WP - Ø 2 mm | | | | |
| Guided Drill Guide 6.0/WP - Ø 3.8 mm | | | | |
| Guided Drill Guide 6.0/WP - Ø 3 mm | | | | |
| Guided Drill Guide 6.0/WP - Ø 4.2 mm | | | | |
| Guided Drill Guide NP - Ø 2.8 mm | | Guided Sleeve -sylinteri NP | | |
| Guided Drill Guide NP - Ø 2 mm | | | | |
| Guided Drill Guide NP - Ø 3.2 mm | | | | |
| Guided Drill Guide NP - Ø 3 mm | | | | |
| Guided Drill Guide RP - Ø 3.2 mm | | Guided Sleeve -sylinteri RP | | |
| Guided Drill Guide RP - Ø 2.8 mm | | | | |
| Guided Drill Guide RP - Ø 2 mm | | | | |
| Guided Drill Guide RP - Ø 3.4 mm | | | | |
| Guided Drill Guide RP - Ø 3.6 mm | | | | |
| Guided Drill Guide RP - Ø 3 mm | | | | |
| Guided Drill Guide RP - Ø 4.2 mm | | | | |
| Guided Drill Guide Tapered RP - NP | | | | |
| Guided Drill Guide Tapered 6.0/WP - NP | | Guided Sleeve 6.0/WP | | |
| Guided Drill Guide Tapered 6.0/WP - RP | | | | |
| Guided Drill Guide WP/6.0 - Ø 3.6 mm | | | | |
| Guided Drill Guide WP/6.0 - Ø 4.6 mm | | | | |
| Guided Surgery Implant Mount NobelActive® NP | NobelActive®/NobelActive® TiUltra™ NP | Guided Sleeve -sylinteri NP | Kirurginen väänin | Manuaalinen, kirurginen momenttivääntimen sovitin |
| Guided Surgery Implant Mount NobelActive® RP 4.3 | NobelActive®/NobelActive® TiUltra™ RP 4.3 | Guided Sleeve -sylinteri RP | Manuaalinen/koneellinen ruuvinväänin Unigrip™ | Liitin käsikapaleeseen |
| Guided Surgery Implant Mount NobelActive® RP 5.0 | NobelActive®/NobelActive® TiUltra™ RP 5.0 | Guided Sleeve -sylinteri 6.0/WP | | |
| Guided Surgery Implant Mount NobelActive® WP 5.5 | NobelActive®/NobelActive® TiUltra™ WP 5.5 | | | |

| Tuotenimi | Implantti | Sylinteri | Väännin | Muu |
|--|--------------------------|---------------------------------|--|--|
| Guided Implant Mount Bmk Syst NP | Brånemark System® NP | Guided Sleeve -sylinteri NP | Kirurginen väännin Manuaalinen/koneellinen ruuvinväännin Unigrip™ | Brånemark System® -manuaalinen, kirurginen momenttivääntimen sovitin Liitin käsikapaleeseen |
| Guided Implant Mount Bmk Syst RP | Brånemark System® RP | Guided Sleeve -sylinteri RP | | |
| Guided Implant Mount Bmk Syst WP | Brånemark System® WP | Guided Sleeve -sylinteri 6.0/WP | | |
| Guided Implant Mount NobRpl NP | NobelReplace® NP | Guided Sleeve -sylinteri NP | Kirurginen väännin Manuaalinen/koneellinen ruuvinväännin Unigrip™ | Nobel-Replace®-manuaalinen, kirurginen momenttiavaimen sovitin Liitin käsikapaleeseen |
| Guided Implant Mount NobRpl RP | NobelReplace® RP | Guided Sleeve -sylinteri RP | | |
| Guided Implant Mount NobRpl WP | NobelReplace® WP | Guided Sleeve -sylinteri 6.0/WP | | |
| Guided Implant Mount NobRpl 6.0 | NobelReplace® 6.0 | Guided Sleeve -sylinteri 6.0/WP | Guided Sleeve -sylinteri 6.0/WP | |
| Guided Implant Mount NobelReplace® Conical Connection NP 3.5 | NobelReplace® CC NP | Guided Sleeve -sylinteri NP | Kirurginen väännin Manuaalinen/koneellinen ruuvinväännin Unigrip™ | Nobel-Replace®-manuaalinen, kirurginen momenttiavaimen sovitin Liitin käsikapaleeseen |
| Guided Implant Mount NobelReplace® Conical Connection RP 4.3 | NobelReplace® CC RP | Guided Sleeve -sylinteri RP | | |
| Guided Implant Mount NobelReplace® Conical Connection RP 5.0 | NobelReplace® CC RP 5.0 | Guided Sleeve -sylinteri 6.0/WP | | |
| Guided Implant Mount NobelParallel™ CC NP | NobelParallel™ CC NP | Guided Sleeve -sylinteri NP | Kirurginen väännin Manuaalinen/koneellinen ruuvinväännin Unigrip™ | NobelReplace®-manuaalinen, kirurginen momenttiavaimen sovitin Liitin käsikapaleeseen |
| Guided Implant Mount NobelParallel™ CC RP 4.3 | NobelParallel™ CC RP | Guided Sleeve -sylinteri RP | | |
| Guided Implant Mount NobelParallel™ CC RP 5.0 | NobelParallel™ CC RP 5.0 | Guided Sleeve -sylinteri 6.0/WP | | |
| Guided Implant Mount NobelParallel™ CC WP 5.5 | NobelParallel™ CC WP | Guided Sleeve -sylinteri 6.0/WP | | |
| | | | | |

| Tuotenimi | Implantti | Sylinteri | Väännin | Muu |
|--|---|---------------------------------|--|-----------------------|
| Guided Template Abutm w Screw NobelActive® NP | NobelActive®/NobelActive® TiUltra™ NP | Guided Sleeve -sylinteri NP | Manuaalinen/koneellinen ruuvinväännin Unigrip™ | - |
| Guided Template Abutm w Screw NobelActive® RP 4.3 | NobelActive®/NobelActive® TiUltra™ RP 4.3 | Guided Sleeve -sylinteri RP | | |
| Guided Template Abutm w Screw NobelActive® RP 5.0 | NobelActive®/NobelActive® TiUltra™ RP 5.0 | Guided Sleeve 6.0/WP | | |
| Guided Template Abutm w Screw NobRpl 6.0 | NobelReplace® CC/NobelReplace® CC TiUltra™ 6.0 ja Replace Select™ Tapered TiUnite® 6.0 -implantit | | | |
| Guided Template Abutm w Screw NobRpl NP | NobelReplace® CC/NobelReplace® CC TiUltra™ NP ja Replace Select™ Tapered TiUnite® NP -implantit | Guided Sleeve -sylinteri NP | | |
| Guided Template Abutm w Screw NobRpl RP | NobelReplace® CC/NobelReplace® CC TiUltra™ RP ja Replace Select™ Tapered TiUnite® RP -implantit | Guided Sleeve -sylinteri RP | | |
| Guided Template Abutm w Screw NobRpl WP | NobelReplace® CC/NobelReplace® CC TiUltra™ WP ja Replace Select™ Tapered TiUnite® WP -implantit | Guided Sleeve -sylinteri 6.0/WP | | |
| Guided Template Abutment CC NP | NobelActive®/NobelActive® TiUltra™ NP, NobelParallel™ CC/NobelParallel™ CC TiUltra™ NP, NobelReplace® CC/NobelReplace® CC TiUltra™ NP, NobelReplace® CC PMC NP -implantit | Guided Sleeve -sylinteri NP | | |
| Guided Template Abutment CC NP | NobelReplace® CC/NobelReplace® CC TiUltra™ ja CC PMC NP -implantit | | | |
| Guided Template Abutment CC RP 4.3 | NobelReplace® CC/NobelReplace® CC TiUltra™ ja CC PMC RP 4.3 -implantit | Guided Sleeve -sylinteri RP | | |
| Guided Template Abutment CC RP 5.0 | NobelReplace® CC/NobelReplace® CC TiUltra™ ja CC PMC RP 5.0 -implantit | Guided Sleeve -sylinteri 6.0/WP | | |
| Guided Template Abutment CC WP 5.5 | NobelReplace® CC/NobelReplace® CC TiUltra™ ja CC PMC WP 5.5 -implantit | | | |
| Guided Template Abutment with Screw Brånemark System® NP | Brånemark System® MK III NP ja NobelSpeedy® Groovy NP -implantit | Guided Sleeve -sylinteri NP | | |
| Guided Template Abutment with Screw Brånemark System® RP | Brånemark System® MK III RP ja NobelSpeedy® Groovy RP -implantit | Guided Sleeve -sylinteri RP | | |
| Guided Template Abutment with Screw Brånemark System® WP | Brånemark System® MK III WP ja NobelSpeedy® Groovy WP -implantit | Guided Sleeve -sylinteri 6.0/WP | | |
| Guided Template Abutment with Screw NobelActive® WP 5.5 | NobelActive® /NobelActive® TiUltra™ WP 5.5 | | | |
| Handle for Guided Drill Guide -kahva | - | - | - | Ohjatut poranohjaimet |

Ohjattujen kirurgisten pyörivien instrumenttien yhteensopivuus

| Tuotenimi | Käsikappaleen liitännät |
|---|-------------------------|
| Guided Start Drill/Counterb Bmk Syst NP | EN ISO 1797 |
| Guided Start Drill/Counterbore NobRpl NP | |
| Guided Start Drill/Counterb Bmk Syst RP | |
| Guided Start Drill/Counterbore NobRpl RP | |
| Guided Start Drill/Counterb BmkSyst WP Ø 5 | |
| Guided Start Drill/Counterbore NobRpl WP | |
| Guided Start Drill/Counterb BmkSyst WP Ø 6 | |
| Guided Start Drill/Counterb NobRpl 6.0 | |
| Guided Twist Drill 2x(10+)7-18 mm | |
| Guided Twist Drill 2.8x(10+)7-18 mm | |
| Guided Twist Drill 3x(10+)7-18 mm | |
| Guided Twist Drill 3.2x(10+)7-18 mm | |
| Guided Twist Drill 3.4x(10+)7-18 mm | |
| Guided Twist Drill 3.8x(10+)7-18 mm | |
| Guided Twist Drill 4.2x(10+)7-18 mm | |
| Guided Twist Drill 5x(10+)7-18 mm | |
| Guided Dense Bone Drill Taper NP 3.5x13 mm | |
| Guided Dense Bone Drill Taper NP 3.5x16 mm | |
| Guided Dense Bone Drill Taper RP 4.3x13 mm | |
| Guided Dense Bone Drill Taper RP 4.3x16 mm | |
| Guided Dense Bone Drill Taper WP 5x13 mm | |
| Guided Dense Bone Drill Taper WP 5x16 mm | |
| Guided Dense Bone Drill Taper 6.0 6x13 mm | |
| Guided Dense Bone Drill Taper 6.0 6x16 mm | |
| Guided Screw Tap NP 10-13 mm | |
| Guided Screw Tap RP Ø 3.75 7-13 mm | |
| Guided Screw Tap Tapered RP | |
| Guided Screw Tap WP Ø 5 7-13 mm | |
| Guided Screw Tap Tapered WP | |
| Guided Screw Tap 6.0/WP Ø 6 7-13 mm | |
| Guided Screw Tap Tapered 6.0 | |
| Guided StartDrill/Countb ent. MkIII RP | |
| Guided Screw Tap RP Ø 4 7-13 mm | |
| Guided Twist Drill 3.2x(10+)7-13 mm | |
| Guided Twist Drill 3.4x(10+)7-13 mm | |
| Guided Twist Drill 3.8x(10+)7-13 mm | |
| Guided Twist Drill 4.2x(10+)7-13 mm | |
| Guided Twist Drill 5x(10+)7-13 mm | |
| Guided Twist Step Drill Ø 2.4/2.8 (10+) 7-13 mm | |
| Guided Twist Step Drill Ø 2.8/3.2 (10+) 7-13 mm | |
| Guided Twist Step Drill Ø 3.2/3.6 (10+) 7-13 mm | |
| Guided Twist Step Drill Ø 3.8/4.2 (10+) 7-13 mm | |
| Guided Twist Step Drill Ø 4.2/4.6 (10+) 7-13 mm | |
| Guided Twist Step Drill Ø 2.4/2.8 (10+) 7-18 mm | |
| Guided Twist Step Drill Ø 2.8/3.2 (10+) 7-18 mm | |
| Guided Twist Step Drill Ø 3.2/3.6 (10+) 7-18 mm | |
| Guided Twist Step Drill Ø 3.8/4.2 (10+) 7-18 mm | |
| Guided Screw Tap NobelActive® NP 8.5-10 mm | |
| Guided Screw Tap NobelActive® RP 4.3 8.5-10 mm | |

| |
|---|
| Guided Screw Tap NobelActive® RP 5.0 8.5-10 mm |
| Guided Twist Drill Tapered 2 x (10+) 8-16 mm |
| Guided Start Drill |
| Guided Counterbore NobelReplace® 3.5 |
| Guided Counterbore NobelReplace® 4.3 |
| Guided Counterbore NobelReplace® 5.0 |
| Guided Counterbore NobelReplace® 6.0 |
| Guided Screw Tap Tapered NP |
| Guided Pilot Twist Drill 1.5x(10+)10-15 mm |
| Guided Twist Step Drill 4.2/5.0 (10+) 7-13 mm |
| Guided Twist Step Drill 4.2/5.0 (10+) 7-18 mm |
| Guided Screw Tap NobelActive® WP 5.5 7-8.5 mm |
| Guided Screw Tap NobelActive® WP 5.5 10-15 mm |
| Guided Twist Step Drill Ø 4.2/4.6x(10+)7-18 mm |
| Guided Screw Tap NobelParallel™ CC 3.75 7-10 mm |
| Guided Screw Tap NobelParallel™ CC 3.75 11.5-13 mm |
| Guided Screw Tap NobelParallel™ CC 3.75 15-18 mm |
| Guided Screw Tap NobelParallel™ CC 4.3 7-10 mm |
| Guided Screw Tap NobelParallel™ CC 4.3 11.5-13 mm |
| Guided Screw Tap NobelParallel™ CC 4.3 15-18 mm |
| Guided Screw Tap NobelParallel™ CC 5.0 7-10 mm |
| Guided Screw Tap NobelParallel™ CC 5.0 11.5-13 mm |
| Guided Screw Tap NobelParallel™ CC 5.0 15-18 mm |
| Guided Screw Tap NobelParallel™ CC 5.5 7-10 mm |
| Guided Screw Tap NobelParallel™ CC 5.5 11.5-13 mm |
| Guided Screw Tap NobelParallel™ CC 5.5 11.5-15 mm |
| Guided Tissue Punch NP-sleeve (3.75) |
| Guided Tissue Punch WP-sleeve (5.5) |
| Guided Counterbore NobelParallel™ CC 3.75 |
| Guided Counterbore NobelParallel™ CC 4.3 |
| Guided Counterbore NobelParallel™ CC 5.0 |
| Guided Counterbore NobelParallel™ CC 5.5 |
| Guided Dense Bone Screw Tap NobelActive® NP 8.5-18 mm |
| Guided Dense Bone Screw Tap NobelActive® RP 4.3 8.5-18 mm |
| Guided Dense Bone Screw Tap NobelActive® RP 5.0 8.5-18 mm |
| Guided Dense Bone Screw Tap NobelActive® WP 5.5 7-8.5 mm |
| Guided Dense Bone Screw Tap NobelActive® WP 5.5 10-15 mm |
| Guided Drill Tapered NP |
| Guided Drill Tapered RP |
| Guided Drill Tapered WP |
| Guided Drill Tapered 6.0 |

Seuraavia komponentteja käytetään ohjatuissa kirurgisissa toimenpiteissä, mutta myös muihin käyttötarkoituksiin, joten ne kuvaillaan erillisissä käyttöohjeissa. Saat näistä komponenteista lisätietoja vastaavista käyttöohjeista.

- Unigrip™ Screwdriver -ruuvinväännintä käytetään Unigrip™-liitännällä varustettujen ruuvien manuaaliseen kiristämiseen ja löysäämiseen. Näitä ruuveja käytetään proteettisten hammasrakenteiden kiinnittämiseen Nobel Biocaren hammasimplantteihin. Katso Nobel Biocaren käyttöohjeesta IFU1085 lisätietoja Unigrip™ Screwdriver -ruuvinvääntimestä.
- Ohjatut Guided Anchor Pin -ankkurointipinnit ovat ruostumattomasta teräksestä valmistettuja ohuita puikkoja, jotka viedään lähes vaakasuorasti leukaluuhun ja jotka auttavat kiinnittämään ohjauksikon sille

suunniteltuun paikkaan leikkauksen aikana. Katso Nobel Biocaren käyttöohjeesta IFU2001 lisätietoja Guided Anchor Pin -ankkurointipinneistä.

- Manuaalista Manual Torque Wrench Surgical -momenttiväännintä käytetään Nobel Biocaren implanttien sisäänvientiin ja kiristämiseen vaihtoehtona koneelliselle kiristykselle. Lisätietoja Manual Torque Wrench Surgical -momenttivääntimestä on Nobel Biocaren käyttöohjeessa IFU1098.
- Käsikäyttöinen Manual Torque Wrench Prosthetic -momenttiväännin on tarkoitettu Nobel Biocare -jatkeiden ja -jatkeruuvien kiristämiseen, ja sitä voidaan käyttää vaihtoehtona koneelliselle kiristämiseen. Tietoja proteettisesta Manual Torque Wrench Prosthetic -momenttivääntimestä on Nobel Biocaren käyttöohjeessa IFU1098.
- Proteettisen ruuvinvääntimen Torque Wrench Prosthetic Adapter -sovitinkahvaosaa käytetään Screwdriver Machine Unigrip™ -ruuvinvääntimen ja Omnigrip™ Screwdriver -ruuvinvääntimen yhdistämiseen proteettiseen Manual Torque Wrench Prosthetic -momenttivääntimeen. Lisätietoja proteettisen ruuvinvääntimen Torque Wrench Prosthetic Adapter -sovitinkahvaosasta on Nobel Biocaren käyttöohjeessa IFU1098.
- Connection to Handpiece -liitintä käytetään implantin viejän ja implanttikokoonpanon yhdistämiseen käsikappaleeseen. Lisää tietoja Connection to Handpiece -liitimestä käsikappaleeseen on Nobel Biocaren käyttöohjeessa IFU1090.

IFU3001. NobelProcera® Implant Bar Overdenture -implanttikiskon peittoproteesi

| Yhteensopivat implanttituotesarjat | Saatavilla olevat platformikoot |
|--|---------------------------------|
| NobelActive® | NP, RP, WP |
| NobelActive® TiUltra™ | NP, RP, WP |
| NobelParallel™ Conical Connection | NP, RP, WP |
| NobelParallel™ Conical Connection TiUltra™ | NP, RP, WP |
| NobelReplace® Conical Connection | NP, RP |
| NobelReplace® Conical Connection PMC | NP, RP |
| NobelReplace® Conical Connection TiUltra™ | NP, RP |
| ReplaceSelect™ TC | NP, RP |
| Brånemark System® Mk III TiU | RP |
| NobelSpeedy® | NP/RP/WP |
| NobelZygoma | RP |
| Zygoma Implant | RP |

IFU3002. NobelProcera® Titanium ja Zirconia -implanttisillat

NobelProcera® Titanium- ja Zirconia -implanttisiltojen kanssa yhteensopivat implanttituotesarjat

| Yhteensopivat implanttituotesarjat | Saatavilla olevat platformikoot |
|--|---------------------------------|
| NobelActive® | NP, RP, WP |
| NobelActive® TiUltra™ | NP, RP, WP |
| NobelParallel™ Conical Connection | NP, RP, WP |
| NobelParallel™ Conical Connection TiUltra™ | NP, RP, WP |
| NobelReplace® Conical Connection | NP, RP |

| Yhteensopivat implanttituotesarjat | Saatavilla olevat platformikoot |
|---|---------------------------------|
| NobelReplace® Conical Connection PMC | NP, RP |
| NobelReplace® Conical Connection TiUltra™ | NP, RP |
| ReplaceSelect® TC | NP, RP |
| Brånemark System® Mk III | RP |
| Brånemark System® Mk III TiU | RP |
| NobelSpeedy® Groovy | NP/RP/WP |
| NobelSpeedy® Shorty | NP/RP/WP |
| NobelZygoma | RP |
| Zygoma Implant | RP |

Muut NobelProcera® Titanium- ja Zirconia -implanttisiltojen kanssa yhteensopivat tuotteet

| Tuotesarja | |
|---|---|
| Tuotekuvas | NobelProcera®-implanttisillat Titanium ja Zirconia |
| Työimplantit ja multi-unit-jatkeiden replikat | Työimplantti NobRpl; työimplantti Brånemark System®; työimplantti CC; NP IOS mallityöimplantti CC; Multi-unit-jatke Plus Replica; työjatke Multi-unit Bmk Syst |
| Laboratorioruuvit | Laboratorioruuvi Multi-unit; Laboratorioruuvi CC; Laboratorioruuvi ulkoinen kuusio; Laboratorioruuvi implanttitaso NobRpl; Laboratorioruuvi Multi-unit Bmk Syst; Laboratorioruuvi implanttitaso Bmk Syst; Laboratorioruuvi implanttitaso NobRpl |
| Suoja-analogit | Suoja-analogi Bmk Syst; Suoja-analogi NobRpl; Suoja-analogi Multi-unit; Suoja-analogi M-u Bmk Syst; Suoja-analogi/porahojain CC |

IFU3008. NobelProcera® kulmattu Zirconia-ruuvikanavajatke Nobel Biocaren sisäiseen kartiokiinnitykseen (CC)

Yhteensopivat implanttituotesarjat

| Yhteensopivat implanttituotesarjat | Saatavilla olevat platformikoot |
|--|---------------------------------|
| NobelActive® | NP, RP, WP |
| NobelReplace® Conical Connection | NP, RP |
| NobelReplace® Conical Connection PMC | NP, RP |
| NobelParallel™ Conical Connection | NP, RP, WP |
| NobelActive® TiUltra™ | NP, RP, WP |
| NobelParallel™ Conical Connection TiUltra™ | NP, RP, WP |
| NobelReplace® Conical Connection TiUltra™ | NP, RP |

Muita yhteensopivia tuotteita

| Tuotesarja | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Tuotekuvas | NobelProcera® ASC Zirconia -jatke |
| Työimplantit | Työimplantit kartiokiinnityksellä |
| Laboratorioruuvit | Omnigrip™-laboratorioruuvit CC |
| Ruuvinväännin | Omnigrip™-ruuvinvääntimet |
| Suoja-analogit | Suoja-analogit kartiokiinnityksellä |
| Jatkeen irrotustyökalut | Jatkeen irrotustyökalut Zirconia CC |

IFU3009. NobelProcera® täyden ääriviivan Zirconia -implanttikruunu (Full Contour Zirconia, FCZ) - Nobel Biocaren sisäiseen kartiokiinnitykseen

Yhteensopivat implanttituotesarjat

| Yhteensopiva implanttituotesarja | Saatavilla olevat platformikoot |
|--|---------------------------------|
| NobelActive® | NP, RP, WP |
| NobelReplace® Conical Connection | NP, RP |
| NobelReplace® Conical Connection PMC | NP, RP |
| NobelParallel™ Conical Connection | NP, RP, WP |
| NobelActive® TiUltra™ | NP, RP, WP |
| NobelParallel™ Conical Connection TiUltra™ | NP, RP, WP |
| NobelReplace® Conical Connection TiUltra™ | NP, RP |

Muita yhteensopivia tuotteita

| | Tuotesarja |
|-------------------------|---|
| Tuotekuvaus | NobelProcera® FCZ -implanttikruunu |
| Työimplantit | Työimplantit kartiokiinnityksellä |
| Laboratorioruuvit | Omnigrip™-laboratorioruuvit CC |
| Ruuvinväännin | Omnigrip™-ruuvinvääntimet |
| Suoja-analogit | Suoja-analogit kartiokiinnityksellä |
| Jatkeen irrotustyökalut | Jatkeen irrotustyökalut Zirconia CC |

IFU3010. NobelProcera® Titanium ja NobelProcera® Zirconia -jatkeet

NobelProcera®/Procera® Titanium -jatkeiden yhteensopivuus

Titanium-jatke ja Unigrip™

| Kiinnitys | Platformi | Kliininen ruuvi | Laboratorioruuvi | Ruuvinväännin | Vääntömomentti |
|------------------------|-----------|------------------------------------|--|---------------|----------------|
| Kartiokiinnitys | 3.0 | Kliininen ruuvi CC | Laboratorioruuvi implanttitasolla CC 3.0 | Unigrip™ | 15 Ncm |
| | NP | Kliininen ruuvi CC NP | Laboratorioruuvi CC NP | | 35 Ncm |
| | RP | Kliininen ruuvi CC RP/WP | Laboratorioruuvi CC RP/WP | | |
| | WP | | | | |
| Kolmikorvake | NP | Jatkeruuvi NobelReplace® NP | Laboratorioruuvi implanttitasolla NobRpl NP | | 35 Ncm |
| | RP | Jatkeruuvi NobelReplace® RP/WP/6.0 | Laboratorioruuvi implanttitasolla NobRpl RP/WP/6.0 | | |
| | WP | | | | |
| | 6.0 | | | | |
| Ulkoisen kuusiliitännä | NP | Jatkeruuvi Bmk Syst NP | Laboratorioruuvi CC NP | | 35 Ncm |
| | RP | Jatkeruuvi Bmk Syst RP | Laboratorioruuvi Ulkoinen kuusio RP | | |
| | WP | Jatkeruuvi Bmk Syst WP | Lab Screw Implant Level Bmk Syst WP | | |

NobelProcera®/Procera® Zirconia -jatkeiden yhteensopivuus

Zirconia-jatkeet ja Unigrip™

| Vääntömomentti | Vääntömomentti | Vääntömomentti | Vääntömomentti | Vääntömomentti | Vääntömomentti |
|------------------------|----------------|---|--|----------------|----------------|
| Kartiokiinnitys | NP | Kliininen ruuvi CC NP | Laboratorioruuvi CC NP | Unigrip™ | 35 Ncm |
| | RP | Kliininen ruuvi CC RP/WP | Lab Screw CC RP/WP | | |
| Kolmikorvake | NP | Ruuvi keraaminen jatke NobRpl NP | Laboratorioruuvi implanttitasolla NobRpl NP | | 35 Ncm |
| | RP | Ruuvi keraaminen jatke NobRpl RP/WP/6.0 | Laboratorioruuvi implanttitasolla NobRpl RP/WP/6.0 | | |
| | WP | | | | |
| Ulkoisen kuusiliitännä | NP | Ruuvi keraaminen jatke Bmk Syst NP | Laboratorioruuvi CC NP | | 35 Ncm |
| | RP | Ruuvi keraaminen jatke Bmk Syst RP | Laboratorioruuvi CC RP/WP | | |
| | WP | Ruuvi keraaminen jatke Bmk Syst WP | Laboratorioruuvi Bmk Syst WP | | |

NobelProcera® ACS Titanium -jatkeiden yhteensopivuus

Titanium ASC -jatke ja Omnigrip™

| Kiinnitys | Platformi | Kliininen ruuvi | Laboratorioruuvi | Ruuvinväännin | Vääntömomentti |
|-----------------|-----------|---|--|---------------|----------------|
| Kartiokiinnitys | NP | Omnigrip™ Kliininen ruuvi Titanium CC NP | Omnigrip™ Laboratorioruuvi Titanium CC NP | Omnigrip™ | 35 Ncm |
| | RP | Omnigrip™ Kliininen ruuvi Titanium CC RP/WP | Omnigrip™ Laboratorioruuvi Titanium CC RP/WP | | |
| | WP | | | | |
| Kolmikorvake | NP | Omnigrip™ Kliininen ruuvi Ti Kolmikorvake NP | Omnigrip™ Laboratorioruuvi Ti Kolmikorvake NP | | 35 Ncm |
| | RP | Omnigrip™ Kliininen ruuvi Ti Kolmikorvake RP/WP/6.0 | Omnigrip™ Laboratorioruuvi Ti Kolmikorvake RP/WP/6.0 | | |
| | WP | | | | |
| | 6.0 | | | | |

IFU3012. NobelProcera® Zirconia Crown

NobelProcera® Zirconia Crown -kruunu on erillistuote, joka sementoidaan valmisteltuun luonnonhampaaseen tai jatkeeseen. Käytetyn materiaalin soveltavuus on hoitavan lääkärin vastuulla.

IFU3014. NobelProcera® Zirconia Bridge

NobelProcera® Zirconia Bridge -silta on erillistuote, joka sementoidaan valmisteltuun luonnonhampaaseen tai jatkeisiin. Käytetyn materiaalin soveltavuus on hoitavan lääkärin vastuulla.

IFU3018. NobelProcera® Zirconia Implant Bridge -implanttisilta

| | Kiinnitystyyppi | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|----|----|---|---|--|---|---|----|
| | Ulkoisen kuusiokiinnitys | | | Sisäinen 3-korvake | | | CC | | | MUA | | |
| NobelProcera Implant bridge Zirconia | NP | RP | WP | NP | RP | WP | 6.0 | NP | RP | WP | NP/RP | WP |
| Kliininen sovitin | - | | | | | | | Metallisovitin Implanttisilta Kliininen CC | | | - | |
| Laboratoriosovitin | - | | | | | | | Metallisovitin Implanttisilta Laboratorio CC | | | - | |
| Kliininen ruuvi | Ruuvi keraaminen jatke Brånemark System® | | | | | | | Omnigrip™ Kliininen ruuvi CC | | | Proteettinen ruuvi Multi-unit-jatke Omnigrip™ Mini | |
| Laboratorioruuvi | Laboratorioruuvi Implanttitaso - Ulkoinen kuusio | | | | | | | Omnigrip™ Laboratorioruuvi CC Laboratorioruuvi Implanttitaso Kartiokiinnitys | | | Proteettinen ruuvi Multi-unit-jatke Omnigrip™ Mini | |
| Työimplantit/multi-unit-jatkereplikat | Työimplantti Brånemark System® | | | Työimplantit NobelReplace® | | | Työimplantti Kartiokiinnitys | | | Multi-unit-jatke Plus Replika | Multi-unit-jatke Plus Replica | |
| | Elos Accurate -analogi tulostetulle mallille Ulkoinen kuusio | | | Elos Accurate -analogi tulostetulle mallille Kolmikorvake | | | IOS-malli Työimplantti CC | | | Elos Accurate -analogi tulostetulle mallille Multi-unit | Jatkereplika Multi-unit Bmk Syst | |
| Suoja-analogit | Suoja-analogi Bmk Syst | | | Suoja-analogi NobelReplace® | | | Suoja-analogi/poraohjain CC | | | Suoja-analogi Multi-unit | Suoja-analogi Multi-unit Suoja-analogi M-u Bmk Syst | |
| Multi-unit-jatkeet | Multi-unit-jatke Bmk Syst 17° Multi-unit-jatke Bmk Syst 30° Multi-unit-jatke Bmk Syst Zygoma-jatke Brånemark System® Zygoma Zygoma 17° Brånemark System® Zygoma 17° 45° Multi-unit-jatke Ulkoinen kuusio 60° Multi-unit-jatke Ulkoinen kuusio | | | Multi-unit-jatke NobRpl 17° Multi-unit-jatke NobRpl 30° Multi-unit-jatke NobRpl | | | Multi-unit-jatke Plus Kartioliitääntä 17° Multi-unit-jatke Plus Kartioliitääntä 30° Multi-unit-jatke Plus Kartioliitääntä Multi-unit-jatke XeaI™ Kartioliitääntä 17° Multi-unit-jatke XeaI™ Kartioliitääntä 30° Multi-unit-jatke XeaI™ Kartioliitääntä | | | - | | |
| Implantit | NobelSpeedy® Groovy NobelSpeedy® | Brånemark System® Mk III Brånemark System® Mk III TiUnite® NobelSpeedy® Groovy NobelSpeedy® Zygoma Implant NobelZygoma™ | NobelSpeedy® Groovy NobelSpeedy® Shorty | Replace Select™ TC | | | NobelActive® NobelActive® TiUltra™ NobelParallel™ CC NobelParallel™ CC TiUltra™ NobelReplace® CC NobelReplace® CC PMC NobelReplace® CC TiUltra™ | NobelActive® NobelActive® TiUltra™ NobelParallel™ CC NobelParallel™ CC TiUltra™ NobelReplace® CC NobelReplace® CC PMC NobelReplace® CC TiUltra™ | NobelActive® NobelActive® TiUltra™ NobelParallel™ CC NobelParallel™ CC TiUltra™ | - | | |

IFU3020. NobelProcera® Zirconia N1 Base -alusta

Yhteensopivuus, Nobel Procera® Zirconia NB N1™ Base – proteettinen ruuvi – Nobel Biocare N1™ Base XeaI TCC

| Proteettisen rakenteen tyyppi | Proteettinen ruuvi | Ruuvinväänin | Nobel Biocare N1™ Base XeaI™ TCC Kolmikorvake |
|--|---|----------------|--|
| Nobel Procera® Zirconia Abutment/implanttiruunu NB N1™ Base NP | Proteettinen ruuvi NobelProcera® Zirconia Nobel Biocare N1™ Base NP | Omnigrip™ Mini | Nobel Biocare N1™ Base XeaI™ TCC Kolmikorvake NP |
| Nobel Procera® Zirconia-jatke/implanttiruunu NB N1™ Base RP | Proteettinen ruuvi NobelProcera® Zirconia Nobel Biocare N1™ Base RP | | Nobel Biocare N1™ Base XeaI™ TCC Kolmikorvake RP |

Yhteensopivuus, Nobel Procera® Zirconia NB N1™ Base – laboratorioruuvi – alustareplika

| Proteettisen rakenteen tyyppi | Laboratorioruuvi | Alustareplika Nobel Biocare N1™ Base | IOS-alustareplika Nobel Biocare N1™ Base |
|---|---|--|--|
| Nobel Procera® Zirconia-jatke/implanttiruunu NB N1™ Base NP | Laboratorioruuvi NobelProcera® Zirconia Nobel Biocare N1™ Base NP | Alustareplika Nobel Biocare N1™ Base Kolmikorvake NP | IOS-alustareplika Nobel Biocare N1™ Base Kolmikorvake NP |
| Nobel Procera® Zirconia-jatke/implanttiruunu NB N1™ Base RP | Laboratorioruuvi NobelProcera® Zirconia Nobel Biocare N1™ Base RP | Alustareplika Nobel Biocare N1™ Base Kolmikorvake RP | IOS-alustareplika N1™ Base Kolmikorvake RP |