

Yhteensopivuustiedot

Sisältö

Tuotteen yhteensopivuuden käyttöohje	3
IFU1001. NobelActive® TiUnite™- ja NobelActive® TiUltra™ -implantit	3
IFU1002. NobelParallel™ CC- ja NobelParallel™ CC TiUltra™ -implantit	3
IFU1007. Brånemark System® MkIII TiUnite®, NobelSpeedy®, Twist Drill -porat, Twist Step Drill -porat, upotusporat, Screw Tap -kierreleikkurit	4
IFU1008. NobelReplace® Select™ TC	6
IFU1010. NobelReplace® kartiokiinnitys, NobelReplace® kartiokiinnitys PMC, NobelReplace® kartiokiinnitys TiUltra™	7
IFU1012. Replace Select™ Tapered TiUnite®, Replace Select™ Tapered PMC	7
IFU1016. Peittoruuvit	8
IFU1018. Esteettinen jatke kartioliitännällä/Bmk system®/NobelReplace™, Esteettinen jatke Nobel Biocare N1™ TCC	8
IFU1023. Yleiskäyttöiset alustat ja jatkeet	9
IFU1040. Jatkeen vapautustapit CC	9
IFU1043. Jatkeruuvien irrotustyökalut	9
IFU1048. Kooniset porat, Dense Bone Drill -porat, Screw Tap -kierreleikkurit	10
IFU1050. NobelZygoma™ 45°	10
IFU1051. NobelZygoma™ 0° -implantit	10
IFU1057. Kliiniset ruuvit, jatkeruuvit, proteettiset ruuvit	10
IFU1067. PureSet™-tarjotin	11
IFU1074. On1™-konsepti	11
IFU1075. Multi-unit--jatkeet ja paranemissuojat	13
IFU1085. Ruuvinväntimet	13
IFU1086. Jäljennössylinterit	13
IFU1087. Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC -järjestelmä	14
IFU1088. Nobel Biocare N1™ Base -konsepti	14

IFU1089. Luun reunan viimeistelijät ja luun reunan viimeistelyohjaimet.	15
IFU1090. Uudelleenkäytettävät Nobel Biocare -instrumentit ja -komponentit.	15
IFU1091. Asemapaikantimet.	16
IFU1092. Poranterän syvyysvastesarjat ohjattuihin ja vapaalla kädellä tehtäviin leikkauksiin.	16
IFU1093. Tilapäisjatkeet ja -sylinterit.	18
IFU1094. Paranemisjatkeet, paranemisruuvit.	18
IFU1095. Zygoma-implantti RP.	19
IFU1096. Jatkeiden irrotustyökalut.	20
IFU1097. Implantin irrotustyökalut.	20
IFU1098. Manuaaliset Surgical- ja Prosthetic -momenttivääntimet.	21
IFU1099. Trefoil™ System.	21
IFU1100. Korvaavat Nobel Biocare- osat.	22
IFU1101. Röntgenmallit.	23
IFU1102. Titanium-jatkeaihio Nobel Biocare N1™ TCC.	23
IFU2001. NobelGuide® -kirurgiset ohjauskiskot ja ohjatut ankkurointipinnit.	23
IFU2009. Ohjatut pilottiporasyylinterit, ohjaussyylinterit ja ohjatut ankkurointipinnin sylinterit.	23
IFU2011. Nobel Biocaren ohjatut leikkaustyökalut.	23
IFU3001. NobelProcera® Implant Bar Overdenture -implanttikiskon peittoproteesi.	26
IFU3002. NobelProcera® Titanium ja Zirconia -implanttisillat.	26
IFU3008. NobelProcera® kulmattu Zirconia-ruuvikanavajatk Nobel Biocaren sisäiseen kartiokiinnitykseen (CC)	26
IFU3009. NobelProcera® täyden ääriviivan Zirconia -implanttikruunu (Full Contour Zirconia, FCZ) - Nobel Biocaren sisäiseen kartiokiinnitykseen.	27
IFU3010. NobelProcera® Titanium- ja Zirconia-jatkeet.	27
IFU3012. NobelProcera® Zirconia Crown.	27
IFU3014. NobelProcera® Zirconia Bridge.	27
IFU3018. NobelProcera® Zirconia Implant Bridge -implanttisilta.	28
IFU3020. NobelProcera® Zirconia N1™ Base -alusta.	28

Tuotteen yhteensopivuuden käyttöohje

Nobel Biocarella on erilaisia implantti- tai jatkejärjestelmiä erilaisilla liitännöillä. Jokaisessa implantti- tai jatkejärjestelmässä on vastaavat liitännät, osat ja instrumentit. Katso vastaavien osien ja instrumenttien oikeasta käytöstä vastaavan implantti- tai jatkejärjestelmän käyttöohjeet.

IFU1001. NobelActive® TiUnite™- ja NobelActive® TiUltra™ -implantit

NobelActive® TiUnite™/TiUltra™ -implanteissa on sisäinen kartiokiinnitys (CC), ja niitä on saatavana platformikoissa 3.0, kapea platformi (Narrow Platform, NP), vakioplatformi (Regular Platform, RP) ja leveä platformi (Wide Platform, WP). Implantit ovat yhteensopivia Nobel Biocaren proteettisten komponenttien kanssa, joissa on sisäinen kartiokiinnitys.

	Platformi	Platformin halkaisija	Implantin halkaisija	Jatkeiden liitoskohta	Pituudet	Peittoruuvi
●	3.0	Ø 3,0 mm	Ø 3,0 mm	Ø 2,5 mm	10 mm, 11,5 mm, 13 mm, 15 mm	Ei sisälly pakkaukseen
●	NP	Ø 3,5 mm	Ø 3,5 mm	Ø 3,0 mm	8,5 mm, 10 mm, 11,5 mm, 13 mm, 15 mm, 18 mm	Ei sisälly pakkaukseen
●	RP	Ø 3,9 mm	Ø 4,3 mm	Ø 3,4 mm	8,5 mm, 10 mm, 11,5 mm, 13 mm, 15 mm, 18 mm	Ei sisälly pakkaukseen
●	RP	Ø 3,9 mm	Ø 5,0 mm	Ø 3,4 mm	8,5 mm, 10 mm, 11,5 mm, 13 mm, 15 mm, 18 mm	Ei sisälly pakkaukseen
●	WP	Ø 5,1 mm	Ø 5,5 mm	Ø 4,4 mm	7,0 mm, 8,5 mm, 10 mm, 11,5 mm, 13 mm, 15 mm	Sisältyy vain Nobel Active WP TiUnite® -pakkauksiin

NobelActive® TiUnite®- ja NobelActive® TiUltra™ -implanttien asettamiseen on käytettävä kartiokiinnityksellä varustettuja implanttiväntimiä 3.0/NP/RP/WP. Tietoja implanttiväntimistä on Nobel Biocaren käyttöohjeessa IFU1090.

IFU1002. NobelParallel™ CC- ja NobelParallel™ CC TiUltra™ -implantit

NobelParallel™ CC- ja NobelParallel™ TiUltra™ -implanteissa on sisäinen kartiokiinnitys (CC), ja niitä on saatavana platformikokoina Narrow Platform (NP), Regular Platform (RP) ja Wide Platform (WP). Implantit ovat yhteensopivia Nobel Biocaren proteettisten komponenttien kanssa, joissa on sisäinen kartiokiinnitys.

Platformi	Implantin halkaisija	Jatkeiden liitoskohta	Pituudet	Peittoruuvi	Värikoodaus
NP	Ø 3,75 mm	Ø 3,0 mm	7 mm, 8,5 mm, 10 mm, 11,5 mm, 13 mm, 15 mm, 18 mm	NobelParallel™ CC: sisältyy pakkaukseen NobelParallel™ TiUltra™: ei sisälly pakkaukseen	NobelParallel™ CC: magenta NobelParallel™ TiUltra™: ei platformikohtaista värikoodausta
RP	Ø 4,3 mm	Ø 3,4 mm	7 mm, 8,5 mm, 10 mm, 11,5 mm, 13 mm, 15 mm, 18 mm	NobelParallel™ CC: sisältyy pakkaukseen NobelParallel™ TiUltra™: ei sisälly pakkaukseen	NobelParallel™ CC: keltainen NobelParallel™ TiUltra™: ei platformikohtaista värikoodausta
RP	Ø 5,0 mm	Ø 3,4 mm	7 mm, 8,5 mm, 10 mm, 11,5 mm, 13 mm, 15 mm, 18 mm	NobelParallel™ CC: sisältyy pakkaukseen NobelParallel™ TiUltra™: ei sisälly pakkaukseen	NobelParallel™ CC: keltainen NobelParallel™ TiUltra™: ei platformikohtaista värikoodausta
WP	Ø 5,5 mm	Ø 4,4 mm	7,0 mm, 8,5 mm, 10 mm, 11,5 mm, 13 mm, 15 mm	NobelParallel™ CC: sisältyy pakkaukseen NobelParallel™ TiUltra™: ei sisälly pakkaukseen	NobelParallel™ CC: sininen NobelParallel™ TiUltra™: ei platformikohtaista värikoodausta

NobelParallel™ CC- ja NobelParallel™ CC TiUltra™ -implanttien asettamiseen on käytettävä kartioliitännällä NP/RP/WP varustettua implanttiväntimä. Tietoja implanttiväntimistä on Nobel Biocaren käyttöohjeessa IFU1090.

IFU1007. Brånemark System® MkIII TiUnite®, NobelSpeedy®, Twist Drill -porat, Twist Step Drill -porat, upotusporat, Screw Tap -kierreleikkurit

Tuotenimi	Peittoruuvi	Implanttiväännin	Ruuvit	Jatkeet			Jäljennössylinteri
				Paraneminen	Väliaikainen	Pysyvä	
Brånemark System® Mk III TiU NP	Peittoruuvi Brånemark System® NP	Implanttiväännin NP Brånemark System Implanttiväännin Jakoavaimen sovitin NP	Jatkeruuvi Multi-Unit Kulmallinen Proteettinen ruuvi Multi-unit	Paranemisjatke NP	Välitön tilapäisjatke NP Muovisylinteri Välitön NP Tilapäisjatke NP QuickTemp™-jatke Kartiomainen NP Muovisylinteri QuickTemp™-jatke Kartiomainen NP Tilapäisjatke Kytkevä NP Tilapäisjatke Ei-kytkävä NP Tilapäisjatke Muovinen Kytkevä NP Tilapäisjatke Muovinen Ei-kytkävä NP	Procera-esteettinen jatke NP Esteettinen jatke NP 15° Esteettinen jatke NP Snappy™-jatke NP Yleiskäyttöinen alusta NP GoldAdapt™ Kytkevä NP GoldAdapt™ Ei-kytkävä NP Multi-Unit-jatke NP 17° Multi-unit-jatke NP	Jäljennössylinteri Suljettu tarjotin NP Jäljennössylinteri Avoin tarjotin NP Jäljennössylinteri Avoin tarjotin Multi-unit NP Jäljennössylinteri Suljettu tarjotin Multi-unit NP Jäljennössylinterikisko Suljettu tarjotin Multi-unit NP Tilapäissylinteri Multi-unit Titanium NP Tilapäissylinteri Multi-unit Muovi NP
Brånemark System® Mk III TiU RP	Peittoruuvi Brånemark System® RP	Implanttiväännin RP Brånemark System® Implanttiväännin Jakoavaimen sovitin RP		Paranemisjatke RP	Välitön tilapäisjatke RP Muovisylinteri Välitön tilapäisjatke RP QuickTemp™-jatke Kartiomainen RP Muovisylinteri QuickTemp™-jatke Kartiomainen RP Tilapäisjatke Kytkevä RP Tilapäisjatke Ei-kytkävä RP Tilapäisjatke Muovinen Kytkevä RP Tilapäisjatke Muovinen Ei-kytkävä RP	Procera-esteettinen jatke RP Esteettinen jatke RP 15° Esteettinen jatke RP Snappy™-jatke RP Yleiskäyttöinen alusta RP Yleiskäyttöinen alusta Burn-out-sylinteri RP GoldAdapt™ Kytkevä RP GoldAdapt™ Ei-kytkävä RP Multi-Unit-jatke RP 17° Multi-unit-jatke RP 30° Multi-unit-jatke RP 30° Multi-Unit-jatke Ei-kytkävä RP Paikannusjatke RP Pallojatke Titanium RP	Jäljennössylinteri Suljettu tarjotin RP Jäljennössylinteri Avoin tarjotin RP Jäljennössylinterikisko Brånemark System® RP Jäljennössylinteri Avoin tarjotin Multi-unit RP Jäljennössylinteri Suljettu tarjotin Multi-unit RP Jäljennössylinterikisko Suljettu tarjotin Multi-unit RP Tilapäisjatke Multi-unit Titanium RP Tilapäissylinteri Multi-unit Muovi RP
Brånemark System® Mk III TiU WP	Peittoruuvi Brånemark System® WP	Implanttiväännin WP Brånemark System Implanttiväännin Jakoavaimen sovitin WP	Proteettinen ruuvi Multi-unit	Paranemisjatke WP	Välitön tilapäisjatke WP Muovisylinteri Välitön tilapäisjatke WP QuickTemp™-jatke Kartiomainen WP Muovisylinteri QuickTemp™-jatke Kartiomainen WP Tilapäisjatke Kytkevä WP Tilapäisjatke Ei-kytkävä WP Tilapäisjatke Muovinen Kytkevä WP Tilapäisjatke Muovinen Ei-kytkävä WP	Procera-esteettinen jatke WP Esteettinen jatke WP 15° Esteettinen jatke WP Snappy™-jatke WP Yleiskäyttöinen alusta WP Yleiskäyttöinen alusta Burn-out-sylinteri WP GoldAdapt™ Kytkevä WP GoldAdapt™ Ei-kytkävä WP Multi-unit-jatke WP Paikannusjatke WP	Jäljennössylinteri Suljettu tarjotin WP Jäljennössylinteri Avoin tarjotin WP Jäljennössylinteri Avoin tarjotin Multi-unit WP Jäljennössylinteri Suljettu tarjotin Multi-unit WP Jäljennössylinterikisko Suljettu tarjotin Multi-unit WP Jäljennössylinteri Tilapäisjatke Multi-unit Titanium WP Tilapäissylinteri Multi-unit Muovi WP

Tuotenimi	Peittoruuvi	Implanttiväännin	Ruuvit	Jatkeet			Jäljennössylinteri
				Paraneminen	Väliaikainen	Pysyvä	
NobelSpeedy® Shorty NP	Peittoruuvi Brånemark System® NP	Implanttiväännin NP Brånemark System® Implanttiväännin Jakoavaimen sovitin NP	Jatkeruuvi Multi-Unit Kulmallinen Proteettinen ruuvi Multi-unit	Paranemisjatke NP	Välitön tilapäisjatke NP	Procera-esteettinen jatke NP	Jäljennössylinteri Suljettu tarjotin NP
NobelSpeedy® Groovy NP					Muovisylinteri Välitön NP Tilapäisjatke NP	Esteettinen jatke NP	Jäljennössylinteri Avoin tarjotin NP
					QuickTemp™-jatke Kartiomainen NP	15° Esteettinen jatke NP	Jäljennössylinteri Avoin tarjotin
					Muovisylinteri QuickTemp™-jatke Kartiomainen NP	Snappy™-jatke NP	Multi-unit NP
					Tilapäisjatke Kytkevä NP	Yleiskäyttöinen alusta NP	Jäljennössylinteri Suljettu tarjotin
					Tilapäisjatke Ei-kytkävä NP	Yleiskäyttöinen alusta Burn-out-sylinteri NP	Multi-unit NP
					Tilapäisjatke Muovinen Kytkevä NP	GoldAdapt™ Kytkevä NP	Jäljennössylinterikisko Suljettu tarjotin
					Tilapäisjatke Muovinen Ei-kytkävä NP	GoldAdapt™ Ei-kytkävä NP	Multi-unit NP
						Multi-Unit-jatke NP	Tilapässylinteri Multi-unit Titanium NP
						17° Multi-unit-jatke NP	Tilapässylinteri Multi-unit Muovi NP
						Paikannusjatke NP	
						Kultasylinterikisko Multi-unit (proteettinen ruuvi mukana) NP	
NobelSpeedy® Shorty RP	Peittoruuvi Brånemark System® RP	Implanttiväännin RP Brånemark System Implanttiväännin Jakoavaimen sovitin RP		Paranemisjatke RP	Välitön tilapäisjatke RP	Procera-esteettinen jatke RP	Jäljennössylinteri Suljettu tarjotin RP
NobelSpeedy® Groovy RP					Muovisylinteri Välitön tilapäisjatke RP	Esteettinen jatke RP	Jäljennössylinteri Avoin tarjotin RP
					QuickTemp™-jatke Kartiomainen RP	15° Esteettinen jatke RP	Jäljennössylinterikisko Brånemark System® RP
					Muovisylinteri QuickTemp™-jatke Kartiomainen RP	Snappy™-jatke RP	Brånemark System® RP
					Tilapäisjatke Kytkevä RP	Yleiskäyttöinen alusta RP	Jäljennössylinteri Avoin tarjotin
					Tilapäisjatke Ei-kytkävä RP	Yleiskäyttöinen alusta Burn-out-sylinteri RP	Multi-unit RP
					Tilapäisjatke Muovinen Kytkevä RP	GoldAdapt™ Kytkevä RP	Jäljennössylinteri Suljettu tarjotin
					Tilapäisjatke Muovinen Ei-kytkävä RP	GoldAdapt™ Ei-kytkävä RP	Multi-unit RP
						Multi-Unit-jatke RP	Jäljennössylinterikisko Suljettu tarjotin
						17° Multi-unit-jatke RP	Multi-unit RP
						30° Multi-unit-jatke RP	Tilapäisjatke Multi-unit Titanium RP
						30° Multi-Unit-jatke Ei-kytkävä RP	Tilapässylinteri Multi-unit Muovi RP
						Paikannusjatke RP	
						Pallojatke Titanium RP	
						Kultajatkedikisko Implanttitaso (kliininen ruuvi mukana) RP	
						Kultasylinterikisko Multi-unit (proteettinen ruuvi mukana) RP	
NobelSpeedy® Shorty WP	Peittoruuvi Brånemark System® WP	Implanttiväännin WP Brånemark System Implanttiväännin Jakoavaimen sovitin WP	Proteettinen ruuvi Multi-unit	Paranemisjatke WP	Välitön tilapäisjatke WP	Procera-esteettinen jatke WP	Jäljennössylinteri Suljettu tarjotin WP
NobelSpeedy® Groovy WP					Muovisylinteri Välitön tilapäisjatke WP	Esteettinen jatke WP	Jäljennössylinteri Avoin tarjotin WP
					QuickTemp™-jatke Kartiomainen WP	15° Esteettinen jatke WP	Jäljennössylinteri Avoin tarjotin
					Muovisylinteri QuickTemp™-jatke Kartiomainen WP	Snappy™-jatke WP	Multi-unit WP
					Tilapäisjatke Kytkevä WP	Yleiskäyttöinen alusta WP	Jäljennössylinteri Suljettu tarjotin
					Tilapäisjatke Ei-kytkävä WP	Yleiskäyttöinen alusta Burn-out-sylinteri WP	Multi-unit WP
					Tilapäisjatke Muovinen Kytkevä WP	GoldAdapt™ Kytkevä WP	Jäljennössylinterikisko Suljettu tarjotin
					Tilapäisjatke Muovinen Ei-kytkävä WP	GoldAdapt™ Ei-kytkävä WP	Multi-unit WP
						Multi-Unit-jatke WP	Tilapäisjatke Multi-unit Titanium WP
						Paikannusjatke WP	WP
							Tilapässylinteri Multi-unit Muovi WP

Twist Drill -kierreporat, Twist Step Drill-kierreaskelporat, Brånemark System® -upotusporat ja Screw Tap -kierreleikkurit ovat yhteensopivia käsikappaleliittännän kanssa standardin ISO 1797-1 mukaisesti. Poranterien syvyysvasteita on saatavilla.

IFU1008. NobelReplace® Select™ TC

Tuotenimi	Peittoruuvi	Implanttiväännin	Kliiniset ruuvit	Jatkeet			Jäljennössylinteri	Muu
				Paraneminen	Väliaikainen	Pysyvä		
Replace Select™ TC NP	Paranemisruuvi RplSel TC NP Peittoruuvi NobRpl NP	Implanttiväännin NobRpl NP	Ruuvi Multi-Unit Kulmallinen Jatke NobRpl NP Ruuvi keraaminen jatke NobRpl NP Jatkeruuvi NobelReplace NP	Paranemisjatke NobRpl NP	Tilapäisjatke Kytkevä NobRpl NP Tilapäisjatke Ei-kytkävä NobRpl NP Tilapäisjatke Muovi Kytkevä NobRpl NP Temp Jatke Muovi Ei-kytkävä NobRpl NP Välitön Tilapäisjatke NobRpl NP	Snappy™-jatke NobRpl NP Esteettinen jatke NobRpl NP 15° Esteettinen jatke NobRpl NP Yleiskäyttöinen alusta Kolmikorvake NP GoldAdapt™ Kytkevä NobRpl NP GoldAdapt™ Ei-kytkävä NobRpl NP Multi-unit-jatke NobRpl NP 17° Multi-unit-jatke NobRpl NP Pallojatke Titanium NobRpl NP NobelProcera® Ab Ti NobelReplace® NP w-u NobelProcera® Ab Ti NobelReplace® NP Procera®-jatke Zr NobRpl NP	Jäljennössylinteri Avoin tarjotin NobRpl NP Ø 4,5 mm Jäljennössylinteri Suljettu tarjotin NobRpl NP Jäljennössyl. Sulj. tarjotin Matala profiili NRpl NP Jäljennössylinteri Avoin tarjotin NobRpl NP	PIB IBO Implantinvetäjä kuusio- & kolmikorvake NP/RP 22 mm Luun reunan viimeistelijä ja ohjain NobRpl NP Ø 4,6 Implantin pelastuskaulus Kolmikorvake Ø 3,5
Replace Select™ TC RP	Paranemisruuvi RplSel TC RP Peittoruuvi NobRpl RP	Implanttiväännin NobRpl RP	Ruuvi Multi-Unit Kulmallinen jatke NobRpl RP Ruuvi keraaminen jatke NobRpl RP/WP/6.0 Jatkeruuvi NobRpl RP/WP/6.0	Paranemisjatke NobRpl RP	Tilapäisjatke Kytkevä NobRpl RP Tilapäisjatke Ei-kytkävä NobRpl RP Tilapäisjatke Muovi Kytkevä NobRpl RP Tilapäisjatke Muovi Ei-kytkävä NobRpl RP Välitön Tilapäisjatke NobRpl RP	Snappy™-jatkeet NobRpl RP Esteettinen jatke NobRpl RP 15° Esteettinen jatke NobRpl RP Yleiskäyttöinen alusta Kolmikorvake RP GoldAdapt™ Kytkevä NobRpl RP GoldAdapt™ Ei-kytkävä NobRpl RP Multi-unit-jatke NobRpl RP 30° Multi-unit-jatke NobRpl RP 30° Multi-u-jatke Ei-kytkävä NobRpl RP 17° Multi-unit-jatke NobRpl RP Pallojatke Titanium NobRpl RP NobelProcera® Ab Ti NobelReplace® RP w-u NobelProcera® Ab Ti NobelReplace® RP Procera® Abuttm Zr NobRpl RP	Jäljennössylinteri Suljettu tarjotin NobRpl RP Jäljennössylinteri Suljettu tarjotin Matala profiili NRpl RP Jäljennössylinteri Avoin tarjotin NobRpl RP	PIB IBO Implantinvetäjä kuusio- & Kolmikorvake NP/RP 31 mm Luun reunan viimeistelijä ja ohjain NobRpl RP Ø 5,3 Implantin pelastuskaulus Kolmikorvake Ø 4,3

IFU1010. NobelReplace® kartiokiinnitys, NobelReplace® kartiokiinnitys PMC, NobelReplace® kartiokiinnitys TiUltra™

Tuotenimi	Peittoruuvi	Implanttiväännin	Kliiniset ruuvit	Jatkeet			Jäljennössylinteri	Muu
				Paraneminen	Väliaikainen	Pysyvä		
NobelReplace®-kartiomainen kiinnitys NP	Peittoruuvi CC NP	Implanttiväännin CC NP	Kliininen ruuvi CC NP	Paranemisjatke CC NP	Kapea tilapäisjatke CC NP	Yleiskäyttöinen alusta CC NP	Avoin tarjotin CC NP	Ohjattu implantinasetin NobRpl CC NP
NobelReplace®-kartiomainen kiinnitys PMC NP			Omnigrip™-kliininen ruuvi CC NP	Paranemisjatkесilta NP	Snap-tilapäisjatke CC NP	Esteettinen jatke CC NP	Suljettu tarjotin CC NP	Luun reunan viimeistelyohjain CC NP
NobelReplace®-kartiomainen kiinnitys TiUltra™ NP			On1™-kliininen ruuvi NP	Kapea paranemisjatke CC NP	Tilapäisjatke Ei-kytkävä CC NP	Procera-esteettinen jatke CC NP	Silta Avoin tarjotin CC NP	Ohjauspinni CC NP
			Ruuvi MU Kulmajatke CC NP			Multi-Unit-jatke Plus CC NP (0°/17°/30°)		NobelProcera®:
						On1™-alusta NP		NobelProcera®-jatke Zirconia CC NP
								NobelProcera®-jatke Ti CC NP
								NobelProcera® FCZ -implanttikruunu ASC CC NP
								Implanttisillan restoraatiot (Ti, Zr)
								Kiinteät ja kiinteät siirrettävät kiskot (Ti)
								Metallisovitin CC NP
NobelReplace®-kartiomainen kiinnitys RP	Peittoruuvi CC RP	Implanttiväännin CC RP	Kliininen ruuvi CC RP/WP	Paranemisjatke CC RP	Kapea tilapäisjatke CC RP	Yleiskäyttöinen alusta CC NP	Avoin tarjotin CC RP	Ohjattu implantinasetin NobRpl CC RP
NobelReplace®-kartiomainen kiinnitys PMC RP			Omnigrip™-kliininen ruuvi CC RP/WP	Paranemisjatkесilta RP	Snap-tilapäisjatke CC RP	Esteettinen jatke CC RP	Suljettu tarjotin CC RP	Luun reunan viimeistelijän ohjain CC RP
NobelReplace®-kartiomainen kiinnitys TiUltra™ RP			On1™-kliininen ruuvi RP	Kapea paranemisjatke CC RP	Tilapäisjatke Ei-kytkävä CC RP	Procera-esteettinen jatke CC RP	Silta Avoin tarjotin CC RP	Ohjauspinni CC RP
			Ruuvi MUU-klmajatke CC RP			Multi-Unitjatke-Plus CC RP (0°/17°/30°)		NobelProcera®:
						On1™ Base RP		NobelProcera®-jatke Zirconia CC RP
								NobelProcera®-jatke Ti CC RP
								NobelProcera® FCZ Implanttikruunu ASC CC RP
								Implanttisillan restoraatiot (Ti, Zr)
								Kiinteät ja kiinteät siirrettävät kiskot (Ti)
								Metallisovitin CC RP

IFU1012. Replace Select™ Tapered TiUnite®, Replace Select™ Tapered PMC

Tuotenimi	Peittoruuvi	Implanttiväännin	Kliiniset ruuvit	Jatkeet			Jäljennössylinteri	Muu
				Paraneminen	Väliaikainen	Pysyvä		
Replace Select™ Tapered WP	Peittoruuvi NobRpl NP Paranemisruuvi RplSel TC NP	Implanttiväännin NobRpl NP	Jatkeruuvi NobRpl NP NobelReplace® NP Ruuvi Multi-Unit Kulmallinen Jatke NobRpl NP Ruuvi keraaminen jatke NobRpl NP	Paranemisjatke NobRpl NP	Tilapäisjatke Kytkevä NobRpl NP Tilapäisjatke Ei-kytkävä NobRpl NP Välitön Tilapäisjatke NobRpl NP Muovi/Tilapäisjatke Esteettinen jatke Muovi/Temp -sylinteri 15° Esteettinen Ab NP	Snappy-jatke NobRpl NP Esteettinen jatke NobRpl NP 15° Esteettinen jatke NobRpl NP Yleiskäyttöinen alusta Kolmikorvake NP Yleiskäyttöinen alusta Burn-out-sylinteri NP/RP GoldAdapt™ Kytkevä NobRpl NP GoldAdapt™ Ei-kytkävä NobRpl NP Multi-unit-jatke NobRpl NP 17° Multi-unit-jatke NobRpl NP Paikallistamisjatke 3.5 RPL Val.impl. Pallojatke Titanium NobRpl NP NobelProcera® Ab Ti NobelReplace® NP Procera®-jatke Zr NobRpl NP	Jäljennössylinteri Avoin tarjotin NobRpl NP	PIB IBO Luun reunan viimeistelijä ja ohjain NobRpl NP Luun reunan viimeistelyohjain NobelReplace® NP Implantinvetäjä Instr kuusio- & Kolmikorvake NP/RP Implantin pelastuskaulus Kolmikorvake Ø 3,5
Replace Select™ Tapered RP	Peittoruuvi NobRpl RP Paranemisruuvi RplSel TC RP	Implanttiväännin NobRpl RP	Jatkeruuvi NobRpl RP/WP/6.0 Ruuvi Multi-Unit Kulmallinen Jatke NobRpl RP Ruuvi keraaminen jatke NobRpl RP/WP/6.0	Paranemisjatke NobRpl RP	Tilapäisjatke Kytkevä NobRpl RP Tilapäisjatke Ei-kytkävä NobRpl RP Välitön Tilapäisjatke NobRpl RP	Snappy-jatke NobRpl RP Esteettinen jatke NobRpl RP 15° Esteettinen jatke NobRpl RP Yleiskäyttöinen alusta Kolmikorvake RP Yleiskäyttöinen alusta Burn-out-sylinteri NP/RP GoldAdapt™ Kytkevä NobRpl RP GoldAdapt™ Ei-kytkävä NobRpl RP Multi-unit-jatke NobRpl RP 17° Multi-unit-jatke NobRpl RP 30° Multi-unit-jatke NobRpl RP Paikallistamisjatke 4,3 RPL Val.impl. Pallojatke Titanium NobRpl RP 3 mm NobelProcera® Ab Ti NobelReplace® RP Procera®-Jatke Zr NobRpl RP	Implantinvetäjä Instr kuusio- & Kolmikorvake NP/RP	PIB IBO Luun reunan viimeistelyohjain NobelReplace® RP Luun reunan viimeistelijä ja ohjain NobRpl RP Implantinvetäjä Instr kuusio- & Kolmikorvake NP/RP Implantin pelastuskaulus Kolmikorvake Ø 4,3

Tuotenimi	Peittoruuvi	Implanttiväännin	Kliiniset ruuvit	Jatkeet			Jäljennössylinteri	Muu
				Paraneminen	Väliaikainen	Pysyvä		
Replace Select™ Tapered WP	Peittoruuvi NobRpl WP	Implanttiväännin NobRpl WP	Ruuvi keraaminen jatke NobRpl RP/ WP/6.0	Paranemisjatke NobRpl WP	Tilapäisjatke Kytkevä NobRpl WP Tilapäisjatke Ei- kytkevä NobRpl WP Temp Jatke Muovi Ei- kytkevä NobRpl WP Välitön Tilapäisjatke NobRpl WP Muovi/Temp Cop Esteettinen Ab NobRpl WP Pl/Temp -sylinteri 15° Esteettinen Ab NobRpl WP	Snappy-jatke NobRpl WP Esteettinen jatke NobRpl WP 15° Esteettinen jatke NobRpl WP Yleiskäyttöinen alusta Burn-out-sylinteri WP Yleiskäyttöinen alusta Kolmikorvake WP GoldAdapt™ Ei-kytkevä NobRpl WP GoldAdapt™ Kytkevä NobRpl WP Multi-unit-jatke NobRpl WP Paikallistamisjatke RPL Val.impl. NobelProcera® Ab Ti NobelReplace® WP Procera®-Jatke Zr NobRpl WP	Jäljennössylinteri Avoin tarjotin NobRpl WP	PIB IBO Luun reunan viimeistelijä NobelReplace® WP Luun reunan viimeistelijä ja ohjain NobRpl WP Ø 6,5 Implantinvetäjä CC RP & Kolmikorvake WP Implantinvetäjä CC RP & Kolmikorvake WP & TCC RP
Replace Select™ Tapered 6.0	Peittoruuvi NobRpl 6.0 mm	Implanttiväännin NobRpl 6.0	Ruuvi keraaminen jatke NobRpl RP/ WP/6.0	Paranemisjatke NobRpl RP 6.0	Tilapäisjatke Muovi Kytkevä NobRpl RP 6.0 Tilapäis Jatke Muovi Ei-kytkevä NobRpl RP 6.0 Tilapäisjatke Kytkevä NobRpl 6.0 Tilapäisjatke Ei- kytkevä NobRpl 6.0 Välitön Tilapäisjatke NobRpl RP 6.0	Snappy-jatke NobRpl RP 6.0 Esteettinen jatke NobRpl 6.0 15° Esteettinen jatke NobRpl 6.0 GoldAdapt™ Ei-kytkevä NobRpl 6.0 GoldAdapt™ Kytkevä NobRpl 6.0 NobelProcera® Ab Ti NobelReplace® 6.0 Procera®-jatke Zr NobRpl 6.0	Jäljennössylinteri Avoin tarjotin NobRpl 6.0	PIB IBO Luun reunan viimeistelijän ohjain NobRpl 6.0 Luun reunan viimeistelijä ja ohjain NobRpl 6.0 Ø 7 Implantinvetäjä Kolmikorvake 6.0 22 mm

IFU1016. Peittoruuvit

Peittoruuvi	Kiinnitystyyppi	Implantin platformi	Implanttijärjestelmä	Ruuvinväännin
Peittoruuvi Brånemark System® NP	Ulkoinen kuusiokiinnitys	NP	Brånemark System® NobelSpeedy® Groovy	Peittoruuvinvään- nin Brånemark System Hexagon (IFU1085)
Peittoruuvi Brånemark System® RP		RP	Brånemark System® NobelSpeedy® Groovy NobelZygoma™ 0°	
Peittoruuvi Brånemark System® WP		WP	Brånemark System® NobelSpeedy® Groovy	
Peittoruuvi Kartiokiinnitys 3.0	Kartiokiinnitys	3.0	NobelActive®	Unigrip™ (IFU1085)
Peittoruuvi Kartiokiinnitys NP		NP	NobelActive® NobelParallel™ CC NobelReplace® CC	
Peittoruuvi Kartiokiinnitys RP		RP	NobelActive® NobelParallel™ CC NobelReplace® CC Trefoil™-järjestelmät	
Peittoruuvi Kartiokiinnitys WP		WP	NobelActive® NobelParallel™ CC NobelReplace® CC	
Peittoruuvi Nobel Biocare N1™ TCC NP	Triovaali kartiokiinnitys	NP	Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC	Omnigrip™ Mini (IFU1085)
Peittoruuvi Nobel Biocare N1™ TCC RP		RP	Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC	
Peittoruuvi NobelReplace® NP	Sisäinen 3-korvake	NP	NobelReplace® Tapered Groovy, ReplaceSelect™	Unigrip™ (IFU1085)
Peittoruuvi NobelReplace® RP		RP		
Peittoruuvi NobelReplace® WP		WP		
Peittoruuvi NobelReplace® 6.0 mm		6.0		

IFU1018. Esteettinen jatke kartoliitännällä/Bmk system®/ NobelReplace™, Esteettinen jatke Nobel Biocare N1™ TCC

Esteettinen jatke	Kiinnitystyyppi	Kliininen ruuvi	Värikoodi	Ruuvin- väännin	Muovinen/ väliaikainen sylinteri
Esteettinen jatke Kartiokiinnitys 3.0	Kartiokiinnitys	Kliininen ruuvi Kartiokiinnitys 3.0	Ei mitään	Unigrip™	–
Esteettinen jatke Kartiokiinnitys NP	Kartiokiinnitys	Kliininen ruuvi Kartiokiinnitys NP	●	Unigrip™	–
Esteettinen jatke Kartiokiinnitys RP	Kartiokiinnitys	Kliininen ruuvi Kartiokiinnitys RP/WP	●	Unigrip™	–
Esteettinen jatke Kartiokiinnitys WP	Kartiokiinnitys	Kliininen ruuvi Kartiokiinnitys RP/WP	●	Unigrip™	–
Esteettinen jatke Bmk System NP	Ulkoinen kuusiokiinnitys	Jatkeruuvi Brånemark System® NP	Ei mitään	Unigrip™	Muovi/Tila- päässylinteri Esteettinen jatke
Esteettinen jatke Bmk System RP	Ulkoinen kuusiokiinnitys	Jatkeruuvi Brånemark System® RP	Ei mitään	Unigrip™	Muovi/Tila- päässylinteri Esteettinen jatke
Esteettinen jatke Bmk System WP	Ulkoinen kuusiokiinnitys	Jatkeruuvi Brånemark System® WP	Ei mitään	Unigrip™	Muovi/Tila- päässylinteri Esteettinen jatke
Esteettinen jatke NobelReplace® NP	Kolmikorvake	Jatkeruuvi NobelReplace® NP	●	Unigrip™	Muovi/Tila- päässylinteri Esteettinen jatke
Esteettinen jatke NobelReplace® RP	Kolmikorvake	Jatkeruuvi NobelReplace® RP/WP/6.0	●	Unigrip™	Muovi/Tila- päässylinteri Esteettinen jatke
Esteettinen jatke NobelReplace® WP	Kolmikorvake	Jatkeruuvi NobelReplace® RP/WP/6.0	●	Unigrip™	Muovi/Tila- päässylinteri Esteettinen jatke

Esteettinen jatke	Kiinnitystyyppi	Kliininen ruuvi	Värikoodi	Ruuvinväänin	Muovinen/väliaikainen sylinteri
Esteettinen jatke NobelReplace® 6.0	Kolmikorvake	Jatkeruuvi NobelReplace® RP/WP/6.0	●	Unigrip™	Muovi/Tilapäässylinteri Esteettinen jatke
Esteettinen jatke Nobel Biocare N1™ TCC NP	Triovaali kartiokiinnitys	Kliininen ruuvi Nobel Biocare N1 TCC NP	● (ruuvi)	Omnigrip™ Mini	–
Esteettinen jatke Nobel Biocare N1™ TCC RP	Triovaali kartiokiinnitys	Kliininen ruuvi Nobel Biocare N1 TCC RP	● (ruuvi)	Omnigrip™ Mini	–

IFU1023. Yleiskäyttöiset alustat ja jatkeet

Yleiskäyttöinen alusta/abutmentti - kiinnitystyyppi	Sopivat platformit	Sopivat marginaalikorkeudet	Kiristysen vääntömomentti	Ruuvinväänin
Kartiokiinnitys (CC)	NP RP WP	1,5 mm 3,0 mm	35 Ncm	Unigrip™
Triovaali kartiokiinnitys (TCC)	NP RP	1,5 mm 3,0 mm	20 Ncm	Omnigrip™ mini
Kolmikorvake	NP RP WP	1,5 mm 3,0 mm	35 Ncm	Unigrip™
Ulkoinen kuusiokiinnitys	NP RP WP	1,5 mm 3,0 mm	35 Ncm	Unigrip™

IFU1040. Jatkeen vapautustapit CC

Jatke	Jatkeen vapautustappi CC 3.0	Jatkeen vapautustappi CC NP	Jatkeen vapautustappi CC RP/WP
Tilapäisjatke Kytkevä Kartiokiinnitys	✓	-	-
Esteettinen jatke Kartiokiinnitys	✓	-	-
GoldAdapt™ Kytkevä Kartiokiinnitys	✓	-	-
NobelProcera®-jatke Zirconia Kartiokiinnitys	-	✓	✓

IFU1043. Jatkeruuvien irrotustyökalut

Instrumentti	Kiinnitystyyppi	Platformi	Laiteinstrumenttien kahva/Proteettinen momenttiavaimen sovitin	Käsikappale (standardin DIN EN ISO 1797 mukainen)
Jatkeruuvi irrotin 3.0	Kartiokiinnitys, ulkoinen kuusiokiinnitys	3.0	–	X
Jatkeruuvien irrotin NP	ja sisäinen kolmikorvake	NP	–	X
Jatkeruuvi irrotin RP/WP/6.0	Triovaali kartiokiinnitys (vain platformit NP ja RP)	RP	–	X
		WP	–	X
		6.0	–	X

Instrumentti	Kiinnitystyyppi	Platformi	Laiteinstrumenttien kahva/Proteettinen momenttiavaimen sovitin	Käsikappale (standardin DIN EN ISO 1797 mukainen)
Jatkeruuvi Retrieval Reverse Drill -pora 3.0/NP	Kartiokiinnitys, ulkoinen kuusiokiinnitys ja sisäinen kolmikorvake	3.0 NP	– –	X X
Jatkeruuvi Retrieval Reverse Drill -pora RP/WP/6.0		RP WP 6.0	– – –	X X X
Jatkeruuvi Retrieval Reverse Drill -pora CC 3.0/NP ja TCC NP/RP	Kartiokiinnitys, ulkoinen kuusiokiinnitys ja sisäinen kolmikorvake	3.0 NP RP WP 6.0	– – – – –	X X X X X
	Triovaali kartiokiinnitys	NP RP	– –	X X
Rescue Drill Guide -ohjain Peittoruuvi Kartiokiinnitys 3.0	Kartiokiinnitys	3.0	–	–
Rescue Drill Guide -ohjain Kartiokiinnitys NP		NP	–	–
Rescue Drill Guide -ohjain Kartiokiinnitys RP		RP	–	–
Rescue Drill Guide -ohjain Kartiokiinnitys WP		WP	–	–
Rescue Drill Guide -ohjain Ulkoinen kuusioliittävä NP	Ulkoinen kuusiokiinnitys	NP	–	–
Rescue Drill Guide -ohjain Ulkoinen kuusioliittävä RP		RP	–	–
Rescue Drill Guide -ohjain Ulkoinen kuusio WP		WP	–	–
Rescue Drill Guide -ohjain Kolmikorvakkeinen NP	Sisäinen 3-korvake	NP	–	–
Rescue Drill Guide -ohjain Kolmikorvakkeinen RP		RP	–	–
Rescue Drill Guide -ohjain Kolmikorvakkeinen WP		WP	–	–
Rescue Drill Guide -ohjain Kolmikorvake 6.0		6.0	–	–
Rescue Drill Guide Nobel Biocare N1™ TCC NP	Triovaali kartiokiinnitys	NP	–	–
Rescue Drill Guide Nobel Biocare N1™ TCC RP		RP	–	–
Jatkeruuvien irrotustyökalu 3.0/NP	Kartiokiinnitys, ulkoinen kuusiokiinnitys ja sisäinen kolmikorvake	3.0 NP	X X	X X
Jatkeruuvien irrotustyökalu RP/WP/6.0		RP WP 6.0	X X X	X X X

Instrumentti	Kiinnitystyyppi	Platformi	Laiteinstrumenttien kahva/Proteettinen momenttiavaimen sovitin	Käsikappale (standardin DIN EN ISO 1797 mukainen)
Jatkeruuvien irrotustyökalu CC 3,0/NP ja TCC NP/RP	Kartiokiinnitys, ulkoinen kuusiokiinnitys ja sisäinen kolmikorvake	3.0	X	X
		NP	X	X
		RP	X	X
		WP	X	X
		6.0	X	X
	Triovali kartiokiinnitys	NP	X	X
	RP	X	X	
Kierrelleikkurin korjain M1.4	Kartiokiinnitys	3.0	–	X
Kierrelleikkurin korjain M1.6	Kartiokiinnitys Ulkoinen kuusiokiinnitys	NP	–	X
Kierrelleikkurin korjain M1.8	Sisäinen 3-korvake	NP	–	X
Kierrelleikkurin korjain M2.0	Kartiokiinnitys	RP	–	X
		WP	–	X
	Sisäinen 3-korvake	RP	–	X
		WP	–	X
		6.0		X
	Ulkoinen kuusiokiinnitys	RP	–	X
Kierrelleikkurin korjain M2.5	Ulkoinen kuusiokiinnitys	WP	–	X
Screw Tap Repair Tool Nobel Biocare N1™ TCC NP	Triovali kartiokiinnitys	NP	–	X
Screw Tap -kierrelleikkurin korjain Nobel Biocare N1™ TCC RP		RP	–	X
Nobel Biocare N1™ -alustaruuvien irrotustyökalu NP/RP		NP/RP	X	–

IFU1048. Kooniset porat, Dense Bone Drill -porat, Screw Tap -kierrelleikkurit

Kooniset porat, Dense Bone Drill -porat ja Screw Tap -kierrelleikkurit, sekä kertakäyttöiset että uudelleen käytettävät, sopivat käytettäväksi seuraavan kanssa:

käsikappale, standardin ISO 1797 tyyppin 1 mukaisesti.

Porajatkkeet

Porasarjan 7–15 yhteensopivuus esitetään seuraavassa taulukossa.

Porasarja 7–15 mm	Sarjaan kuuluvat osat	Yhteensopivuus
	Guide Drill -ohjainpora	Handpiece-käsikappale, ISO 1797 tyyppi 1
	Twist Drill w Tip 2 x 7–15 mm	Drill Stop -poranterän syvyysvaste 2 mm Handpiece-käsikappale, ISO 1797 tyyppi 1
	Twist Step Drill 2.4/2.8 7–15 mm	Drill Stop -poranterän syvyysvaste 2,8 mm Handpiece-käsikappale, ISO 1797 tyyppi 1

IFU1050. NobelZygoma™ 45°

- Tämän implantin kanssa on käytettävä proteettista Brånemark System® Zygoma TiUnit® -valikoimaa lyhyemmän jatkeruuvien vuoksi.
- Lisätietoja Multi-unit-jatkeista ja yhteensopivista proteettisista komponenteista on Nobel Biocaren käyttöohjeessa IFU1075.

IFU1051. NobelZygoma™ 0° -implantit

- Tämän implantin kanssa on käytettävä proteettista Brånemark System® -jatkevalikoimaa. Lisäksi saatavana on erityisiä 45°/60° Multi-unit-jatkeita.
- Zygoma Handle -kahva kiinnittyy Implanttiväänin Jakoavaimen sovitin RP -liittimiin ja sen avulla Zygoma-implantti otetaan pakkauksesta ja asetetaan porauskuoppaan.
- Lisätietoja Multi-unit-jatkeista ja yhteensopivista proteettisista komponenteista on Nobel Biocaren käyttöohjeessa IFU1075.

IFU1057. Kliiniset ruuvit, jatkeruuvit, proteettiset ruuvit

Kliininen / jatke- / proteettinen ruuvi	Jatke/runko	Ruuvinväänin
Kliininen ruuvi CC	Yleiskäyttöinen alusta CC Esteettinen jatke CC Tilapäisjatke CC NobelProcera® Jatke Ti CC NobelProcera® Jatke Zr CC NobelProcera® Implanttisilta Ti CC NobelProcera® Implanttisilta Zr CC NobelProcera® Implanttikiskon peittoproteesi CC Snappy™-jatke CC GoldAdapt™ CC Procera Esteettinen jatke CC Kapeaprofiilinen jatke CC	Unigrip™
Omnigrip™ Kliininen ruuvi CC	NobelProcera® Kulmattu ruuvikanava -jatke Zr CC Zr CC NobelProcera® HT ML FCZ -implanttikruunu CC NobelProcera® HT ML FCZ Implanttisilta CC NobelProcera® Zirconia Implanttisilta CC	Omnigrip™
Kliininen ruuvi Nobel Biocare N1™ TCC	Yleiskäyttöinen jatke TCC 17°/30° Multi-unit-jatke Xcal™ TCC Tilapäisjatke TCC Paranemisjatke TCC Esteettinen jatke Nobel Biocare N1™ TCC Titanium-jatkeahio Nobel Biocare N1™ TCC	Omnigrip™ Mini
Jatkeruuvi NobelReplace®	Yleiskäyttöinen alusta Kolmikorvake Esteettinen jatke NobelReplace® Tilapäisjatke NobelReplace® NobelProcera® -jatke Ti NobelReplace® NobelProcera® Implanttisilta Ti NobelReplace® NobelProcera® Implanttikiskon peittoproteesi NobelReplace® Snappy™-jatke NobelReplace® GoldAdapt™ NobelReplace® Kultajatkkeisko NobelReplace® Kapeaprofiilinen jatke NobelReplace®	Unigrip™

Kliininen / jatke- / proteettinen ruuvi	Jatke/runko	Ruuvinväännin
Ruuvi keraaminen jatke NobelReplace®	NobelProcera®-jatke Zr NobelReplace® NobelProcera® HT ML FCZ -implanttisilta NobelReplace® NobelProcera® Zirconia- implanttisilta NobelReplace® Procera®-esteettinen jatke NobelReplace®	Unigrip™
Jatkeruuvi Brånemark System®	Yleiskäyttöinen alusta Ulkoinen kuusio Esteettinen jatke Brånemark System® Tilapäisjatke Brånemark System® NobelProcera® Jatke Ti Brånemark System® NobelProcera® Implanttisilta Ti Brånemark System® NobelProcera® Implanttikisko Peittoptpteesi Brånemark System® Snappy™-jatke Brånemark System® GoldAdapt™ Brånemark System® Kultajatke Brånemark System® CeraOne-jatke Brånemark System®	Unigrip™
Keraamisen abutmentin ruuvi, Brånemark System®	NobelProcera®-jatke Zr Brånemark System® NobelProcera® HT ML FCZ Implanttisilta Brånemark System® NobelProcera® Zirconia Implanttisilta Brånemark System® Procera® Esthetic Abutment Brånemark System®	Unigrip™
Ruuvi Multi-unit Kulmallinen jatke CC	17°/30° Multi-unit-jatke CC	Unigrip™
Kliininen ruuvi Multi-unit-jatke Nobel Biocare N1™ TCC	Suora Multi-unit-jatke Xeal™ TCC	Multi-unit
Multi-unit-ruuvi Kulmallinen jatke NobelReplace®	17°/30° Multi-unit-jatke NobelReplace®	Unigrip™
Multi-unit-ruuvi Kulmallinen Jatke Brånemark System®	17°/30° Multi-unit-jatke Brånemark System®	Unigrip™

Kliininen / jatke- / proteettinen ruuvi	Jatke/runko	Ruuvinväännin
Proteettinen ruuvi Multi-unit-jatke Omnigrip™ Mini	Tilapäissylinteri Multi-unit-jatke NobelProcera® Implanttisilta Ti Multi-unit NobelProcera® Implanttisilta Zr Multi-unit NobelProcera® Implanttikiskoiteproteesi Multi-unit NobelProcera® HT ML FCZ Implanttisilta Multi-unit Kultasylinteri Multi-unit	Unigrip™
Proteettinen ruuvi Multi-unit-jatke Omnigrip™ Mini	NobelProcera® Zirconiam-iplanttisilta Multi-unit	Omnigrip™ Mini
NobelZygoma 0° Kulmallinen Multi-unit-jatkeruuvi	45°/60° Multi-unit-jatke Ulkoinen kuusio	Unigrip™
Brånemark System® Zygoma -jatkeruuvi	NobelProcera® Implanttisilta Zygoma	Unigrip™
Brånemark System® Zygoma Angled Multi-unit Abut Screw	17° Multi-unit-jatke Brånemark System® Zygoma	Unigrip™
Omnigrip™-kliininen ruuvi Titanium (CC ja kolmikorvake)	Nobel Procera® Titanium-jatke ASC (CC ja kolmikorvake)	Omnigrip™

IFU1067. PureSet™-tarjotin

PureSet™ Tray -tarjottimesta on saatavilla useita, erilaisiin Nobel Biocaren kirurgisiin ja proteettisiin toimenpiteisiin sopivia versioita. Erilaisten tarjottimien kanssa yhteensopivat työkalut ja komponentit on määriteltä vastaavissa seinätauluissa. Paikalliselta Nobel Biocare -myyntipisteeltä saa lisätietoja seinätauluista.

IFU1074. On1™-konsepti

Tuotenimi	Implantti	Jatke	Ruuvi	Väännin
On1™-alusta CC NP 1,75 mm	Implantit, joissa on sisäinen kartiokiinnitys: – NobelActive® – NobelActive® TiUltra™ – NobelReplace® CC – NobelReplace® CC TiUltra™ – NobelParallel™ CC – NobelParallel™ CC TiUltra™	On1™-tilapäisjatke Kytkevä	On1™-kliininen ruuvi 1,75 mm NP	On1™-ruuvinväännin
On1™-alusta CC NP 2,5 mm		On1™-tilapäisjatke Ei-kytkävä	On1™-kliininen ruuvi 2,5 mm NP	
On1™-alusta CC RP 1,75 mm		On1™-yleiskäyttöinen jatke	On1™-kliininen ruuvi 1,75 mm RP	
On1™-alusta CC RP 2,5 mm		On1™-yleiskäyttöinen jatke Ei-kytkävä	On1™-kliininen ruuvi 2,5 mm RP	
On1™-alusta CC WP 1,75 mm		On1™-esteettinen jatke	On1™-kliininen ruuvi 1,75 mm WP	
On1™-alusta CC WP 2,5 mm			On1™-kliininen ruuvi 2,5 mm WP	
On1™-yleiskäyttöinen jatke 0,3 mm NP	-	On1™ Base -alusta	On1™-proteettinen ruuvi	Unigrip™- ruuvinväännin
On1™-yleiskäyttöinen jatke 1,25 mm NP		On1™ Base Xeal -alusta	On1™-proteettinen laboratorioruuvi	
On1™-yleiskäyttöinen jatke 0,3 mm RP				
On1™-yleiskäyttöinen jatke 1,25 mm RP				
On1™-yleiskäyttöinen jatke 0,3 mm WP				
On1™-yleiskäyttöinen jatke 1,25 mm WP				
On1™-esteettinen jatke Titanium 0,3 mm NP	-	On1™ Base -alusta	On1™-proteettinen ruuvi	Unigrip™- ruuvinväännin
On1™-esteettinen jatke Titanium 0,3 mm RP		On1™ Base Xeal -alusta	On1™-proteettinen laboratorioruuvi	
On1™-esteettinen jatke Titanium 0,3 mm WP				
On1™ Base Xeal™ CC NP 1,75 mm	Implantit, joissa on sisäinen kartiokiinnitys: – NobelActive® – NobelActive® TiUltra™ – NobelReplace® CC – NobelReplace® CC TiUltra™ – NobelParallel™ CC – NobelParallel™ CC TiUltra™	On1™-tilapäisjatke Kytkevä	On1™-kliininen ruuvi 1,75 mm NP	On1™-ruuvinväännin
On1™ Base Xeal™ CC NP 2,5 mm		On1™-tilapäisjatke Ei-kytkävä	On1™-kliininen ruuvi 2,5 mm NP	
On1™ Base Xeal™ CC RP 1,75 mm		On1™-yleiskäyttöinen jatke	On1™-kliininen ruuvi 1,75 mm RP	
On1™ Base Xeal™ CC RP 2,5 mm		On1™-yleiskäyttöinen jatke Ei-kytkävä	On1™-kliininen ruuvi 2,5 mm RP	
On1™ Base Xeal™ CC WP 1,75 mm		On1™-esteettinen jatke	On1™-kliininen ruuvi 1,75 mm WP	
On1™ Base Xeal™ CC WP 2,5 mm			On1™-kliininen ruuvi 2,5 mm WP	

Tuotenimi	Implantti	Jatke	Ruuvi	Väännin
On1™-yleiskäyttöinen jatke Ei-kytkävä NP 0,3 mm	-	On1™ Base -alusta On1™ Base Xeal -alusta	On1™-proteettinen ruuvi On1™-proteettinen laboratorioruuvi	Unigrip™-ruuvinväännin
On1™-yleiskäyttöinen jatke Ei-kytkävä NP 1,25 mm				
On1™-yleiskäyttöinen jatke Ei-kytkävä RP 0,3 mm				
On1™-yleiskäyttöinen jatke Ei-kytkävä RP 1,25 mm				
On1™ Yleiskäyttöinen jatke Ei-kytkävä WP 0,3 mm				
On1™ Yleiskäyttöinen jatke Ei-kytkävä WP 1,25 mm				
On1™-paranemissuoja NP 1,5 mm	-	On1™ Base -alusta On1™ Base Xeal -alusta	On1™-proteettinen ruuvi	Unigrip™-ruuvinväännin
On1™-paranemissuoja NP 2,5 mm				
On1™-paranemissuoja RP 1,5 mm				
On1™-paranemissuoja RP 2,5 mm				
On1™-paranemissuoja WP 1,5 mm				
On1™-paranemissuoja WP 2,5 mm				
On1™ IOS -paranemissuoja 6 mm NP	-	On1™ Base -alusta On1™ Base Xeal -alusta	On1™-proteettinen ruuvi	Unigrip™-ruuvinväännin
On1™ IOS -paranemissuoja 4,5 mm NP				
On1™ IOS -paranemissuoja 6 mm RP				
On1™ IOS -paranemissuoja 4,5 mm RP				
On1™ IOS -paranemissuoja 5 mm WP				
On1™ IOS -paranemissuoja 4 mm WP				
On1™ Tilapäisjatke Kytkevä NP	-	On1™ Base -alusta On1™ Base Xeal -alusta	On1™-proteettinen ruuvi On1™-proteettinen laboratorioruuvi	Unigrip™-ruuvinväännin
On1™-tilapäisjatke Ei-kytkävä NP				
On1™-tilapäisjatke Kytkevä RP				
On1™-tilapäisjatke Ei-kytkävä RP				
On1™-tilapäisjatke Kytkevä WP				
On1™-tilapäisjatke Ei-kytkävä WP				
On1™-jäljennössylinteri Suljettu tarjotin NP	-	On1™ Base -alusta On1™ Base Xeal -alusta	-	Unigrip™-ruuvinväännin
On1™-jäljennössylinteri Suljettu tarjotin RP				
On1™-jäljennössylinteri Suljettu tarjotin WP				
On1™-jäljennössylinteri Avoin tarjotin NP				
On1™-jäljennössylinteri Avoin tarjotin RP				
On1™-jäljennössylinteri Avoin tarjotin WP				
On1™-jäljennössylinteri Avoin tarjotin Ei-kytk. NP	-	On1™ Base -alusta On1™ Base Xeal -alusta	-	Unigrip™-ruuvinväännin
On1™-jäljennössylinteri Avoin tarjotin Ei-kytk. RP				
On1™-jäljennössylinteri Avoin tarjotin Ei-kytk. WP				
On1™-kliininen ruuvi 1,75 mm NP	Implantit, joissa on sisäinen kartiokiinnitys: – NobelActive® – NobelActive® TiUltra™ – NobelReplace® CC – NobelReplace® CC TiUltra™ – NobelParallel™ CC – NobelParallel™ CC TiUltra™	On1™-tilapäisjatke Kytkevä On1™-tilapäisjatke Ei-kytkävä On1™-yleiskäyttöinen jatke On1™-yleiskäyttöinen jatke Ei-kytkävä On1™-esteettinen jatke	On1™-proteettinen ruuvi On1™-proteettinen laboratorioruuvi On1™-jäljennösruuvi	On1™-ruuvinväännin
On1™-kliininen ruuvi 2,5 mm NP				
On1™-kliininen ruuvi 1,75 mm RP				
On1™-kliininen ruuvi 2,5 mm RP				
On1™-kliininen ruuvi 1,75 mm WP				
On1™-kliininen ruuvi 2,5 mm WP				
On1™-proteettinen ruuvi	-		On1™-kliininen ruuvi	Unigrip™-ruuvinväännin
On1™ koneellinen ruuvinväännin 21 mm	-	On1™ Base -alusta On1™ Base Xeal -alusta	On1™-kliininen ruuvi	-
On1™ käsikäyttöinen ruuvinväännin 25 mm	-	On1™ Base -alusta On1™ Base Xeal -alusta	On1™-kliininen ruuvi	-

IFU1075. Multi-unit--jatkeet ja paranemissuojat

Multi-unit-jatkeet / platformat	Implanttijärjestelmä	Paranemissuoja	Ruuvinväännin
Sisäinen kartiokiinnitys (CC)			
Multi-unit-jatke Plus CC NP/RP/WP	NobelActive®	Paranemissuoja Multi-unit Titanium	Paranemissuoja: Unigrip™
Multi-unit-jatke Xea™ CC NP/RP/WP	NobelParallel™ CC		Suorat Multi-unit-jatkeet: MUA-väännin
17° Multi-unit-jatke Plus CC NP/RP/WP	NobelReplace™ CC		Kulmalliset Multi-unit-jatkeet: Unigrip™
17° Multi-unit-jatke Xea™ CC NP/RP/WP			
30° Multi-unit-jatke Plus CC NP/RP			
30° Multi-unit-jatke Xea™ CC NP/RP			
Triovali kartiokiinnitys (TCC)			
Multi-unit-jatke Xea™	Nobel Biocare N1™	Paranemissuoja Multi-unit Titanium	Paranemissuoja: Unigrip™
Nobel Biocare N1™ TCC NP/RP			Suorat Multi-unit-jatkeet: MUA-väännin
17° Multi-unit-jatke Xea™			Kulmalliset Multi-unit-jatkeet: Omnigrip™ Mini
Nobel Biocare N1™ TCC NP/RP			
30° Multi-unit-jatke Xea™			
Nobel Biocare N1™ TCC RP			
Sisäinen kolmikorvakkeen kiinnitys			
Multi-unit-jatke NobRpl NP/RP/WP	Replace Select™	Paranemissuoja Multi-unit Titanium	Paranemissuoja: Unigrip™
17° Multi-unit-jatke NobelReplace® NP/RP	NobelSpeedy® Replace™		Kulmalliset Multi-unit-jatkeet: Unigrip™
30° Multi-unit-jatke NobelReplace® RP	NobelSpeedy® Replace		
Ulkoinen kuusiokiinnitys			
Multi-unit-jatkes Brånemark System® NP/RP	Brånemark System® NobelSpeedy® Groovy	Paranemissuoja Multi-unit Titanium	Paranemissuoja: Unigrip
17° Multi-unit-jatkes Brånemark System® NP/RP			Suorat Multi-unit-jatkeet: MUA-väännin
30° Multi-unit-jatkeet Brånemark System® RP			Kulmalliset Multi-unit-jatkeet: Unigrip
Multi-unit-jatkeet Brånemark System® WP	Brånemark System® NobelSpeedy® Groovy	Paranemissuoja Multi-unit Brånemark System® WP	Suorat Multi-unit-jatkeet: MUA-väännin
Multi-unit-jatkes Brånemark System® Zygoma	Brånemark System® Zygoma	Paranemissuoja Multi-unit Titanium	Paranemissuoja: Unigrip
17° Multi-unit-jatkeet Brånemark System® Zygoma			Suorat Multi-unit-jatkeet: MUA-väännin
			Kulmalliset Multi-unit-jatkeet: Unigrip
45° Multi-unit-jatkeet External Hex RP	NobelZygoma™ 0°		Paranemissuoja: Unigrip
60° Multi-unit-jatkeet External Hex RP			Kulmalliset Multi-unit-jatkeet: Unigrip

IFU1085. Ruuvinvääntimet

Ruuvinväännin	Ruuvin liitospinta	Käsikappaleen kiinnitys	Instrumentit
Omnigrip™ Screwdriver Manual	Omnigrip™	-	-
Omnigrip™ Screwdriver Machine	Omnigrip™	Instrumentit, joissa on ISO 1797 -kiinnitys	- kahva laiteinstrumenteille - momenttivääntimen sovitimet

Ruuvinväännin	Ruuvin liitospinta	Käsikappaleen kiinnitys	Instrumentit
Omnigrip™ Mini Screwdriver Manual	Omnigrip™ Mini	-	- jäljennössylinteri TCC
Omnigrip™ Mini Screwdriver Machine	Omnigrip™ Mini	Instrumentit, joissa on ISO 1797 -kiinnitys	- kahva laiteinstrumenteille - momenttivääntimen sovitimet - jäljennössylinteri TCC
Unigrip™ Screwdriver Manual	Unigrip™	-	- jatkeen irrotustyökalu Titanium CC - poranterän syvyysrajoittimet - jäljennössylinterit (CC, kolmikorvake, ulkoinen kuusio, Multi-unit, Brånemark System®, Zygoma) - paranemisjatkeet (CC, NobelReplace®, Brånemark System®, Zygoma) - paranemissuoja Multi-unit - kapeat paranemisjatkeet CC - kapea tilapäisjatke CC - Bone Mill Guide Conical Connection - Bone Mill Guide External Hex - Bone Mill Guide NobelReplace®
Unigrip™ Screwdriver Machine	Unigrip™	Instrumentit, joissa on ISO 1797 -kiinnitys	- kahva laiteinstrumenteille - momenttivääntimen sovitimet - jatkeen irrotustyökalu Titanium CC - poranterän syvyysrajoittimet - ohjatut Implanttivääntimet - jäljennössylinterit (CC, kolmikorvake, ulkoinen kuusio, Multi-unit, Brånemark System®, Zygoma) - paranemisjatkeet (CC, NobelReplace®, Brånemark System®, Zygoma) - paranemissuoja Multi-unit - kapea paranemisjatke CC - kapea tilapäisjatke CC
Screwdriver Manual Multi-unit	Sisäinen kuusiokiinnitys	-	- jatkeen irrotin Nobel Biocare N1™ TCC
Screwdriver Machine Multi-unit	Sisäinen kuusiokiinnitys	Instrumentit, joissa on ISO 1797 -kiinnitys	- kahva laiteinstrumenteille - momenttivääntimen sovitimet - jatkeen irrotin Nobel Biocare N1™ TCC
Screwdriver Manual M-u Bmk Syst WP	Sisäinen kuusiokiinnitys	-	-
Screwdriver Machine M-u Bmk Syst WP	Sisäinen kuusiokiinnitys	Instrumentit, joissa on ISO 1797 -kiinnitys	- kahva laiteinstrumenteille - momenttivääntimen sovitimet
Cover Screw Driver Bmk Syst Hexagon	Ulkoinen kuusiokiinnitys	-	-

IFU1086. Jäljennössylinterit

Jäljennössylinteri	Tekniikka	Sopivat platformat	Värikkoodi	Ruuvinväännin
Kartiokiinnitys (CC)	Avoin tarjotin	3.0	ei mitään	Unigrip™
		NP		
		RP		
		WP		
	Suljettu tarjotin	3.0	ei mitään	
		NP		
		RP		
		WP		

Jäljennössylinteri	Tekniikka	Sopivat platformit	Värikoodi	Ruuvinväännin
Triovaali kartiokiinnitys (TCC)	Avoin tarjotin	NP	●	Omnigrip™ Mini
		RP	●	
	Suljettu tarjotin	NP	●	
		RP	●	
Kolmikorvake	Avoin tarjotin	NP	●	Unigrip™
		RP	●	
		WP	●	
		6.0	●	
Ulkoinen kuusiokiinnitys	Avoin tarjotin	NP	ei mitään	Unigrip™
		RP		
		WP		
Multi-unit-jatke	Avoin tarjotin	NP/RP/WP	ei mitään	Unigrip™
	Suljettu tarjotin	NP/RP/WP		
Brånemark System® Zygoma	Avoin tarjotin	RP	ei mitään	Unigrip™

IFU1087. Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC -järjestelmä

Implanttien yhteensopivuustaulukko

Implantti	Implanttiväännin	Peittoruuvi
Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC NP 3.5x9 mm	Implanttiväännin Driver Nobel Biocare N1™ TCC NP	Peittoruuvi Nobel Biocare N1™ TCC NP (IFU1016)
Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC NP 3.5x11 mm		
Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC NP 3.5x13 mm		
Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC NP 3.5x15 mm	Implanttiväännin Nobel Biocare N1™ TCC RP	Peittoruuvi Nobel Biocare N1™ TCC RP (IFU1016)
Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC RP 4.0x7 mm		
Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC RP 4.0x9 mm		
Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC RP 4.0x11 mm		
Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC RP 4.0x13 mm		
Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC RP 4.0x15 mm		
Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC RP 4.8x7 mm		
Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC RP 4.8x9 mm		
Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC RP 4.8x11 mm		

Yhteensopivat jatkejärjestelmät ja jäljennössylinterit

Implanttijärjestelmä	Jatkejärjestelmä ja jäljennössylinterit
Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC NP	Paranemisjatke Nobel Biocare N1™ TCC NP (IFU1094)
	Tilapäisjatke Nobel Biocare N1™ TCC NP (IFU1093)
	Yleiskäyttöinen jatke Nobel Biocare N1™ TCC NP (IFU1023)
	Asemapaikannin Nobel Biocare N1™ TCC NP (IFU1091)
	Jäljennössylinteri Avoin tarjotin Nobel Biocare N1™ TCC NP (IFU1086)
	Jäljennössylinteri Suljettu tarjotin Nobel Biocare N1™ TCC NP (IFU1086)
	Multi-unit-jatke Xeal™ Nobel Biocare N1™ TCC NP (IFU1075)
	17° Multi-unit-jatke Xeal™ Nobel Biocare N1™ TCC NP (IFU1075)
	Nobel Biocare N1™ Base Xeal™ -alusta TCC Kolmikorv. NP (IFU1088)
	Esteettinen jatke Nobel Biocare N1™ NP (IFU1018)
Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC RP	Paranemisjatke Nobel Biocare N1™ TCC RP (IFU1094)
	Tilapäisjatke Nobel Biocare N1™ TCC RP (IFU1093)
	Yleiskäyttöinen jatke Nobel Biocare N1™ TCC RP (IFU1023)
	Asemapaikannin Nobel Biocare N1™ TCC RP (IFU1091)
	Jäljennössylinteri Avoin tarjotin Nobel Biocare N1™ TCC RP (IFU1086)
	Jäljennössylinteri Suljettu tarjotin Nobel Biocare N1™ TCC RP (IFU1086)
	Multi-unit-jatke Xeal™ Nobel Biocare N1™ TCC RP (IFU1075)
	17° Multi-unit-jatke Xeal™ Nobel Biocare N1™ TCC RP (IFU1075)
	30° Multi-unit-jatke Xeal™ Nobel Biocare N1™ TCC RP (IFU1075)
	Nobel Biocare N1™ Base Xeal™ -alusta TCC Kolmikorvake RP (IFU1088)
	Esteettinen jatke Nobel Biocare N1™ RP (IFU1018)

IFU1088. Nobel Biocare N1™ Base -konsepti

Alusta	Sopivat platformit	Sopivat korkeudet		Kiristuksen vääntömomentti	Ruuvinväännin	
Nobel Biocare N1™ Base Xeal™	NP	1,75 mm / 2,5 mm / 3,5 mm		20 Ncm	N1 Base Screwdriver -ruuvinväännin	
	RP	1,75 mm / 2,5 mm / 3,5 mm				
Alustatason jatkeet ja komponentit	Sopivat platformit	Kytkevä	Ei- kytkävä	Värikoodi	Sopivat korkeudet	Ruuvin- väännin
Paranemisjatke Nobel Biocare N1™ Base	NP	X	–		2 mm	Omnigrip™ Mini
	RP	X	–		3 mm (anatominen muoto) 4 mm	
IOS- paranemisjatke Nobel Biocare N1™ Base	NP	X	–	 (ruuvi)	4,5 mm	
	RP	X	–	 (ruuvi)		
Tilapäisjatke Nobel Biocare N1™ Base	NP	X	X	 (ruuvi)	10 mm	Omnigrip™ Mini
	RP	X	X	 (ruuvi)		
Yleiskäyttöinen jatke Nobel Biocare N1™ Base	NP	X	X	 (ruuvi)	4 mm	Omnigrip™ Mini
	RP	X	X	 (ruuvi)		
Jäljennössylinteri Avoin tarjotin Nobel Biocare N1™ Base	NP	X	–		–	Omnigrip™ Mini
	RP	X	–		–	
Jäljennössylinteri Suljettu tarjotin Nobel Biocare N1™ Base	NP	X	–		–	Omnigrip™ Mini
	RP	X	–		–	
Asemapaikannin Nobel Biocare N1™ Base	NP	X	–		–	Omnigrip™ Mini
	RP	X	–		–	

Esteettinen jatke Nobel Biocare N1™ Base	NP	X	–	● (ruuvi)	0,5 mm (bukkaalinen marginaali)	Omnigrip™ Mini
	RP	X	–	● (ruuvi)	0,5 mm (bukkaalinen marginaali)	

IFU1089. Luun reunan viimeistelijät ja luun reunan viimeistelyohjaimet

Luun reunan viimeistelijä	Luun reunan viimeistelyohjain	Yhteensopiva implanttijärjestelmä	Ruuvinväänin
Luun reunan viimeistelijä ja ohjain Kartiokiinnitys 3.0	Luun reunan viimeistelyohjain Kartiokiinnitys 3.0	NobelActive® 3.0	Unigrip™
Luun reunan viimeistelijä ja ohjain Kartiokiinnitys NP Ø 4,4	Luun reunan viimeistelyohjain Kartiokiinnitys NP	NobelActive® NP NobelReplace® CC NP NobelParallel™ CC NP	
Luun reunan viimeistelijä ja ohjain Kartiokiinnitys NP Ø 5,2			
Luun reunan viimeistelijä ja ohjain Kartiokiinnitys RP Ø 5,2	Luun reunan viimeistelyohjain Kartiokiinnitys RP	NobelActive® RP NobelReplace® CC RP NobelParallel™ CC RP	
Luun reunan viimeistelijä ja ohjain Kartiokiinnitys RP Ø 6,2			
Luun reunan viimeistelijä ja ohjain Kartiokiinnitys WP Ø 6,7	Luun reunan viimeistelyohjain Kartiokiinnitys WP	NobelActive® WP NobelParallel™ CC WP	Unigrip™
Luun reunan viimeistelijä ja ohjain Brånemark System® NP Ø 4,5	Luun reunan viimeistelyohjain Brånemark System® NP	NobelSpeedy® Groovy NP Brånemark System NP	
Luun reunan viimeistelijä ja ohjain Brånemark System® RP Ø 5,1	Luun reunan viimeistelyohjain Brånemark System® RP	NobelSpeedy® Groovy RP Brånemark System® RP NobelZygoma™	
Luun reunan viimeistelijä ja ohjain Brånemark System® WP Ø 6,5	Luun reunan viimeistelyohjain Brånemark System® WP	NobelSpeedy® Groovy WP Brånemark System® WP	
Luun reunan viimeistelijä Nobel Biocare N1™ TCC Ø 4,0	Luun reunan viimeistelyohjain Nobel Biocare N1™ TCC NP Ø 4,0	Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC NP	
Luun reunan viimeistelijä Nobel Biocare N1™ TCC Ø 5,2	Luun reunan viimeistelyohjain Nobel Biocare N1™ TCC NP Ø 5,2		Unigrip™
Luun reunan viimeistelijä Nobel Biocare N1™ TCC Ø 5,2	Luun reunan viimeistelyohjain Nobel Biocare N1™ TCC RP Ø 5,2	Nobel Biocare N1™ TiUltra™ TCC RP	
Luun reunan viimeistelijä ja ohjain NobelReplace™ NP Ø 4,6	Luun reunan viimeistelyohjain NobelReplace™ NP Ø 4,6	Replace Select TC NP Replace Select Tapered Replace Select Tapered PMC	
Luun reunan viimeistelyohjain NOBELREPLACE® 6.0 Ø 7	Luun reunan viimeistelyohjain NOBELREPLACE® 6.0 Ø 7	Replace Select Tapered Replace Select Tapered PMC	
Luun reunan viimeistelijä ja ohjain NobelReplace™ RP Ø 5,3	Luun reunan viimeistelyohjain NobelReplace™ RP Ø 5,3	Replace Select TC RP Replace Select Tapered Replace Select Tapered PMC	
Luun reunan viimeistelijä ja ohjain NobelReplace™ WP Ø 6,5	Luun reunan viimeistelyohjain NobelReplace™ WP Ø 6,5	Replace Select Tapered Replace Select Tapered PMC	

IFU1090. Uudelleenkäytettävät Nobel Biocare -instrumentit ja -komponentit

All-on-4®-ohjain

Implanttituotesarja	Porat
NobelActive® NobelActive® TiUltra™	Unigrip™ Screwdrivers Twist Drill -porat Ø 2,0 mm Drill with Tip Tapered -pora 2,0 mm
NobelParallel™ Conical Connection NobelParallel™ Conical Connection TiUltra™	
NobelReplace® Conical Connection NobelReplace® Conical Connection Partially Machined Collar (PMC)	
NobelReplace® Tapered Groovy Replace Select™ Tapered TiUnite® Replace Select™ Tapered Partially Machined Collar (PMC)	
NobelSpeedy® Groovy	
Brånemark System®	
Nobel Zygoma 0° ja 45°	

Multi-unit-kohdistustyökalu

Implanttituotesarja	Käyttöohje	Kiinnitystyyppi	Implanttiväänin
NobelActive® TiUnite® NobelActive® TiUltra™	IFU1001	Sisäinen kartiokiinnitys	Implanttivääntimet kartiokiinnityksellä
NobelParallel™ Conical Connection NobelParallel™ Conical Connection TiUltra™	IFU1002		
NobelReplace® Conical Connection NobelReplace® Conical Connection Partially Machined Collar (PMC)	IFU1010		
NobelReplace® Tapered Groovy Replace Select™ Tapered TiUnite® Replace Select™ Tapered Partially Machined Collar (PMC)	IFU1012	Kolmikorvakkeinen kiinnitys	Implanttivääntimet NobelReplace®

Yhdistetty avopäinen momenttiavain

Implanttituotesarja	Yhteensopivat implanttinviejät
Brånemark System® NobelSpeedy®	Guided Implant Mount Brånemark System® NP, RP 3.75, RP 4.0, WP
NobelParallel™	Guided Implant Mount NobelParallel™ NP 3.75, RP 4.3, RP 5.0, WP 5.5
Trefoil™ System	Trefoil™ Implant Mount
NobelActive®	Guided Implant Mount NobelActive® NP 3.5, RP 4.3, RP 5.0, WP 5.5
NobelReplace® CC	Guided Implant Mount NobelReplace® CC NP 3.5, RP 4.3, RP 5.0
NobelReplace® Tapered	Guided Implant Mount NobelReplace® Tapered NP 3,5, RP 4,0, WP 5,0, 6,0

Liitin käsikappaleeseen

Liitin käsikappaleeseen	Yhteensopivat laitteet	Implanttituotesarja
Liitin käsikappaleeseen	Guided Implant Mount Brånemark System® NP, RP 3.75, RP 4.0, WP Zygoma-implantinviijä	Brånemark System® NobelSpeedy® Zygoma RP
NobelReplace® -liitin käsikappaleeseen	Guided Implant Mount NobelActive® NP, RP 4.3, RP 5.0, WP 5.5 Guided Implant Mount NobelParallel™ NP 3.75, RP 4.3, RP 5.0, WP 5.5 Guided Implant Mount NobelReplace® NP 3.5, RP 4.3, WP 5.0, 6.0 Guided Implant Mount NobelReplace® CC NP 3.5, RP 4.3, RP 5.0 Implant Mount Ø 5 mm	NobelActive® NobelParallel™ NobelReplace® Tapered NobelReplace® CC Trefoil™ System

Z:n muotoinen syvyyssondi 7–18 mm ja NobelSpeedy®-syvyyssondi 18–25 mm

Depth Probe -syvyyssondeja ei yhdistetä muihin laitteisiin.

Suunnan ilmaisimet Direction Indicator Ø 2/Ø 2,4-2,8 mm ja Direction Indicator Tapered NP/RP/WP/6.0

Suunnan ilmaisimia ei yhdistetä muihin laitteisiin.

Implantin pelastuskauluksen ja poraohjainten kahva

Implantin pelastuskauluksen ja pelastusporaohjainten kahva voidaan liittää implantin pelastuskauluksiin ja pelastusporaohjaimiin.

Kahva laiteinstrumenteille

Kahva laiteinstrumenteille voidaan liittää koneellisiin Screwdrivers Machine Unigrip™ -ruuvinvääntimiin, koneellisiin Omnigrip™ Screwdrivers Machine -ruuvinvääntimiin, koneellisiin Screwdrivers Machine Multi-unit-ruuvinvääntimiin, Omnigrip™ Mini Screwdriver -ruuvinvääntimiin, Abutment Screw Remover -irrottimiin, Abutment Screw Retrieval Instrument -instrumentteihin ja Screw Tap Repair Tool -kierrelleikkurin korjaustyökaluihin.

Implanttivääntimet

Implanttivääntimet kiinnitetään ISO 1797 -yhteensopivaan hammaslääketieteelliseen käsikappaleeseen/kulmakappaleeseen sekä seuraavien hammasimplanttien sisäiseen tai ulkoiseen heksakiinnitykseen.

Implanttivääntimet	Implanttituotesarja
Implanttivääntimet CC 3.0 (28/37 mm)	NobelActive® TiUnite®
Implanttivääntimet CC NP (28/37 mm)	NobelActive® TiUltra™
Implanttivääntimet CC RP (28/37 mm)	NobelParallel™ Conical Connection
Implanttivääntimet CC WP (28/37 mm)	NobelParallel™ Conical Connection TiUltra™
Implanttivääntimet CC Kapea jatke 3.0/NP/RP	
Implant Drivers NobelReplace® NP (pitkä/lyhyt)	NobelReplace® Conical Connection
Implanttivääntimet NobelReplace® RP (pitkä/lyhyt)	NobelReplace® Conical Connection PMC
Implanttivääntimet NobelReplace® WP (pitkä/lyhyt)	NobelReplace® Tapered Groovy Replace Select™ Tapered TiUnite®
Implanttivääntimet NobelReplace® 6.0 (pitkä/lyhyt)	Replace Select™ Tapered PMC
Implanttivääntimet Brånemark System® NP (26/34 mm)	Brånemark System®
Implanttivääntimet Brånemark System® RP (21/26/34 mm)	
Implanttivääntimet Brånemark System® WP (21/26 mm)	

Implantinviijien jakoavaimen sovitin Brånemark System® NP/RP/WP

Implantti	Käyttöohje	Momenttivääntimet
Brånemark System®	IFU1007	Brånemark System® Manual Torque Wrench
NobelSpeedy®	IFU1007	

Kirurginen NobelReplace®-vääntin

Implanttituotesarja	Käyttöohje	Implanttivääntin
NobelActive® TiUnite® NobelActive® TiUltra™	IFU1001	Implanttivääntimet kartiokiinnityksellä
NobelParallel™ Conical Connection NobelParallel™ Conical Connection TiUltra™	IFU1002	
NobelReplace® Conical Connection NobelReplace® Conical Connection Partially Machined Collar (PMC)	IFU1010	Implanttivääntimet NobelReplace®
NobelReplace® Tapered Groovy Replace Replace Select™ Tapered TiUnite® Select™ Tapered Partially Machined Collar (PMC)	IFU1012	Implanttivääntimet NobelReplace® ja Replace Select™ Tapered
Nobel Biocare N1™ TCC TiUltra™	IFU1087	Implanttivääntin Nobel Biocare N1™

Huuhteluneula

Irrigation Needle -huuhteluneula liitetään ruiskuun, jossa on puhdistusliuosta, ja sitä käytetään kanyloitujen porien ja leikkurien sisäisten kanavien/aukkojen huuhteluun käsittelyn/uudelleen käsittelyn yhteydessä.

Pehmytkudospunssarit

Tissue punch-pehmytkudospunssarit kiinnitetään ISO 1797 -yhteensopivaan hammaslääketieteelliseen käsikappaleeseen/kulmakappaleeseen.

IFU1091. Asemapaikantimet

	Implantin kiinnitys	Saatavilla oleva platformi	Jatkeet	Väri-koodi	Vääntö-momentti	Ruuvinvääntin
Nobel Biocare N1™ TCC -ose-mapaikantimet	Triovaali kartio-kiinnitys (TCC)	NP RP	–	 	Kiristys käsin	Omnigrip™ Mini
Nobel Biocare Multi-unit PoLo	–	NP/RP/WP (CC)	Multi-unit-jatkeet	–	Kiristys käsin	Unigrip™
Nobel Biocare Multi-unit PoLo Bmk WP	–	Ulkoinen kuusio WP	Multi-unit-jatkeet Brånemark System®		Kiristys käsin	Unigrip™

IFU1092. Poranterän syvyysvastesarjat ohjattuihin ja vapaalla kädellä tehtäviin leikkauksiin

Tuotenimi	Yhteensopivat laitteet		
	Poranterän vaste / poranterän vatesarja	Poranterät	Ruuvinvääntimet
Drill Stop Ø 2	Guided Drill Stop Kit Box Drill Stop Kit Box	Twist Drill w Tip 2.0x18-25 mm Guided Twist Drill 2x(10+)-7-13 mm Guided Twist Drill 2x(10+)-7-18 mm Twist Drill w Tip 2x7-15 mm Twist Drill 3.2x7-10 mm Twist Drill 1.5x7-15 mm Twist Drill w Tip 2x10-18 mm Twist Drill w Tip 2x18-25 mm, LS Guided Drill Guide NP to Ø 2 mm Guided Drill Guide RP to Ø 2 mm Guided Drill Guide 6.0/WP to Ø 2 mm	Screwdriver Manual Unigrip™ Screwdriver Machine Unigrip™

Tuotenimi	Yhteensopivat laitteet		
	Poranterän vaste / poranterän vastesarja	Poranterät	Ruuvinvään- timet
Drill Stop Ø 2.8	Guided Drill Stop Kit Box Drill Stop Kit Box	Guided Twist Drill 2.8x(10+)7-13 mm Guided Twist Drill 2.8x(10+)7-18 mm Twist Step Drill 2.4/2.8 10-18 mm Twist Step Drill 2.4/2.8 7-15 mm Twist Step Drill 2.4/2.8 7-10 mm Guided Twist Step Drill Ø 2.4/2.8 (10+) 7-13 mm Guided Twist Step Drill Ø 2.4/2.8 (10+) 7-18 mm Twist Step Drill 2.4/2.8x18-25 mm, LS Twist Step Drill 2.4/2.8x18-25 mm Guided Drill Guide NP to Ø 2,8 mm Guided Drill Guide RP to Ø 2,8 mm Guided Drill Guide 6.0/WP to Ø 2,8 mm	Screwdriver Machine Unigrip™ Screwdriver Manual Unigrip™
Drill Stop Ø 3	Guided Drill Stop Kit Box Drill Stop Kit Box	Guided Twist Drill 3x(10+)7-13 mm Guided Twist Drill 3x(10+)7-18 mm Twist Drill 3x10-18 mm Twist Drill 3x7-15 mm Twist Drill 3x7-10 mm Guided Drill Guide NP to Ø 3 mm Guided Drill Guide RP to Ø 3 mm Guided Drill Guide 6.0/WP to Ø 3 mm	Screwdriver Machine Unigrip™ Screwdriver Manual Unigrip™
Drill Stop Ø 3.2	Guided Drill Stop Kit Box Drill Stop Kit Box	Twist Step Drill 2.8/3.2 7-10 mm Twist Drill 3.2x18-25 mm Twist Step Drill 2.8/3.2 10-18 mm Twist Step Drill 2.8/3.2 7-15 mm Guided Twist Drill 3.2x(10+)7-13 mm Twist Drill 3.2x7-10 mm Guided Twist Drill 3.2x(10+)7-18 mm Twist Drill 3.2x10-18 mm Guided Twist Step Drill Ø 2.8/3.2 (10+) 7-18 mm Guided Twist Step Drill Ø 2.8/3.2 (10+) 7-13 mm Twist Drill 3.2x7-15 mm Guided Drill Guide NP to Ø 3,2 mm Guided Drill Guide RP to Ø 3,2 mm	Screwdriver Machine Unigrip™ Screwdriver Manual Unigrip™
Drill Stop Ø 3.4	Guided Drill Stop Kit Box Drill Stop Kit Box	Guided Twist Drill 3.4x(10+)7-13 mm Guided Twist Drill 3.4x(10+)7-18 mm Twist Drill 3.4x10-18 mm Twist Drill 3.4x7-15 mm Twist Drill 3.4x7-10 mm Twist Drill 3.4x18-25 mm Guided Drill Guide RP to Ø 3,4 mm	Screwdriver Machine Unigrip™ Screwdriver Manual Unigrip™
Drill Stop Ø 3.6	Guided Drill Stop Kit Box Drill Stop Kit Box	Twist Step Drill 3.2/3.6 7-15 mm Twist Step Drill 3.2/3.6 7-10 mm Guided Twist Step Drill Ø 3.2/3.6 (10+) 7-18 mm Guided Twist Step Drill Ø 3.2/3.6 (10+) 7-13 mm Twist Step Drill 3.2/3.6 10-18 mm Guided Drill Guide RP to Ø 3,6 mm Guided Drill Guide WP/6.0 to Ø 3,6 mm	Screwdriver Machine Unigrip™ Screwdriver Manual Unigrip™
Drill Stop Ø 3.8	Guided Drill Stop Kit Box Drill Stop Kit Box	Guided Twist Drill 3.8x(10+)7-13 mm Guided Twist Drill 3.8x(10+)7-18 mm Guided Drill Guide 6.0/WP to Ø 3,8 mm	Screwdriver Machine Unigrip™ Screwdriver Manual Unigrip™
Drill Stop Ø 4.2	Guided Drill Stop Kit Box Drill Stop Kit Box	Guided Twist Step Drill 3.8/4.2 (10+) 7-18 Twist Step Drill 3.8/4.2 10-18 mm Twist Step Drill 3.8/4.2 7-15 mm Twist Step Drill 3.8/4.2 7-10 mm Guided Twist Drill 4.2x(10+)7-13 mm Guided Twist Drill 4.2x(10+)7-18 mm Guided Twist Step Drill 3.8/4.2 (10+) 7-13 Guided Drill Guide RP to Ø 4,2 mm Guided Drill Guide 6.0/WP to Ø 4,2 mm	Screwdriver Machine Unigrip™ Screwdriver Manual Unigrip™

Tuotenimi	Yhteensopivat laitteet		
	Poranterän vaste / poranterän vastesarja	Poranterät	Ruuvinvään- timet
Drill Stop Kit Box	Drill Stop Ø 2 Drill Stop Ø 2.8 Drill Stop Ø 3 Drill Stop Ø 3.2 Drill Stop Ø 3.4 Drill Stop Ø 3.6 Drill Stop Ø 3.8 Drill Stop Ø 4.2	Twist Drill w Tip 2.0x18-25 mm Twist Drill w Tip 2x7-15 mm Twist Drill 3.2x7-10 mm Twist Drill 1.5x7-15 mm Twist Drill w Tip 2x10-18 mm Twist Drill w Tip 2x18-25 mm, LS Twist Step Drill 2.4/2.8 10-18 mm Twist Step Drill 2.4/2.8 7-15 mm Twist Step Drill 2.4/2.8 7-10 mm Twist Step Drill 2.4/2.8x18-25 mm, LS Twist Step Drill 2.4/2.8x18-25 mm Twist Step Drill 2.4/2.8x18-25 mm Twist Drill 3x10-18 mm Twist Drill 3x7-15 mm Twist Drill 3x7-10 mm Twist Step Drill 2.8/3.2 7-10 mm Twist Drill 3.2x18-25 mm Twist Step Drill 2.8/3.2 10-18 mm Twist Step Drill 2.8/3.2 7-15 mm Twist Drill 3.2x7-10 mm Twist Drill 3.2x10-18 mm Twist Drill 3.2x7-15 mm Twist Drill 3.4x10-18 mm Twist Drill 3.4x7-15 mm Twist Drill 3.4x7-10 mm Twist Drill 3.4x18-25 mm Twist Step Drill 3.2/3.6 7-15 mm Twist Step Drill 3.2/3.6 7-10 mm Twist Step Drill 3.2/3.6 10-18 mm Twist Step Drill 3.8/4.2 10-18 mm Twist Step Drill 3.8/4.2 7-15 mm Twist Step Drill 3.8/4.2 7-10 mm	–
Guided Drill Stop Kit Box	Drill Stop Ø 2 Drill Stop Ø 2.8 Drill Stop Ø 3 Drill Stop Ø 3.2 Drill Stop Ø 3.4 Drill Stop Ø 3.6 Drill Stop Ø 3.8 Drill Stop Ø 4.2	Guided Twist Drill 2x(10+)7-13 mm Guided Twist Drill 2x(10+)7-18 mm Guided Twist Drill 2.8x(10+)7-13 mm Guided Twist Drill 2.8x(10+)7-18 mm Guided Twist Step Drill Ø 2.4/2.8 (10+) 7-13 mm Guided Twist Step Drill Ø 2.4/2.8 (10+) 7-18 mm Guided Drill Guide NP to Ø 2.8 mm Guided Drill Guide RP to Ø 2.8 mm Guided Drill Guide 6.0/WP to Ø 2.8 mm Guided Twist Drill 3x(10+)7-13 mm Guided Twist Drill 3x(10+)7-18 mm Guided Twist Drill 3.2x(10+)7-13 mm Guided Twist Drill 3.2x(10+)7-18 mm Guided Twist Step Drill Ø 2.8/3.2 (10+) 7-18 mm Guided Twist Step Drill Ø 2.8/3.2 (10+) 7-13 mm Guided Twist Drill 3.4x(10+)7-13 mm Guided Twist Drill 3.4x(10+)7-18 mm Guided Twist Step Drill Ø 3.2/3.6 (10+) 7-18 mm Guided Twist Step Drill Ø 3.2/3.6 (10+) 7-13 mm Guided Twist Drill 3.8x(10+)7-13 mm Guided Twist Drill 3.8x(10+)7-18 mm Guided Twist Step Drill 3.8/4.2 (10+) 7-18 Guided Twist Drill 4.2x(10+)7-13 mm Guided Twist Drill 4.2x(10+)7-18 mm Guided Twist Step Drill 3.8/4.2 (10+) 7-13	–

IFU1093. Tilapäisjatkeet ja -sylinterit

Tilapäiset, kytkevät Snap-jatkeet sekä tilapäiset kytkevät/ei-kytkevät jatkeet – yhteensopivat implanttiplatformit ja ruuvinvääntimet

Paranemis-jatkeiden kiinnitys	Sopivat platformit	Kytkevä	Ei-kytkevä	Värikoodi	Sopivat marginaalikorkeudet	Kiristykseen vääntömomentti	Ruuvinväännin
Kartiokiinnitys (CC)	3.0	x			1,5 mm	15 Ncm	Unigrip™
	NP	x	x	●	1,5 mm	35 Ncm	
	RP	x	x	●	3,0 mm		
	WP	x	x	●			
Triovaali kartiokiinnitys (TCC)	NP	x		● (ruuvi)	1,5 mm	20 Ncm	Omnigrip™ mini
	RP	x		● (ruuvi)	3,0 mm		
Kolmikorkvake	NP	x	x	●	1,5 mm	35 Ncm	Unigrip™
	RP	x	x	●			
	WP	x	x	●			
	6.0	x	x	●			
Ulkoinen kuusiokiinnitys	NP	x	x		1,5 mm	35 Ncm	Unigrip™
	RP	x	x				
	WP	x	x				

Kapeat tilapäisjatkeet – yhteensopivat implanttiplatformit ja ruuvinvääntimet sekä kiristysmomentit

Kapeiden paranemis-jatkeiden kiinnitys	Sopivat platformit	Värikoodi	Mahdoll. sijoituskohdan korkeudet	Kiristykseen vääntömomentti	Ruuvinväännin
Kartiokiinnitys (CC)	3.0		6,5 mm 7,5 mm	15 Ncm	Unigrip™
	NP	O	6,5 mm 7,5 mm		
	RP	O	6,5 mm 7,5 mm		

Anatomical PEEK --tilapäisjatkeet – yhteensopivat implanttiplatformit ja ruuvinvääntimet

PEEK-jatkeiden käyttökohte:	Sopivat platformit	Värikoodi	Mahdoll. koot	Kiristykseen vääntömomentti	Ruuvinväännin
Kartiokiinnitys (CC)	WP		6 x 7 mm 7 x 8 mm	15 Ncm	Unigrip™

Multi-unit-tilapäisjatkeet ja tilapäiset Multi-Unit-Snap-sylinterit – yhteensopivat jatkeet ja ruuvinvääntimet

Tilapäissylinteri	MUA-jatkeen kiinnitys/platformi	Värikoodi	Kiristykseen vääntömomentti	Ruuvinväännin
Tilapäinen Multi-unit-Snap-sylinteri	CC/NP, RP, WP TCC/NP, RP		15 Ncm	Unigrip™
Tilapäinen Multi-unit-sylinteri	Kolmikorkvakeinen / NP, RP, WP Ulkoinen kuusio / NP, RP			
Tilapäinen Multi-unit-sylinteri Bmk WP	Ulkoinen kuusio/WP			

IFU1094. Paranemisjatkeet, paranemisruuvit

Paranemisjatkeet – yhteensopivat implanttiplatformit ja ruuvinvääntimet

Paranemisjatkeiden kiinnitys	Sopivat platformit	Värikoodi	Ruuvinväännin
Kartiokiinnitys (CC)	3.0		Unigrip™
	NP	●	
	RP	●	
	WP	●	
Triovaali kartiokiinnitys (TCC)	NP	● (ruuvi)	Omnigrip™ Mini
	RP	● (ruuvi)	
Kolmikorkvake	NP	●	Unigrip™
	RP	●	
	WP	●	
	6.0	●	
Ulkoinen kuusiokiinnitys	NP		Unigrip™
	RP		
	WP		

Paranemisruuvit – yhteensopivat implanttiplatformit ja ruuvinvääntimet

Kolmikorkvake	NP	●	Unigrip™
	RP	●	

Kapeat paranemisjatkeet – yhteensopivat implanttiplatformit ja ruuvinvääntimet

Kapeiden paranemis-jatkeiden kiinnitys	Sopivat platformit	Värikoodi	Ruuvinväännin
Kartiokiinnitys (CC)	3.0		Unigrip™
	NP	●	
	RP	●	

Anatomical PEEK -paranemisjatkeet – yhteensopivat implanttiplatformit ja ruuvinvääntimet

Anatomical PEEK -paranemis-jatkeiden kiinnitys	Sopivat platformit	Värikoodi	Ruuvinväännin
Kartiokiinnitys (CC)	WP		Unigrip™

IFU1095. Zygoma-implantti RP

Yhteensopivuus Zygoma-implanttien kanssa

Tuotenumero	Tuotenimi	Peittoruuvi	Implantinviejä ja sen ruuvi	Jäljennössylinterit ja niiden ohjauspinni	Paranemisjatke	Pysyvät suorat jatkeet ja niiden ruuvit	Pysyvät kulmamalliset jatkeet ja niiden ruuvi	Implantisillat ja implanttikiskopeit-toproteesit ja niihin kuuluvat ruuvit	Zygoma-kahva, liitäntä käsikappaleeseen Muu
28862	Zygoma Implant RP 30 mm -implantti	Zygoma Implant -peittoruuvi: 28989 Brånemark System Zygoma Implant -peittoruuvi: 32424	Zygoma-implantinviejä Zygoma Fixture Mount -ruuvi M2specx 6,6 mm (implantinviejä on esiasennettu implanttiin)	Brånemark System® Zygoma-jäljennössylinteri Avoim tarjotin Ø 4 mm Ohjauspinni Zygoma 20 mm RP	Brånemark System® Zygoma-parane-misabutmentti Ø 4x3 mm Brånemark System® Zygoma-parane-misabutmentti Ø 4x5 mm	Zygoma Abutment Multi-unit RP 3 mm -abutmentti Zygoma Abutment Multi-unit RP 5 mm -abutmentti Brånemark System® Zygoma Multi-unit Abutment 3 mm -abutmentti Brånemark System® Zygoma Multi-unit Abutment 5 mm -abutmentti	Zygoma 17° Abutment Multi-unit RP 2 mm -abutmentti Zygoma 17° Abutment Multi-unit RP 3 mm -abutmentti Brånemark System® Zygoma 17° Multi-unit Abutment 2 mm -abutmentti Brånemark System® Zygoma 17° Multi-unit Abutment 3 mm -abutmentti Brånemark System® Zygoma kulmallinen Multi-unit-jatkeruuvi	Nobel ProCera Implant Bar Overdenture Titanium -peittoproteesi Procera Implant Bridge Ti Impl Level -implantisilta NobelProCera® Zr Implant Bridge -implantisilta (implanttitaso) Brånemark System® Zygoma -jatkeruuvi	Zygoma Handle -kahva Liitin käsikappaleeseen Unigrip-ruuvinvääntimet (implantin viejän ruuviin)
28863	Zygoma Implant RP 35 mm -implantti								
28864	Zygoma Implant RP 40 mm -implantti								
28865	Zygoma Implant RP 42,5 mm -implantti								
28866	Zygoma Implant RP 45 mm -implantti								
28867	Zygoma Implant RP 47,5 mm -implantti								
28868	Zygoma Implant RP 50 mm -implantti								
28869	Zygoma Implant RP 52,5 mm -implantti								

Yhteensopivuus työkalulisävarusteiden tai muiden laitteiden kanssa

Tuotenumero	Tuotenimi	Implantti	Laitetyyppi / 3. tason perhe	Käsikappale
28989	Zygoma Implant Cover Screw	Zygoma RP -implanttiperhe	Zygoma Implant Cover Screw	Peittoruuvinväännin Brånemark System Kuusio
32424	Brånemark® Zygoma Implant Cover Screw -peittoruuvi	NobelZygoma 45° -implanttiperhe NobelZygoma 0° -implanttiperhe		
29162	Brånemark System® Zygoma Surgical Kit -sarja		Brånemark System Zygoma Surgical Kit -sarja	Zygoma Handle -kahva Zygoma Drill Guard -rajakatkaisin Zygoma Drill Guard Short -rajakatkaisin Zygoma Depth Indicator Straight -syvyysindikaattori Zygoma Depth Indicator Angled -syvyysindikaattori
32628	Bmk Syst Zygoma Twist Drill 2,9 mm -pora		Brånemark System Zygoma -kierreportat	Liittymä määritelty ISO 1797:n mukaisesti
32629	Bmk Syst Zygoma Twist Drill 2,9 mm short -pora			
32631	Bmk Syst Zygoma Twist Drill 3,5 mm -pora			
32632	Bmk Syst Zygoma Twist Drill 3,5 mm short -pora			
32630	Bmk Syst Zygoma Pilot Drill 3,5 mm -pora			
32791	Bmk Syst Zygoma Pilot Drill 3,5 mm short -pora		Ohjausporanterät	Liittymä määritelty ISO 1797:n mukaisesti
37786	Zygoma Handle -kahva		Manuaalinen implanttiväännin	-
37787	Zygoma Drill Guard -rajakatkaisin		Rajakatkaisin	-
37788	Zygoma Drill Guard Short -rajakatkaisin			
37789	Zygoma Depth Indicator Straight -syvyysindikaattori		Syvyysindikaattori	-
37790	Zygoma Depth Indicator Angled -syvyysindikaattori			
DIA 578-0	Brånemark System® Zygoma Round Bur -pora		Round Bur -pora:	Liittymä määritelty ISO 1797:n mukaisesti

Brånemark System® Zygoma Surgical Kit -sarjan komponentit

Tuotenimi	Sarjaan sisältyvät instrumentit
Brånemark System® Zygoma Surgical Kit -sarja	Zygoma Handle -kahva Zygoma Drill Guard -rajakatkaisin Zygoma Drill Guard Short -rajakatkaisin Zygoma Depth Indicator Straight -syvyysindikaattori Zygoma Depth Indicator Angled -syvyysindikaattori

IFU1096 Jatkeiden irrotustyökalut

Jatkeiden irrotustyökalujen Titanium CC ja Zirconia CC kanssa yhteensopivat jatkeet

	Jatkeen kuvaus	Irrotustyökalu	Ruuvinväännin
NP	Tilapäisjatke Kytkevä CC NP	Jatkeen irrotustyökalu CC NP Titanium	Unigrip™-ruuvinväännin
	Esteettinen jatke CC NP		
	Snappy™-jatke CC NP		
	NobelProcera®-jatke Titanium NP		
RP/WP	Tilapäisjatke Kytkevä CC RP/WP	Jatkeen irrotustyökalu CC RP/WP Titanium	Unigrip™-ruuvinväännin
	Esteettinen jatke CC RP/WP		
	Snappy™-jatke CC RP/WP		
	NobelProcera®-jatke Titanium RP/WP		
NP	NobelProcera®-jatke Zirconia CC NP	Jatkeen irrotustyökalu CC NP Zirconia	Pihdit
	Sovitin Zirconia-jatkeeseen CC NP (NobelProcera® ASC Zirconia-jatke NP, NobelProcera® FCZ -implanttiruunu NP)		
RP/WP	NobelProcera®-jatke Zirconia RP	Jatkeen irrotustyökalu CC RP/WP Zirconia	Pihdit
	Sovitin Zirconia-jatkeeseen CC RP ja WP (NobelProcera® ASC -jatke Zirconia RP/WP, NobelProcera® FCZ -implanttiruunu RP/WP)		

Jatkeen irrotustyökalun Nobel Biocare N1™ TCC kanssa yhteensopivat jatkeet

	Jatkeen kuvaus	Irrotustyökalu	Ruuvinväännin/kahva
NP	Paranemisjatke Nobel Biocare N1™ TCC NP	Jatkeen irrotustyökalu Nobel Biocare N1™ TCC NP*	Laiteinstrumentin kahva/Manuaalinen momenttiavaimen sovitin Vanha versio on yhteensopiva Multi-unit-ruuvinvääntimen kanssa
	Tilapäisjatke Nobel Biocare N1™ TCC NP*		
	Yleiskäyttöinen jatke Nobel Biocare N1™ TCC NP**		
	Multi-unit-jatke Xeal™ Nobel Biocare N1™ TCC NP		
	17° Multi-unit-jatke Xeal™ Nobel Biocare N1™ TCC NP		
	Nobel Biocare N1™ Base Xeal™ TCC Kolmikorvake NP		
	Esteettinen jatke Nobel Biocare N1™ TCC NP		
	Titanium-jatke-aihiot Nobel Biocare N1™ NP		
RP	Paranemisjatke Nobel Biocare N1™ TCC RP	Jatkeen irrotustyökalu Nobel Biocare N1™ TCC RP*	Laiteinstrumentin kahva/Manuaalinen momenttiavaimen sovitin Vanha versio on yhteensopiva Multi-unit-ruuvinvääntimen kanssa
	Tilapäisjatke Nobel Biocare N1™ TCC RP*		
	Yleiskäyttöinen jatke Nobel Biocare N1™ TCC RP**		
	Multi-unit-jatke Xeal™ Nobel Biocare N1™ TCC RP		
	17° Multi-unit-jatke Xeal™ Nobel Biocare N1™ TCC RP		
	30° Multi-unit-jatke Xeal™ Nobel Biocare N1™ TCC RP		
	Nobel Biocare N1™ Base Xeal™ TCC Kolmikorvake RP		
	Esteettinen jatke Nobel Biocare N1™ TCC RP		
	Titanium-jatke-aihiot Nobel Biocare N1™ RP		

*Jatkeen irrotustyökalun "Nobel Biocare N1™ TCC short" lyhyt versio ei ole yhteensopiva tilapäisjatkeen Nobel Biocare N1™ TCC 3,0 mm kanssa.

IFU1097. Implantin irrotustyökalut

Implantin irrotustyökalujen ja implantin pelastuskaulusten yhteensopivuus

Instrumentti	Implantin kiinnitystyyppi	Implantin platformi	Yhteensopiva implantti
Implantin irrotustyökalu CC 3.0 31 mm	Kartiokiinnitys	3.0	NobelActive®
Implantin irrotustyökalu CC NP ja Ulkoinen kuusio WP 22 mm	Kartiokiinnitys	NP	NobelActive® NobelReplace® NobelParallel™
	Ulkoinen kuusiokiinnitys	WP	NobelSpeedy® Groovy Brånemark System®
Implantin irrotustyökalu CC RP ja kolmikorvake WP 22 mm	Kartiokiinnitys	RP	NobelActive® NobelReplace® NobelParallel™
	Sisäinen 3-korvake	WP	Replace Select™ Straight NobelSpeedy® Replace NobelReplace® Straight Replace Select™ Tapered Replace Select™ Tapered PMC NobelReplace® Tapered
Implantin irrotustyökalu CC WP 22 mm	Kartiokiinnitys	WP	NobelActive® NobelParallel™
Implantin irrotustyökalu ulkoinen kuusio ja kolmikorvake NP/RP 22 mm	Ulkoinen kuusiokiinnitys	NP	NobelSpeedy® Groovy Brånemark System®
		RP	NobelSpeedy® Groovy Brånemark System®
	Sisäinen 3-korvake	NP	Replace Select™ TC Replace Select™ Straight NobelSpeedy® Replace NobelReplace® Straight Replace Select™ Tapered Replace Select™ Tapered PMC NobelReplace® Tapered Groovy NobelReplace® Tapered PS
		RP	Replace Select™ TC Replace Select™ Straight NobelSpeedy® Replace NobelReplace® Straight Replace Select™ Tapered Replace Select™ Tapered PMC NobelReplace® Tapered Groovy NobelReplace® Tapered PS

Instrumentti	Implantin kiinnitystyyppi	Implantin platformi	Yhteensopiva implantti
Implantin irrotustyökalu ulkoisen kuusio ja kolmikorvake NP/RP 31 mm	Ulkoisen kuusiokiinnitys	NP	NobelSpeedy® Groovy Brånemark System®
		RP	NobelSpeedy® Groovy Brånemark System®
	Sisäinen 3-korvake	NP	Replace Select™ TC Replace Select™ Straight NobelSpeedy® Replace NobelReplace® Straight Replace Select™ Tapered Replace Select™ Tapered PMC NobelReplace® Tapered Groovy NobelReplace® Tapered PS
		RP	Replace Select™ TC Replace Select™ Straight NobelSpeedy® Replace NobelReplace® Straight Replace Select™ Tapered Replace Select™ Tapered PMC NobelReplace® Tapered Groovy NobelReplace® Tapered PS
Implant Retrieval Instrument Tri-Channel 6.0 22 mm	Sisäinen 3-korvake	6.0	Replace Select™ Tapered Replace Select™ Tapered PMC NobelReplace® Tapered NobelSpeedy® Replace
Implantin pelastuskaulus Kolmikorvake Ø 3.5	Sisäinen 3-korvake	NP	Replace Select™ TC Replace Select™ Straight NobelSpeedy® Replace NobelReplace® Straight Replace Select™ Tapered Replace Select™ Tapered PMC NobelReplace® Tapered Groovy NobelReplace® Tapered PS
Implant Retrieval Instrument CC 3.0 & TCC NP	Triovaali kartiokiinnitys	NP	Nobel Biocare N1™ TCC TiUltra™ NP
	Kartiokiinnitys	3.0	NobelActive®
Implantin irrotustyökalu CC RP ja kolmikorvake WP & TCC RP	Triovaali kartiokiinnitys	RP	Nobel Biocare N1™ TCC TiUltra™ RP
	Kartiokiinnitys	RP	NobelActive® NobelReplace® CC NobelParallel™ CC
	Sisäinen 3-korvake	WP	Replace Select™ Straight NobelSpeedy® Replace NobelReplace® Straight Replace Select™ Tapered Replace Select™ Tapered PMC NobelReplace® Tapered
Implantin pelastuskaulus Kolmikorvake Ø 4,3	Sisäinen 3-korvake	RP	Replace Select™ TC Replace Select™ Straight NobelSpeedy® Replace NobelReplace® Straight Replace Select™ Tapered Replace Select™ Tapered PMC NobelReplace® Tapered Groovy NobelReplace® Tapered PS

Trepan-luuporien yhteensopivuus

Instrumentti	Yhteensopivan implantin halkaisija
Trepan-luupora 3,2/4,0 mm	3,0 mm
Trepan-luupora 3,8/4,6 mm	3,3 mm / 3,5 mm / 3,75 mm
Trepan-luupora 4,4/5,2 mm	4,0 mm / 4,3 mm
Trepan-luupora 5,2/6,2 mm	5,0 mm
Trepan-luupora 5,6/6,6 mm	5,5 mm
Trepan-luupora 6,2/7,0 mm	6,0 mm

IFU1098. Manuaaliset Surgical- ja Prosthetic -momenttiväntimet

Momenttiväännin	Vääntimen sovitin	Instrumentit
NobelActive® Manual Torque Wrench Surgical	NOBELREPLACE® Manual Torque Wrench Adapter Surgical	Implanttiväännin CC 3.0 28 mm (IFU1090) Implanttiväännin CC 3.0 kapealle jatkeelle Implanttiväännin CC NP (IFU1090)
		Implanttiväännin CC NP kapealle jatkeelle (IFU1090) Implanttiväännin CC RP (IFU1090) Implanttiväännin CC RP kapealle jatkeelle (IFU1090) Implantin irrotustyökalut (IFU1097) Jatkeruuvien irrotustyökalut (IFU1043)
Brånemark System® Manual Torque Wrench Surgical	Brånemark System® Manual Torque Wrench Surgical	Implanttiväännin Brånemark Syst NP (IFU1090) Implanttiväännin Driver Brånemark Syst RP (IFU1090) Implanttiväännin Brånemark Syst WP (IFU1090)
Manual Torque Wrench Surgical Nobel Biocare N1™	NobelReplace® Manual Torque Wrench Adapter Surgical	Implanttiväännin Nobel Biocare N1™ TCC NP (IFU1087) Implanttiväännin Nobel Biocare N1™ TCC RP (IFU1087) Implantin irrotustyökalut (IFU1097) Jatkeruuvien irrotustyökalut (IFU1043)
Proteettinen momenttiväännin	Manual Torque Wrench Adapter Prosthetic	Koneellinen ruuvinväännin Machine Unigrip (IFU1085) Koneellinen ruuvinväännin Multi-Unit (IFU1085) Omnigrip™-koneellinen ruuvinväännin (IFU1085) On1™ Base -koneellinen ruuvinväännin (IFU1074) Koneellinen ruuvinväännin Multi-unit Brånemark System (IFU1085) Koneellisen ruuvinvääntimen pallojatke (IFU1085)
Proteettinen momenttiväännin Nobel Biocare N1™	Manual Torque Wrench Adapter Prosthetic	Koneellinen ruuvinväännin Omnigrip™ Mini (IFU1085) Koneellinen ruuvinväännin Multi-Unit (IFU1085)

IFU1099. Trefoil™ System

Trefoil™-järjestelmää saa käyttää vain yhteensopivien Nobel Biocare -instrumenttien ja/tai komponenttien ja/ tai proteettisten komponenttien kanssa. Jos käytetään instrumentteja ja/tai komponentteja ja/tai proteettisia komponentteja, joita ei ole tarkoitettu käytettäväksi yhdessä Trefoil™-tuotteen kanssa, tämä saattaa aiheuttaa tuotteen vioittumisen, kudonsvaurioita tai esteettisesti epätydyttäviä tuloksia.

IFU1100. Korvaavat Nobel Biocare- osat

Korvaavien Brånemark System® -osien luettelo

Alkuperäinen jatke	Korvaava ruuvi	Kiristuksen vääntömomentti	Korvaava ruuvinväänin
Standard Abutment RP- tai EsthetiCone Abutment -jatke	Proteettinen ruuvi, sisäinen kuusio	10 Ncm	Ruuvinväänin kuusio 27 mm Koneelliset ruuvinvääntimet kuusio pitkä
	Proteettisen ruuvin aukko		Ruuvinväänin Medium 37 mm Ruuvinvääntimen aukko lyhyt 27 mm
	Proteettinen ruuvi, kartio		Machine Screwdriver Slot Short -ruuvinväänin Machine Screwdriver Slot Long -ruuvinväänin
Brånemark 3.0 NP -jatke 3.0 Brånemark-implantille	Muuntoruuvi Titanium Unigrip™ koko Ø 3.0	15 Ncm	Unigrip™-ruuvinväänin*

* Laite on osa Nobel Biocaren päävalikoimaa.

Katso Nobel Biocaren käyttöohjeesta IFU1085 lisätietoja Unigrip™ Screwdriver -ruuvinvääntimestä. Tämä käyttöohje on ladattavissa osoitteesta ifu.nobelbiocare.com.

Korvaavien Brånemark System® Novum -osien luettelo

Alkuperäinen implantti	Korvaava ruuvi	Kiristuksen vääntömomentti	Ruuvinväänin	Korvaava jäljennössylinteri	Korvaava työimplantti
Brånemark System® Novum	Lower bar screw Unigrip™ Novum -ruuvi Proteettiset ruuvit Unigrip™ Novum	35 Ncm	Unigrip™-ruuvinväänin*	Impression Coping to Fixture Novum -jäljennössylinteri	Novum-kiinnittimen replika

* Laite on osa Nobel Biocaren päävalikoimaa.

Katso Nobel Biocaren käyttöohjeesta IFU1085 lisätietoja Unigrip™ Screwdriver -ruuvinvääntimestä. Tämä käyttöohje on ladattavissa osoitteesta ifu.nobelbiocare.com.

Korvaavien NobelPerfect® System -osien luettelo

Alkuperäinen implantti	Korvaava paranemisjatke	Korvaava pysyvä jatke	Lopullisen jatkeen kiristysmomentti	Ruuvinväänin	Korvaava jäljennössylinteri	Korvaava työimplantti
NobelPerfect® NP, RP, WP	NobelPerfect®- paranemisjatke	Jatke NobelPerfect® NP, RP, WP	35 Ncm	Unigrip™- ruuvinväänin*	Implanttitasan NobelPerfect® NP, RP, WP -jäljennössylinteri	Työimplantti NobelPerfect® NP, RP, WP

* Laite on osa Nobel Biocaren päävalikoimaa.

Katso Nobel Biocaren käyttöohjeesta IFU1085 lisätietoja Unigrip™ Screwdriver -ruuvinvääntimestä. Tämä käyttöohje on ladattavissa osoitteesta ifu.nobelbiocare.com.

Korvaavien Steri-Oss™-osien luettelo ja Replace -ulkoiset kuusiokulmat

Alkuperäinen implantti	Korvaava paranemisjatke	Korvaava pysyvä jatke	Ruuvi	Kiristuksen vääntömomentti	Ruuvinväänin	Korvaava jäljennössylinteri	Korvaava työimplantti
Steri-Oss™- ja Replace-ulkoiset kuusiokulmat	Paranemisjatke	Direct Abutment Engaging Gold/Plastic -jatke Suora jatke, ei- kytkävä, kulta/muovi	Jatkeruuvi TorqTite	35 Ncm	Ruuvinväänin kuusio 0,050" (pituus 0,75" ja 1,25")	Siirtokokoonpano kuusio, avoin tarjotin	Implanttianalogi
Replace External Hex		Direct Abutment Engaging Gold/Plastic 3,5 RPL ja 4,3 RPL -jatke Suora jatke, ei- kytkävä, kulta/muovi 3,5 RPL ja 4,3 RPL					

Alkuperäinen jatke	Korvaava kiinnitysrenkas	Korvaava O-renkas	Korvaava jatkereplika
O-Ring Abutment -jatke	Retainer Ring -renkas	O-Ring Clinical White -renkas	O-Ring Abutment Analog with Spacer -jatkereplika

Korvaavien Steri-Oss™ Non-Hex -osien luettelo

Alkuperäinen implantti	Korvaava jatke	Kiristuksen vääntömomentti	Korvaava ruuvinväänin	Korvaava jäljennössylinteri	Korvaava työimplantti
Steri-Oss™ Non-Hex	Koronaaliruuvisarja 3,25 ja 3,8 Non-Hex	35 Ncm	Ruuvinväänin kuusio 0,050" (pituus 1,75" ja 1,25")	Lanka-ajoitettu siirtopinni 3.25 Non-Hex	Implant Analog Non-Hex -implanttianalogi

Pallojatkkeen korvaavien osien luettelo

Alkuperäinen jatke	Korvaavat ruuvinvääntimet
Ball Abutment -jatke	Screwdriver Machine Ball Abutment -ruuvinväänin Käsiruuvinvääntimen pallojatke

IFU1101. Röntgenmallit

Röntgenmalleja ei voi fyysisesti kiinnittää mihinkään laitteeseen.

IFU1102. Titanium-jatkeaihio Nobel Biocare N1™ TCC

Titanium-jatkeaihio	Kliininen ruuvi	Laboratoriokomponentit	Ruuvinväänin	Kiristuksen vääntömomentti
Titanium-jatkeaihio Nobel Biocare N1™ TCC NP Ø 10 mm	Kliininen ruuvi Screw Nobel Biocare N1™ TCC NP	Laboratorioruuvi Nobel Biocare N1™ TCC NP Työimplantti Nobel Biocare N1™ TCC NP IOS-työimplantti Nobel Biocare N1™ TCC NP	Omnigrip™ Mini	20 Ncm
Titanium-jatkeaihio Nobel Biocare N1™ TCC RP Ø 10 mm	Kliininen ruuvi Screw Nobel Biocare N1™ TCC RP	Laboratorioruuvi Nobel Biocare N1™ TCC RP Työimplantti Nobel Biocare N1™ TCC RP IOS-työimplantti Nobel Biocare N1™ TCC RP	Omnigrip™ Mini	20 Ncm

IFU2001. NobelGuide® -kirurgiset ohjauskiskot ja ohjatut ankkurointipinnit

Tuotteiden, joita on tarkoitus käyttää yhdessä näiden laitteiden kanssa, yhteensopivuus voidaan tarkistaa tuotteisiin tai tuotemerkintöihin merkittyjen värikoodien, mittojen, pituuksien, kiinnitystyyppin ja/tai muiden suorien merkintöjen avulla.

IFU2009. Ohjatut pilottiporasyylinterit, ohjaussyylinterit ja ohjatut ankkurointipinnin sylinterit

Tuotteiden, joita on tarkoitus käyttää yhdessä ohjattujen pilottiporasyylinterien, ohjaussyylinterien ja ohjattujen ankkurointipinnin sylinterien kanssa, yhteensopivuus voidaan tarkistaa tuotteisiin tai tuotemerkintöihin merkittyjen värikoodien, mittojen, pituuksien, kiinnitystyyppin ja/tai muiden suorien merkintöjen avulla.

IFU2011. Nobel Biocare ohjatut leikkaustyökalut

Ohjattujen leikkaustyökalujen yhteensopivuus

Tuotenimi	implantti	Sylinteri	Väännin	Muu
Guided Drill Guide 6.0/WP Ø 6 to Ø 5 mm	-	Guided Sleeve 6.0/WP	-	Handle for Guided Drill Guide -kahva
Guided Drill Guide 6.0/WP - Ø 2,8 mm				
Guided Drill Guide 6.0/WP - Ø 2 mm				
Guided Drill Guide 6.0/WP - Ø 3,8 mm				
Guided Drill Guide 6.0/WP - Ø 3 mm				
Guided Drill Guide 6.0/WP - Ø 4,2 mm				
Guided Drill Guide NP - Ø 2,8 mm		Guided Sleeve -sylinderi NP		
Guided Drill Guide NP - Ø 2 mm				
Guided Drill Guide NP - Ø 3,2 mm				
Guided Drill Guide NP - Ø 3 mm				
Guided Drill Guide RP - Ø 3,2 mm		Guided Sleeve -sylinderi RP		
Guided Drill Guide RP - Ø 2,8 mm				
Guided Drill Guide RP - Ø 2 mm				
Guided Drill Guide RP - Ø 3,4 mm				
Guided Drill Guide RP - Ø 3,6 mm				
Guided Drill Guide RP - Ø 3 mm				
Guided Drill Guide RP - Ø 4,2 mm				
Guided Drill Guide Tapered RP - NP				
Guided Drill Guide Tapered 6.0/WP - NP		Guided Sleeve 6.0/WP		
Guided Drill Guide Tapered 6.0/WP - RP				
Guided Drill Guide WP/6.0 - Ø 3,6 mm				
Guided Drill Guide WP/6.0 - Ø 4,6 mm				
Guided Surgery Implant Mount NobelActive® NP	NobelActive®/NobelActive® TiUltra™ NP	Guided Sleeve -sylinderi NP	Kirurginen väännin Manuaalinen/koneellinen ruuvinväännin Unigrip™	Manuaalinen, kirurginen momenttivääntimen sovitin Liitin käsikapaleeseen
Guided Surgery Implant Mount NobelActive® RP 4.3	NobelActive®/NobelActive® TiUltra™ RP 4.3	Guided Sleeve -sylinderi RP		
Guided Surgery Implant Mount NobelActive® RP 5.0	NobelActive®/NobelActive® TiUltra™ RP 5.0	Guided Sleeve 6.0/WP		
Guided Surgery Implant Mount NobelActive® WP 5.5	NobelActive® / NobelActive® TiUltra™ WP 5.5			

Tuotenimi	implantti	Sylinteri	Väännin	Muu
Guided Implant Mount Bmk Syst NP	Brånemark System® NP	Guided Sleeve -sylinteri NP	Kirurginen väännin Manuaalinen/koneellinen ruuvinväännin Unigrip™	Brånemark System® -manuaalinen, kirurginen momenttivääntimen sovitin
Guided Implant Mount Bmk Syst RP	Brånemark System® RP	Guided Sleeve -sylinteri RP		Liitin käsikapaleeseen
Guided Implant Mount Bmk Syst WP	Brånemark System® WP	Guided Sleeve 6.0/ WP		
Guided Implant Mount NobRpl NP	NobelReplace® NP	Guided Sleeve -sylinteri NP	Kirurginen väännin Manuaalinen/koneellinen ruuvinväännin Unigrip™	NobelReplace® Manual Torque Wrench Adapter Surgical Liitin käsikapaleeseen
Guided Implant Mount NobRpl RP	NobelReplace® RP	Guided Sleeve -sylinteri RP	Guided Sleeve -sylinteri RP	
Guided Implant Mount NobRpl WP	NobelReplace® WP	Guided Sleeve 6.0/ WP	Guided Sleeve 6.0/ WP	
Guided Implant Mount NobRpl 6.0	NobelReplace® 6.0	Guided Sleeve 6.0/ WP	Guided Sleeve 6.0/ WP	
Guided Implant Mount NobelReplace® Conical Connection NP 3.5	NobelReplace® CC NP	Guided Sleeve -sylinteri NP	Kirurginen väännin Manuaalinen/koneellinen ruuvinväännin Unigrip™	NobelReplace® Manual Torque Wrench Adapter Surgical Liitin käsikapaleeseen
Guided Implant Mount NobelReplace® Conical Connection RP 4.3	NobelReplace® CC RP	Guided Sleeve -sylinteri RP		
Guided Implant Mount NobelReplace® Conical Connection RP 5.0	NobelReplace® CC RP 5.0	Guided Sleeve 6.0/ WP		
Guided Implant Mount NobelParallel™ CC NP	NobelParallel™ CC NP	Guided Sleeve -sylinteri NP	Kirurginen väännin Manuaalinen/koneellinen ruuvinväännin Unigrip™	NobelReplace® Manual Torque Wrench Adapter Surgical Liitin käsikapaleeseen
Guided Implant Mount NobelParallel™ CC RP 4.3	NobelParallel™ CC RP	Guided Sleeve -sylinteri RP		
Guided Implant Mount NobelParallel™ CC RP 5.0	NobelParallel™ CC RP 5.0	Guided Sleeve 6.0/ WP		
Guided Implant Mount NobelParallel™ CC WP 5.5	NobelParallel™ CC WP	Guided Sleeve 6.0/ WP		

Tuotenimi	implantti	Sylinteri	Väännin	Muu
Guided Template Abutm w Screw NobelActive® NP	NobelActive®/ NobelActive® TiUltra™ NP	Guided Sleeve -sylinteri NP	Manuaalinen/koneellinen ruuvinväännin Unigrip™	–
Guided Template Abutm w Screw NobelActive® RP 4.3	NobelActive®/ NobelActive® TiUltra™ RP 4.3	Guided Sleeve -sylinteri RP		
Guided Template Abutm w Screw NobelActive® RP 5.0	NobelActive®/ NobelActive® TiUltra™ RP 5.0	Guided Sleeve 6.0/ WP		
Guided Template Abutm w Screw NobRpl 6.0	NobelReplace® CC/ NobelReplace® CC TiUltra™ 6.0 ja Replace Select™ Tapered TiUnite® 6.0 -implantit			
Guided Template Abutm w Screw NobRpl NP	NobelReplace® CC/ NobelReplace® CC TiUltra™ NP ja Replace Select™ Tapered TiUnite® NP -implantit	Guided Sleeve -sylinteri NP		
Guided Template Abutm w Screw NobRpl RP	NobelReplace® CC/ NobelReplace® CC TiUltra™ RP ja Replace Select™ Tapered TiUnite® RP -implantit	Guided Sleeve -sylinteri RP		
Guided Template Abutm w Screw NobRpl WP	NobelReplace® CC/ NobelReplace® CC TiUltra™ WP ja Replace Select™ Tapered TiUnite® WP -implantit	Guided Sleeve 6.0/ WP		
Guided Template Abutment CC NP	NobelActive®/ NobelActive® TiUltra™ NP, NobelParallel™ CC/ NobelParallel™ CC TiUltra™ NP, NobelReplace® CC/ NobelReplace® CC TiUltra™, NP NobelReplace® CC PMC NP -implantit	Guided Sleeve -sylinteri NP		
Guided Template Abutment CC NP	NobelReplace® CC/ NobelReplace® CC TiUltra™ ja CC PMC NP -implantit			
Guided Template Abutment CC RP 4.3	NobelReplace® CC/ NobelReplace® CC TiUltra™ ja CC PMC RP 4.3 -implantit	Guided Sleeve -sylinteri RP		
Guided Template Abutment CC RP 5.0	NobelReplace® CC/ NobelReplace® CC TiUltra™ ja CC PMC RP 5.0 -implantit	Guided Sleeve 6.0/ WP		
Guided Template Abutment CC WP 5.5	NobelReplace® CC/ NobelReplace® CC TiUltra™ ja CC PMC WP 5.5 -implantit			
Guided Template Abutment with Screw Brånemark System® NP	Brånemark System® MK III NP ja NobelSpeedy® Groovy NP -implantit	Guided Sleeve -sylinteri NP		
Guided Template Abutment with Screw Brånemark System® RP	Brånemark System® MK III RP ja NobelSpeedy® Groovy RP -implantit	Guided Sleeve -sylinteri RP		
Guided Template Abutment with Screw Brånemark System® WP	Brånemark System® MK III WP ja NobelSpeedy® Groovy WP -implantit	Guided Sleeve 6.0/ WP		
Guided Template Abutment with Screw NobelActive® WP 5.5	NobelActive® / NobelActive® TiUltra™ WP 5.5			
Handle for Guided Drill Guide -kahva	–	–	–	Ohjatut poranohjaimet

Ohjattujen kirurgisten pyörivien instrumenttien yhteensopivuus

Tuotenimi	Käsikappaleen liitännät
Guided Start Drill/Counterb Bmk Syst NP	EN ISO 1797
Guided Start Drill/Counterbore NobRpl NP	
Guided Start Drill/Counterb Bmk Syst RP	
Guided Start Drill/Counterbore NobRpl RP	
Guided Start Drill/Counterb BmkSyst WP Ø 5	
Guided Start Drill/Counterbore NobRpl WP	
Guided Start Drill/Counterb BmkSyst WP Ø 6	
Guided Start Drill/Counterb NobRpl 6.0	
Guided Twist Drill 2x(10+)7-18 mm	
Guided Twist Drill 2.8x(10+)7-18 mm	
Guided Twist Drill 3x(10+)7-18 mm	
Guided Twist Drill 3.2x(10+)7-18 mm	
Guided Twist Drill 3.4x(10+)7-18 mm	
Guided Twist Drill 3.8x(10+)7-18 mm	
Guided Twist Drill 4.2x(10+)7-18 mm	
Guided Twist Drill 5x(10+)7-18 mm	
Guided Dense Bone Drill Taper NP 3.5x13 mm	
Guided Dense Bone Drill Taper NP 3.5x16 mm	
Guided Dense Bone Drill Taper RP 4.3x13 mm	
Guided Dense Bone Drill Taper RP 4.3x16 mm	
Guided Dense Bone Drill Taper WP 5x13 mm	
Guided Dense Bone Drill Taper WP 5x16 mm	
Guided Dense Bone Drill Taper 6.0 6x13 mm	
Guided Dense Bone Drill Taper 6.0 6x16 mm	
Guided Screw Tap NP 10-13 mm	
Guided Screw Tap RP Ø 3.75 7-13 mm	
Guided Screw Tap Tapered RP	
Guided Screw Tap WP Ø 5 7-13 mm	
Guided Screw Tap Tapered WP	
Guided Screw Tap 6.0/WP Ø 6 7-13 mm	
Guided Screw Tap Tapered 6.0	
Guided StartDrill/Countb ent. MkIII RP	
Guided Screw Tap RP Ø 4 7-13 mm	
Guided Twist Drill 3.2x(10+)7-13 mm	
Guided Twist Drill 3.4x(10+)7-13 mm	
Guided Twist Drill 3.8x(10+)7-13 mm	
Guided Twist Drill 4.2x(10+)7-13 mm	
Guided Twist Drill 5x(10+)7-13 mm	
Guided Twist Step Drill Ø 2.4/2.8 (10+) 7-13 mm	
Guided Twist Step Drill Ø 2.8/3.2 (10+) 7-13 mm	
Guided Twist Step Drill Ø 3.2/3.6 (10+) 7-13 mm	
Guided Twist Step Drill Ø 3.8/4.2 (10+) 7-13 mm	
Guided Twist Step Drill Ø 4.2/4.6 (10+) 7-13 mm	
Guided Twist Step Drill Ø 2.4/2.8 (10+) 7-18 mm	
Guided Twist Step Drill Ø 2.8/3.2 (10+) 7-18 mm	
Guided Twist Step Drill Ø 3.2/3.6 (10+) 7-18 mm	
Guided Twist Step Drill Ø 3.8/4.2 (10+) 7-18 mm	
Guided Screw Tap NobelActive® NP 8,5-10 mm	
Guided Screw Tap NobelActive® RP 4.3 8,5-10 mm	

Guided Screw Tap NobelActive® RP 5.0 8,5-10 mm
Guided Twist Drill Tapered 2 x (10+) 8-16 mm
Guided Start Drill
Guided Counterbore NobelReplace® 3.5
Guided Counterbore NobelReplace® 4.3
Guided Counterbore NobelReplace® 5.0
Guided Counterbore NobelReplace® 6.0
Guided Screw Tap Tapered NP
Guided Pilot Twist Drill 1.5x(10+)10-15 mm
Guided Twist Step Drill 4.2/5.0 (10+) 7-13 mm
Guided Twist Step Drill 4.2/5.0 (10+) 7-18 mm
Guided Screw Tap NobelActive® WP 5.5 7-8,5 mm
Guided Screw Tap NobelActive® WP 5.5 10-15 mm
Guided Twist Step Drill Ø 4.2/4.6x(10+)7-18 mm
Guided Screw Tap NobelParallel™ CC 3.75 7-10 mm
Guided Screw Tap NobelParallel™ CC 3.75 11,5-13 mm
Guided Screw Tap NobelParallel™ CC 3.75 15-18 mm
Guided Screw Tap NobelParallel™ CC 4.3 7-10 mm
Guided Screw Tap NobelParallel™ CC 4.3 11,5-13 mm
Guided Screw Tap NobelParallel™ CC 4.3 15-18 mm
Guided Screw Tap NobelParallel™ CC 5.0 7-10 mm
Guided Screw Tap NobelParallel™ CC 5.0 11,5-13 mm
Guided Screw Tap NobelParallel™ CC 5.0 15-18 mm
Guided Screw Tap NobelParallel™ CC 5.5 7-10 mm
Guided Screw Tap NobelParallel™ CC 5.5 11,5-13 mm
Guided Screw Tap NobelParallel™ CC 5.5 11,5-15 mm
Guided Tissue Punch NP -sylinteri (3.75)
Guided Tissue Punch WP -sylinteri (5.5)
Guided Counterbore NobelParallel™ CC 3.75
Guided Counterbore NobelParallel™ CC 4.3
Guided Counterbore NobelParallel™ CC 5.0
Guided Counterbore NobelParallel™ CC 5.5
Guided Dense Bone Screw Tap NobelActive® NP 8.5-18 mm
Guided Dense Bone Screw Tap NobelActive® RP 4.3 8,5-18 mm
Guided Dense Bone Screw Tap NobelActive® RP 5.0 8,5-18 mm
Guided Dense Bone Screw Tap NobelActive® WP 5.5 7-8,5 mm
Guided Dense Bone Screw Tap NobelActive® WP 5.5 10-15 mm
Guided Drill Tapered NP
Guided Drill Tapered RP
Guided Drill Tapered WP
Guided Drill Tapered 6.0

Seuraavia komponentteja käytetään ohjatuissa kirurgisissa toimenpiteissä, mutta myös muihin käyttötarkoituksiin, joten ne kuvaillaan erillisissä käyttöohjeissa. Saat näistä komponenteista lisätietoja vastaavista käyttöohjeista.

- Unigrip™ Screwdriver -ruuvinväännintä käytetään Unigrip™-liitännällä varustettujen ruuvien manuaaliseen kiristämiseen ja löysäämiseen. Näitä ruuveja käytetään proteettisten hammasrakenteiden kiinnittämiseen Nobel Biocaren hammasimplantteihin. Katso Nobel Biocaren käyttöohjeesta IFU1085 lisätietoja Unigrip™ Screwdriver -ruuvinvääntimestä.

- Ohjatut Guided Anchor Pin -ankkurointipinnit ovat ruostumattomasta teräksestä valmistettuja ohuita puikkoja, jotka viedään lähes vaakasuorasti leukaluuhun ja jotka auttavat kiinnittämään ohjauskiskon sille suunniteltuun paikkaan leikkauksen aikana. Katso Nobel Biocaren käyttöohjeesta IFU2001 lisätietoja Guided Anchor Pin -ankkurointipinneistä.
- Manuaalista Manual Torque Wrench Surgical -momenttiväännintä käytetään Nobel Biocaren implanttien sisäänvientiin ja kiristämiseen vaihtoehtona koneelliselle kiristykselle. Lisätietoja Manual Torque Wrench Surgical -momenttivääntimestä on Nobel Biocaren käyttöohjeessa IFU1098.
- Proteettinen Manual Torque Wrench Prosthetic -momenttiväännin on tarkoitettu Nobel Biocare -abutmenttien ja -abutmentiruuvien kiristämiseen, ja sitä voidaan käyttää vaihtoehtona koneelliselle kiristämiselle. Tietoja proteettisesta Manual Torque Wrench Prosthetic -momenttivääntimestä on Nobel Biocaren käyttöohjeessa IFU1098.
- Proteettisen ruuvinvääntimen Torque Wrench Prosthetic Adapter -kahvaosaa käytetään Screwdriver Machine Unigrip™ -ruuvinvääntimen ja Omnigrip™ Screwdriver -ruuvinvääntimen yhdistämiseen proteettiseen Manual Torque Wrench Prosthetic -momenttivääntimeen. Lisätietoja proteettisen ruuvinvääntimen Torque Wrench Prosthetic Adapter -kahvaosasta on Nobel Biocaren käyttöohjeessa IFU1098.
- Connection to Handpiece -liitintä käytetään implantin viejän ja implanttikokoonpanon yhdistämiseen käsikappaleeseen. Lisää tietoja Connection to Handpiece -liittimestä käsikappaleeseen on Nobel Biocaren käyttöohjeessa IFU1090.

IFU3001. NobelProcera® Implant Bar Overdenture -implanttikiskon peittoproteesi

Yhteensopivat implanttituotesarjat	Saatavilla olevat platformikoot
NobelActive®	NP, RP, WP
NobelActive® TiUltra™	NP, RP, WP
NobelParallel™ Conical Connection	NP, RP, WP
NobelParallel™ Conical Connection TiUltra™	NP, RP, WP
NobelReplace® Conical Connection	NP, RP
NobelReplace® Conical Connection PMC	NP, RP
NobelReplace® Conical Connection TiUltra™	NP, RP
ReplaceSelect™ TC	NP, RP
Brånemark System® Mk III TiU	RP
NobelSpeedy®	NP/RP/WP
NobelZygoma	RP
Zygoma-implantti	RP

IFU3002. NobelProcera® Titanium ja Zirconia -implanttisillat

NobelProcera® Titanium- ja Zirconia -implanttisiltojen kanssa yhteensopivat implanttituotesarjat

Yhteensopivat implanttituotesarjat	Saatavilla olevat platformikoot
NobelActive®	NP, RP, WP
NobelActive® TiUltra™	NP, RP, WP

Yhteensopivat implanttituotesarjat	Saatavilla olevat platformikoot
NobelParallel™ Conical Connection	NP, RP, WP
NobelParallel™ Conical Connection TiUltra™	NP, RP, WP
NobelReplace® Conical Connection	NP, RP
NobelReplace® Conical Connection PMC	NP, RP
NobelReplace® Conical Connection TiUltra™	NP, RP
ReplaceSelect™ TC	NP, RP
Brånemark System® Mk III	RP
Brånemark System® Mk III TiU	RP
NobelSpeedy® Groovy	NP/RP/WP
NobelSpeedy® Shorty	NP/RP/WP
NobelZygoma	RP
Zygoma-implantti	RP

Muut NobelProcera® Titanium- ja Zirconia -implanttisiltojen kanssa yhteensopivat tuotteet

Tuotesarja	
Tuotekuvaus	NobelProcera®-implanttisillat Titanium ja Zirconia
Työimplantit ja multi-unit-jatkeiden replikat	Implant Replicas NobRpl; Implant Replica Brånemark System®; Implant Replica CC; NP IOS Model Implant Replica CC; Multi-unit Abutment Plus Replica; Abutment Replica Multi-unit Bmk Syst
Laboratorioruuvit	Laboratorioruuvi Multi-unit; Laboratorioruuvi CC; Laboratorioruuvi ulkoinen kuusio; Laboratorioruuvi implanttitaso NobRpl; Laboratorioruuvi Multi-unit Bmk Syst; Laboratorioruuvi implanttitaso Bmk Syst; Laboratorioruuvi implanttitaso NobRpl
Suoja-analogit	Suoja-analogi Bmk Syst; Suoja-analogi NobRpl; Suoja-analogi Multi-unit; Suoja-analogi M-u Bmk Syst; Suoja-analogi/poraohjain CC

IFU3008. NobelProcera® kulmattu Zirconia-ruuvikanavajatk Nobel Biocaren sisäiseen kartiokiinnitykseen (CC)

Yhteensopivat implanttituotesarjat

Yhteensopivat implanttituotesarjat	Saatavilla olevat platformikoot
NobelActive®	NP, RP, WP
NobelReplace® Conical Connection	NP, RP
NobelReplace® Conical Connection PMC	NP, RP
NobelParallel™ Conical Connection	NP, RP, WP
NobelActive® TiUltra™	NP, RP, WP
NobelParallel™ Conical Connection TiUltra™	NP, RP, WP
NobelReplace® Conical Connection TiUltra™	NP, RP

Muita yhteensopivia tuotteita

Tuotesarja	
Tuotekuvaus	NobelProcera® ASC Zirconia -jatke
Työimplantit	Työimplantit kartiokiinnityksellä
Laboratorioruuvit	Omnigrip™-laboratorioruuvit CC
Ruuvinväännin	Omnigrip™-ruuvinvääntimet
Suoja-analogit	Suoja-analogit kartiokiinnityksellä
Jatkeen irrotustyökalut	Jatkeen irrotustyökalut Zirconia CC

IFU3009. NobelProcera® täyden ääriviivan Zirconia -implanttikruunu (Full Contour Zirconia, FCZ) - Nobel Biocaren sisäiseen kartiokiinnitykseen

Yhteensopivat implanttituotesarjat

Yhteensopivat implanttituotesarjat	Saatavilla olevat platformikoot
NobelActive®	NP, RP, WP
NobelReplace® Conical Connection	NP, RP
NobelReplace® Conical Connection PMC	NP, RP
NobelParallel™ Conical Connection	NP, RP, WP
NobelActive® TiUltra™	NP, RP, WP
NobelParallel™ Conical Connection TiUltra™	NP, RP, WP
NobelReplace® Conical Connection TiUltra™	NP, RP

Muita yhteensopivia tuotteita

Tuotesarja	
Tuotekuvaus	NobelProcera® FCZ -implanttikruunu
Työimplantit	Työimplantit kartiokiinnityksellä
Laboratorioruuvit	Omnigrip™-laboratorioruuvit CC
Ruuvinväänin	Omnigrip™-ruuvinvääntimet
Suoja-analogit	Suoja-analogit kartiokiinnityksellä
Jatkeen irrotustyökalut	Jatkeen irrotustyökalut Zirconia CC

IFU3010. NobelProcera® Titanium- ja Zirconia-jatkeet

NobelProcera®/Procera® Titanium -jatkeiden yhteensopivuus

Titanium-jatke ja Unigrip™					
Kiinnitys	Platformi	Kliininen ruuvi	Laboratorioruuvi	Ruuvinväänin	Vääntömomentti
Kartiokiinnitys	3.0	Kliininen ruuvi CC 3.0	Laboratorioruuvi implanttitasolla CC 3.0	Unigrip™	15 Ncm
	NP	Kliininen ruuvi CC NP	Laboratorioruuvi CC NP		35 Ncm
	RP	Kliininen ruuvi CC RP/WP	Laboratorioruuvi CC RP/WP		
	WP				
Kolmikorvake	NP	Jatkeruuvi NobelReplace® NP	Laboratorioruuvi implanttitasolla NobRpl NP		
	RP	Jatkeruuvi NobelReplace® RP/WP/6.0	Laboratorioruuvi implanttitasolla NobRpl RP/WP/6.0		
	WP				
	6.0				
Ulkoinen kuusiokiinnitys	NP	Jatkeruuvi Bmk Syst NP	Laboratorioruuvi CC NP		
	RP	Jatkeruuvi Bmk Syst RP	Laboratorioruuvi Ulkoinen kuusio RP		
	WP	Jatkeruuvi Bmk Syst WP	Laboratorioruuvi implanttitasolla Bmk Syst WP		

NobelProcera®/Procera® Zirconia -jatkeiden yhteensopivuus

Zirconia-jatkeet ja Unigrip™					
Vääntömomentti	Vääntömomentti	Vääntömomentti	Vääntömomentti	Vääntömomentti	Vääntömomentti
Kartiokiinnitys	NP	Kliininen ruuvi CC NP	Laboratorioruuvi CC NP	Unigrip™	35 Ncm
	RP	Kliininen ruuvi CC RP/WP	Laboratorioruuvi CC RP/WP		
Kolmikorvake	NP	Ruuvi keraaminen jatke NobRpl NP	Laboratorioruuvi implanttitasolla NobRpl NP		
	RP	Ruuvi keraaminen jatke NobRpl RP/WP/6.0	Laboratorioruuvi implanttitasolla NobRpl RP/WP/6.0		
	WP				
Ulkoinen kuusiokiinnitys	NP	Ruuvi keraaminen jatke Bmk Syst NP	Laboratorioruuvi CC NP		
	RP	Ruuvi keraaminen jatke Bmk Syst RP	Laboratorioruuvi CC RP/WP		
	WP	Ruuvi keraaminen jatke Bmk Syst WP	Laboratorioruuvi implanttitasolla Bmk Syst WP		

NobelProcera® ACS Titanium -jatkeiden yhteensopivuus

Titanium ASC -jatke ja Omnigrip™					
Kiinnitys	Platformi	Kliininen ruuvi	Laboratorioruuvi	Ruuvinväänin	35 Ncm
Kartiokiinnitys	NP	Omnigrip™ Kliininen ruuvi Titanium CC NP	Omnigrip™ Laboratorioruuvi Titanium CC NP	Omnigrip™	
	RP	Omnigrip™ Kliininen ruuvi Titanium CC RP/WP	Omnigrip™ Laboratorioruuvi Titanium CC RP/WP		
	WP				
Kolmikorvake	NP	Omnigrip™ Kliininen ruuvi Ti Kolmikorvake NP	Omnigrip™ Laboratorioruuvi Ti Kolmikorvake NP		
	RP	Omnigrip™ Kliininen ruuvi Ti Kolmikorvake RP/WP/6.0	Omnigrip™ Laboratorioruuvi Ti Kolmikorvake RP/WP/6.0		
	WP				
	6.0				

IFU3012. NobelProcera® Zirconia Crown

NobelProcera® Zirconia Crown -kruunu on erillistuote, joka sementoidaan valmisteltuun luonnonhampaaseen tai jatkeeseen. Käytetyn materiaalin soveltuvuus on hoitavan lääkärin vastuulla.

IFU3014. NobelProcera® Zirconia Bridge

NobelProcera® Zirconia Bridge -silta on erillistuote, joka sementoidaan valmisteltuun luonnonhampaaseen tai jatkeisiin. Käytetyn materiaalin soveltuvuus on hoitavan lääkärin vastuulla.

IFU3018. NobelProcera® Zirconia Implant Bridge -implanttisilta

	Kiinnitystyyppi											
	Ulkoinen kuusiokiinnitys			Sisäinen 3-korvake			CC			MUA		
NobelProcera Implant bridge Zirconia	NP	RP	WP	NP	RP	WP	6.0	NP	RP	WP	NP/RP	WP
Kliininen sovitin	–							Implanttisillan CC -metallisovitin, kliininen			–	
Laboratoriosovitin	–							Implanttisillan CC-metallisovitin, laboratorio			–	
Kliininen ruuvi	Keraamisen abutmentin ruuvi, Brånemark System®							Omnigrip™ Kliininen ruuvi CC			Proteettinen ruuvi Multi-unit-jatke Omnigrip™ Mini	
Laboratorioruuvi	Laboratorioruuvi Implanttitaso Ulkoinen kuusio			– (*)				Laboratorioruuvi, Omnigrip™ CC Laboratorioruuvi Implanttitaso Kartiokiinnitys			Laboratorioruuvi Multi-unit-jatke Omnigrip™ Mini	
Työimplantit/multi-unit-jatkereplikat	Brånemark System® -työimplantti			Työimplantit NobelReplace®				Työimplantti Kartiokiinnitys			Multi-unit-jatke Plus Replika	Multi-unit-jatke Plus Replika
	Elos Accurate -analogi tulostetulle mallille, ulkoinen hekso			Elos Accurate -analogi tulostetulle mallille Kolmikorvake				IOS-mallin työimplantti, CC			Elos Accurate -analogi tulostetulle mallille Multi-unit	Jatkereplika Multi-unit Bmk Syst Elos Accurate -analogi tulostetulle mallille Multi-unit
Suoja-analogit	Bmk Syst -suoja-analogi			NobelReplace®-suoja-analogi				Suoja-analogi/poraohjain CC			Suoja-analogi Multi-unit	Suoja-analogi Multi-unit Suoja-analogi M-u Bmk Syst
Multi-unit-jatkeet	Multi-unit Abutment Bmk Syst 17° Multi-unit Abutment Bmk Syst 30° Multi-unit Abutment Bmk Syst Zygoma-abutmentti Brånemark System® Zygoma Zygoma 17° Brånemark System® Zygoma 17° 45° Multi-unit Abutment, ulkoinen hekso 60° Multi-unit Abutment, ulkoinen hekso			Multi-unit Abutment NobRpl 17° Multi-unit Abutment NobRpl 30° Multi-unit Abutment NobRpl				Multi-Unit Abutment -abutmentti ja kartiokiinnitys 17° Multi-unit Abutment -abutmentti ja kartiokiinnitys 30° Multi-unit Abutment -abutmentti ja kartiokiinnitys Multi-unit Abutment Xeal™, kartiokiinnitys 17° Multi-unit Abutment Xeal™, kartiokiinnitys 30° Multi-unit Abutment Xeal™, kartiokiinnitys			–	
Implantit	NobelSpeedy® Groovy NobelSpeedy® Shorty	Brånemark System® Mk III Brånemark System® Mk III TiUnite® NobelSpeedy® Groovy NobelSpeedy® Shorty Zygoma-implantti NobelZygoma™	NobelSpeedy® Groovy NobelSpeedy® Shorty	Replace Select™ TC				NobelActive® NobelActive® TiUltra™ NobelParallel™ CC NobelParallel™ CC TiUltra™ NobelReplace® CC NobelReplace® CC PMC NobelReplace® CC TiUltra™	NobelActive® NobelActive® TiUltra™ NobelParallel™ CC NobelParallel™ CC TiUltra™ NobelReplace® CC NobelReplace® CC PMC NobelReplace® CC TiUltra™	NobelActive® NobelActive® TiUltra™ NobelParallel™ CC NobelParallel™ CC TiUltra™	–	

IFU3020. NobelProcera® Zirconia N1™ Base -alusta

Yhteensopivuus, Nobel Procera® Zirconia NB N1™ Base – proteettinen ruuvi – Nobel Biocare N1™ Base Xeal TCC

Proteettisen rakenteen tyyppi	Proteettinen ruuvi	Ruuvinväänin	Nobel Biocare N1™ Base Xeal™ TCC Kolmikorvake
Nobel Procera® Zirconia -abutmentti/implanttikruunu NB N1™ Base NP	Proteettinen ruuvi NobelProcera® Zirconia Nobel Biocare N1™ Base NP	Omnigrip™ Mini	Nobel Biocare N1™ Base Xeal™ TCC Kolmikorvake NP
Nobel Procera® Zirconia-jatke/implanttikruunu NB N1™ Base RP	Proteettinen ruuvi NobelProcera® Zirconia Nobel Biocare N1™ Base RP		Nobel Biocare N1™ Base Xeal™ TCC Kolmikorvake RP

Yhteensopivuus, Nobel Procera® Zirconia NB N1™ Base – laboratorioruuvi – alustareplika

Proteettisen rakenteen tyyppi	Laboratorioruuvi	Base Replica Nobel Biocare N1™ Base	IOS-alustareplika Nobel Biocare N1™ Base
Nobel Procera® Zirconia -abutmentti/implanttikruunu NB N1™ Base NP	Laboratorioruuvi NobelProcera® Zirconia Nobel Biocare N1™ Base NP	Alustareplika Nobel Biocare N1™ Base Kolmikorvake NP	IOS-alustareplika Nobel Biocare N1™ Base Kolmikorvake NP
Nobel Procera® Zirconia-jatke/implanttikruunu NB N1™ Base RP	Laboratorioruuvi NobelProcera® Zirconia Nobel Biocare N1™ Base RP	Base Replica Nobel Biocare N1™ Base Tri RP	IOS-alustareplika N1™ Base Kolmikorvake RP